

エアロゾル ICボックス

ベッド用 1個入

取り扱い説明書


JANコード 品番 57165



GS1-128



(01) 0 4971032 57165 2

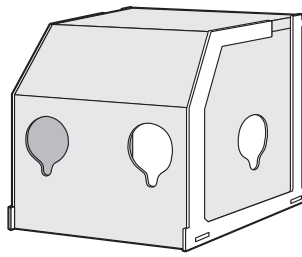

< 内容物 >

- 本体 1個
- 飛散低減プレート 1個
- 処置用穴カバー 4個


谷折り



< 内寸法 >


- 幅57cm × 高さ55cm × 奥行57cm

処置用穴

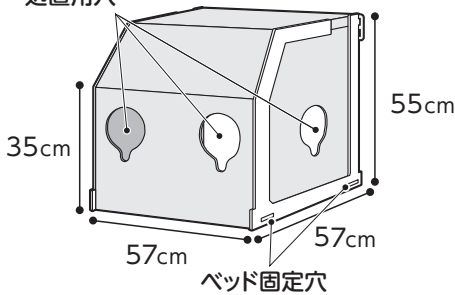

展開図


< 本体 >

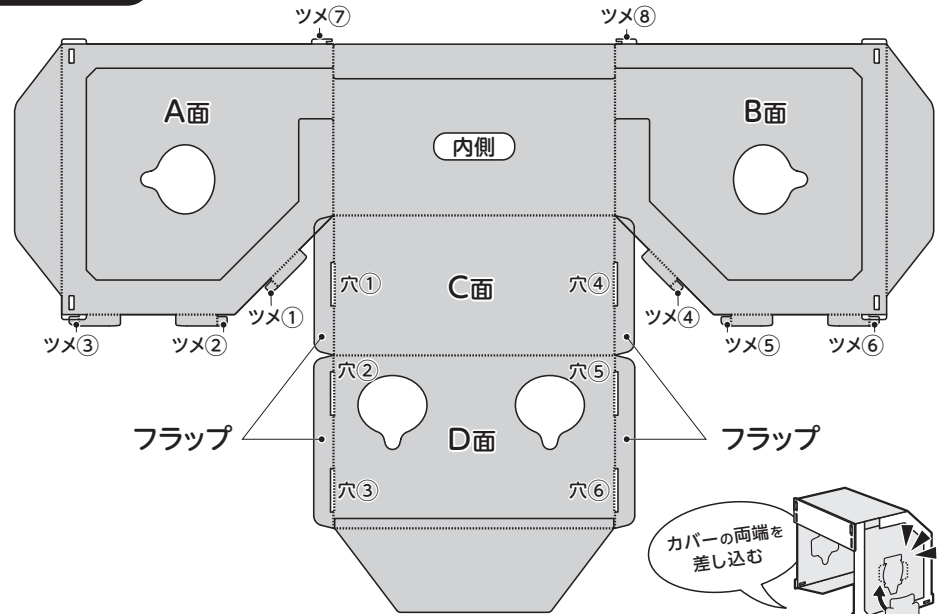

< 飛散低減プレート >




< 処置用穴カバー >

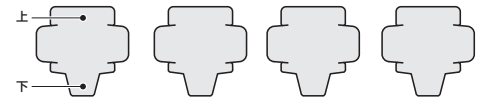


本体「処置用穴」に装着済みです。「処置用穴カバー」は取り外しができます(使用しない時はカバーを差し込んで飛沫感染を防ぎます)。


組み立て方

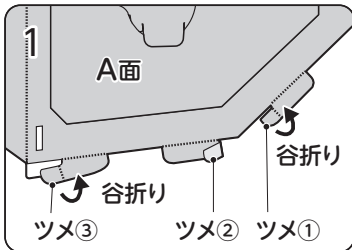


白い枠が外側になるように、上の展開図の向きに開き、「ツメ①～⑥」を谷折りします。

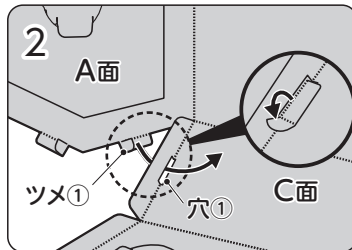

A面を立ち上げて「ツメ①」を「穴①」に差し込み、ツメを広げて固定します。

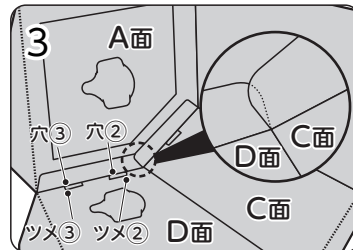

「C面フラップ」が、「D面フラップ」の手前になるように重ね、「ツメ②・③」を「穴②・③」に差し込みツメを広げて固定します。反対側も同様に行います。

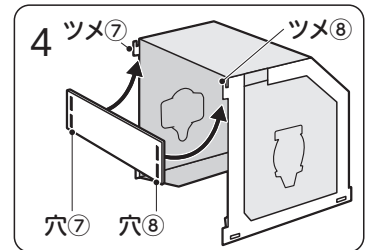

「ツメ⑦・⑧」を、「飛散低減プレート」の「穴⑦・⑧」に差し込みます(上下どちらかの穴に差し込むことで、高さを調節できます)。ベッド固定穴とベッドを紐などで固定するとより安定します。

< お手入れ方法 >

- アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの拭き取りが可能です。

< 使用上の注意 >

- エアロゾルボックス以外の目的で使用しないでください。
- ボックスの上に物を置かないでください。
- 組み立て式の性質上、折り曲げた際にキズや白濁が発生することがありますが、製品強度への影響はありません。
- 変形の原因になりやすいため、高温や直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 本体にひび割れ等が発生した場合は、新しいものと取り替えてください。

ICボックスの詳しい情報は
こちら
(組み立て動画あり)



Osaki
オオサキメディカル株式会社

名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812
ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>
お客様相談室 ☎ 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00 ※土・日、祝日を除く)

日本製

132075-01
W660×H38×D595 素材:PET、PP