

床ずれ防止やストレス軽減に 体圧除圧グローブ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

ベージュ

- +** グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
- +** 滑りやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
- +** やさしく除圧
ストレスを与えず拘縮^{こうしゆく}を予防



体圧の除圧や、背抜き、衣類の
しわ伸ばしに最適なグローブです。



体圧除圧グローブで、“ノーリフティングケア”を

“ノーリフティングケア”とは 被介護者を無理に持ち上げない・抱え上げない介護 のことです。

床ずれ予防

摩擦を軽減して
除圧をすることで、
床ずれを予防します。

拘縮^{こうしゆく※}予防

持ち上げる・抱え上げるなどの
ストレスを与えないことで、
拘縮を予防します。

腰痛予防

持ち上げずに
除圧をすることで、
介護者の腰痛を予防します。

※関節が硬くなり動かしにくくなった状態のこと。

商品特長

+ 1. 除圧に適した素材と形状


- フッ素加工を施した滑りやすい素材をグローブタイプにしているため、被介護者を無理に抱え上げることなく、手を滑らせるだけで簡単に除圧できます。

+ 2. 保管がかんたんな吊り下げループ付き

- ベッド周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。また、踏みつけによる介護者の転倒などのリスクを軽減します。




踏みつけによる転倒

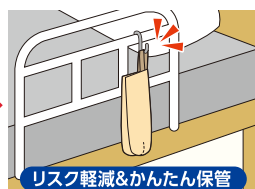

リスク軽減&かんたん保管

+ 3. ムレにくい通気口付き

- 2つの通気口が付いているため、グローブ内のムレを軽減できます。

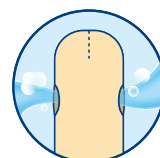

+ 4. ズレにくいステッチ入り

- グローブの中央にステッチを入れているため、使用中に手がズレにくくなっています。

+ 5. 名前を記入できるネームタグ

- 洗濯タグに名前が記入できるため、専用品として使用できます。



+ 6. 使用方法を案内

- 包装箱のQRコードからアクセス(弊社ホームページ)していただくと、除圧・移動方法の動画や、商品の詳しい情報を見ることができます。




商品情報

■使用用途


- 体圧の除圧
- 背抜き、衣類などのしわ伸ばし

■使用方法

※詳細は上記QRコードから見るができます。

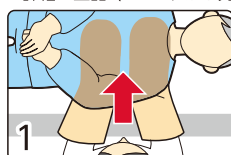


グローブをはめた両手を
仰向けに寝た被介護者の
背中の下に差し込みます。

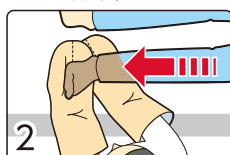

差し込んだ両手を被介護者の
背中から足先までゆっくり
と滑らせ、除圧します。

■規格

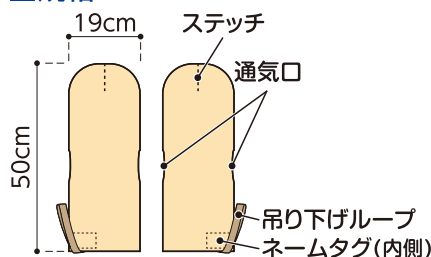

■素材

ポリエステル 100%

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
75172	PH 体圧除圧グローブ ベージュ 2枚入 19cm×50cm	販売単位 115 × 235 × 20 外装 490 × 240 × 250	140.0g 6.4kg	40箱	タイアツシ・ヨアツ B 4 4 971032 751726	4971032751726 14971032751723

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。