



看護・介護製品

介護ベッド用品

使い捨て 高吸収マット 巻込みタイプ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました


- +** 使い捨てタイプ
洗濯の手間がいらぬ
- +** 吸収量1100mL
万一のモレもしっかり吸収
- +** 十分な長さの巻込み付
ズレずにしわになりにくい

吸収量 **1100mL**

ズレにくい巻込み付

60cm×180cm

吸収面 54cm×80cm

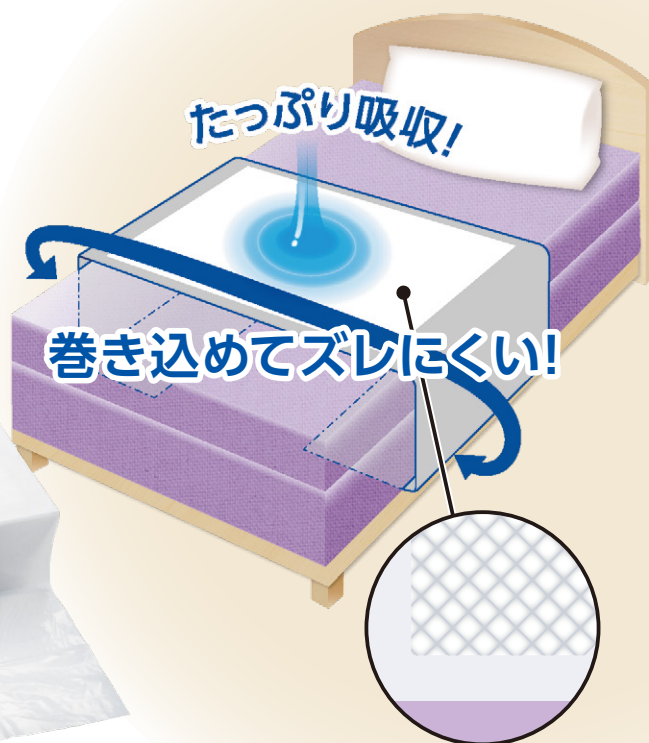

ダイヤ柄プレスに沿って
素早く拡散・吸収

万一のモレもしっかり吸収する
洗濯の手間が不要な使い捨て防水マットです。



PH 使い捨て高吸収マット 巻込タイプ



看護・介護製品

介護ベッド用品


商品特長

+ 1.洗濯の手間がいない


- 使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。

+ 2.万一のモレもしっかり吸収

- 高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。
- オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。

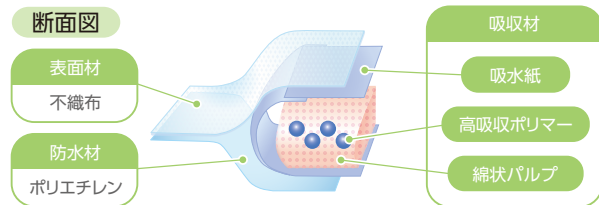

- ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。

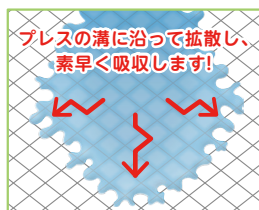

※拡散のイメージ

+ 3.ズレずにシワになりにくい

- 十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。

+ 4.汚れが下にモレない

- 裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。

+ 5.逆戻りが少なく、さらさら長続き


- 吸収後は逆戻りせず、さらとした表面状態を保ちます。

+ 6.ぬれても破れにくい

- 丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。

商品情報

■使用方法

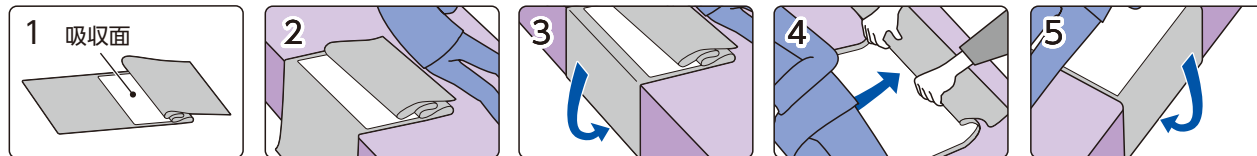

吸収面を上にして、マットを完全に開きます。図のように片側半分を軽く折りたたみます。


使用者を横向きに寝かせて、お尻がマット中央に乗るようにマットを敷きます。

マットレスやエアーマットなどの下に巻込み部を差し込みます。


使用者をゆっくり反対側に向け、身体の下からマットを引き出します。

引き出したマットを広げ、巻込み部を手順3と同様にマットレスなどの下に差し込み、整えます。

■製品仕様

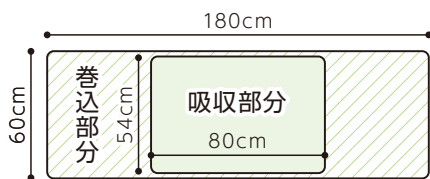

- セミシングルベッド、シングルベッド、介護用ベッド(83cm、91cm、100cm幅)に対応

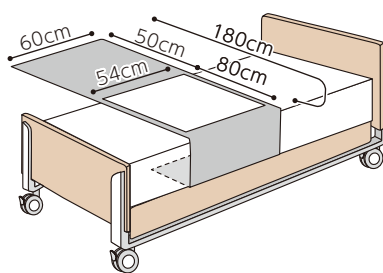

■素材

- 表面材: ポリプロピレン、ポリエチレン
- 吸収材: 吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ
- 防水材: ポリエチレン

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名語/JANコード	JANコード/ITFコード
75153	PH 使い捨て高吸収マット 巻込タイプ 60180 6枚入 60cm×180cm	販売単位 210 × 280 × 55 外装 490 × 560 × 420	400.0g 10.5kg	24袋	コウキユウシヨク6011806 4 971032 751535	4971032751535 14971032751532

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<http://plus-ph.com>



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。