

使い捨て 高吸収マット 巻込タイプ

DISPOSABLE ABSORBENT MAT

- + 高吸収消臭ポリマー配合
尿約6回分の高吸収! 臭いも軽減!
- + 敷きやすい折り方
少しの体の移動で楽に敷ける
- + 十分な長さの巻き込み
ズレずにしわになりにくい



吸収量と敷きやすさにこだわった、
巻き込みタイプの使い捨て高吸収マットです。

使い捨て高吸収マット 巻込タイプ



看護・介護製品

ベッド関連用品

商品特長

+ たっぷり吸収し臭いを軽減

- ・高吸収消臭ポリマーを配合しているため、尿約6回分* (1000cc) を素早くたっぷり吸収し、臭いを軽減します。
※1回の排尿量を150ccとする
- ・オムツからの尿便モレ対策にもお奨めの吸収量です。

+ 少しの移動で楽に敷ける

- ・敷きやすいように折りたたんでいるため、体の移動が困難な方でも少しの移動で楽に敷けます。

+ ズレずにしわになりにくい

- ・十分な長さの巻き込みがあり、ズレずにしわになりにくいので、ベッドやシーツを汚しません。

+ シーツに馴染む白色

- ・シーツや枕の上に敷いても、見た目に違和感の少ない白色バックフィルムを使用しています。


+ 逆戻りが少なく、さらさら長続き

- ・吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。

+ 濡れても破れにくい!


- ・丈夫な表面材を使用しているため、濡れた後も破れにくくなっています。

断面図

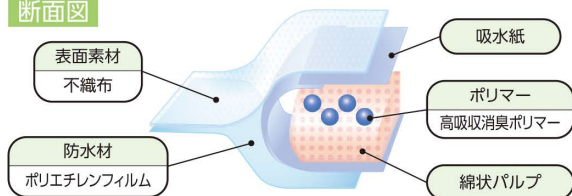


商品情報


■使用方法

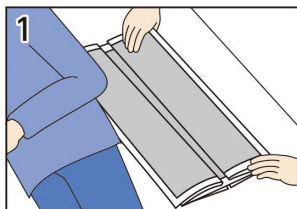

図のようにマットを開き、使用者の横に平行に置きます。

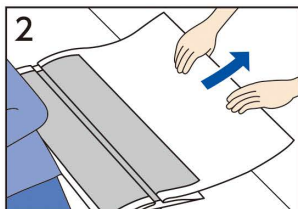

マットの半分を開き、巻き込み部分をマットレスや布団の下に巻き込みます。

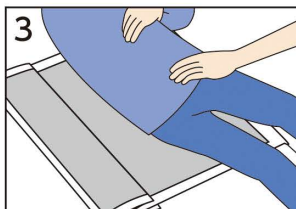


開いたマットの上へ、使用者を横向きに寝かせます。




マットの反対側を開き、巻き込み部分をマットレスや布団の下に巻き込んでください。

■製品仕様

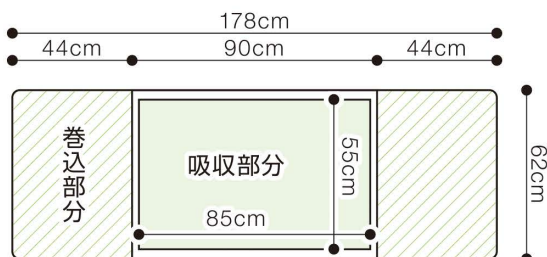

- ・セミシングルベッド、シングルベッド、介護用ベッド(83cm、91cm、100cm幅)に対応

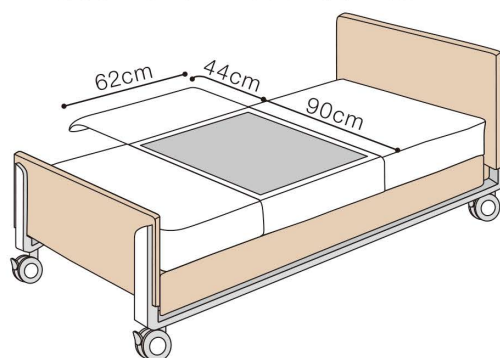

■素材

表面材: ポリプロピレン不織布

吸収材: 高吸収消臭ポリマー、綿状パルプ、吸水紙

防水材: ポリエチレンフィルム

商品規格

■使い捨て高吸収マット 巻込タイプ

| 品番 | 商品名・規格 | サイズ(幅×高さ×奥行(mm)) | 重量 | 梱入数 | POSレジ登録用名称/JANコード | JANコード/ITFコード |
|-------|--|---|------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 84253 | 使い捨て高吸収マット 巻込タイプ 10枚入 62cm×178cm | 販売単位 205 × 325 × 80 外装 456 × 415 × 326 | 893.0g 10.9kg | 10袋 | コウキユウシユウマツト マキ 4 971032 842530 | 4971032842530 14971032842537 |

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki

オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店