



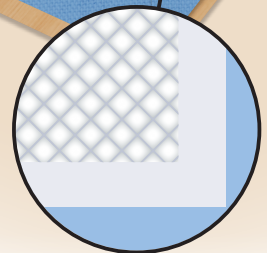

# 使い捨て 高吸収マット

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 使い捨てタイプ  
洗濯の手間がいらぬ
- + 吸収量1100mL  
万一のモレもしっかり吸収
- + 裏面防水シート  
汚れが下にモレない

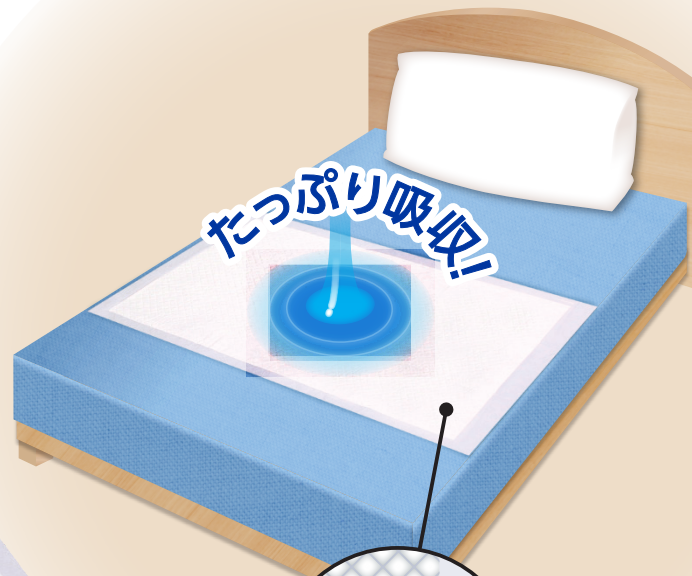

ダイヤ柄に沿って  
素早く拡散・吸収



万一のモレもしっかり吸収する  
洗濯の手間が不要な使い捨てマットです。

# 使い捨て高吸収マット




看護・介護製品

介護ベッド用品


## 商品特長

### + 1.万一のモレもしっかり吸収

- 高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。
- オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。

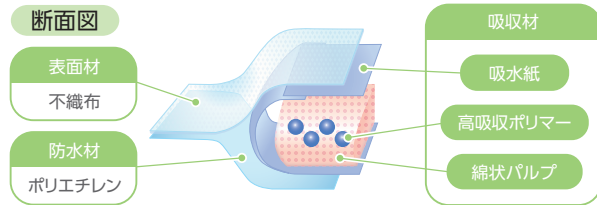

- ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。

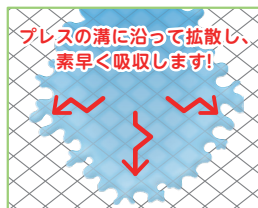

※拡散のイメージ

### + 2.洗濯の手間がいらない

- 使い捨てタイプのため、洗濯の手間がありません。

### + 3.汚れが下にモレない

- 裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。

### + 4.逆戻りが少なく、さらさら長続き


- 吸収後は逆戻りせず、さらとした表面状態を保ちます。

### + 5.ぬれても破れにくい


- 丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。

## 商品情報


### ■使用方法

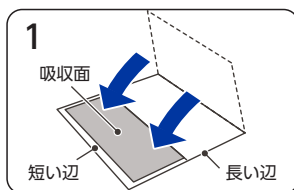

マットを完全に開き、吸収面が内側になるよう、図のように折り直します。

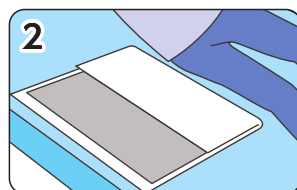

使用者の身体を横向きに寝かせ、お尻がシーツの中心に乗るよう、折り直したマットを敷きます。


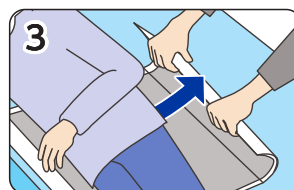


使用者の身体をゆっくり反対側に向け、マットの吸収面が上になるよう引き出します。



引き出したマットを広げ、シワができないようにベッド幅の中央に整えます。

### ■製品仕様

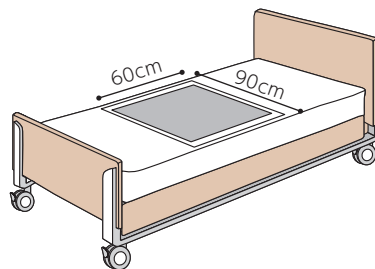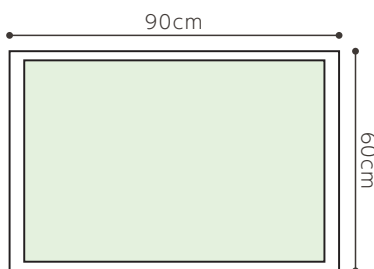

・セミシングルベッド、シングルベッド、介護用ベッド(83cm、91cm、100cm幅)に対応

### ■素材

表面材：不織布  
 吸収材：吸水紙  
 高吸収ポリマー  
 綿状パルプ  
 防水材：ポリエチレン

## 商品規格

### ■使い捨て高吸収マット

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
75150	使い捨て高吸収マット 6090 6枚入 60cm×90cm	販売単位   220 × 205 × 80 外装   490 × 455 × 430	400.0g 10.3kg	24袋	コウキユウシユウ60906 4 971032 751504	4971032751504 14971032751508

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店