

おむつ交換時の汚れを防ぐ 使い捨て介護用エプロン

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 長袖タイプ
衣服が汚れにくい
- + 使い捨て
洗濯の必要なし
- + 透明
自然な印象を与える

普段通りの自然な印象!

透明



「排泄介助」や「入浴介助」に便利な
使い捨て長袖透明エプロンです。



商品特長

+ 1.衣服が汚れにくい

- 長袖のため腕までしっかり覆うことができ、便などからの汚染や感染から介護者を守ります。
- 袖口が汚れにくいゴム袖です。



+ 2.洗濯の必要なし

- 使い捨てタイプのため、洗濯などの手間がありません。
- 着脱が簡単で、そのまま廃棄できるため便利です。

+ 3.自然な印象を与える

- 色が透明なため、普段の服装と変わらない自然な印象で接することができます。

+ 4.汚染や感染に配慮した設計

- エプロンに付着した汚れに触れることなく、清潔・安全に脱ぐことができます。
- ポリエチレン製のため、汚れや細菌を通しません。

+ 5.着やすく動きやすい

- エプロンの端を持つと、簡単に広げることができます(下記、「■着衣方法参照」)。
- 静電気防止剤を使用しているため、エプロンが体にまとわりつきにくいです。


+ 6.取り出しやすいパッケージ

- 箱正面の開封口から、エプロンを1枚ずつ取り出せます。




商品情報


■着衣方法

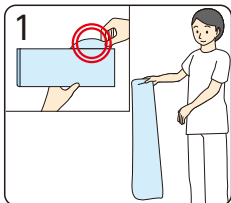

エプロンを取り出し、①の部分を持つと、簡単に広げることができます。

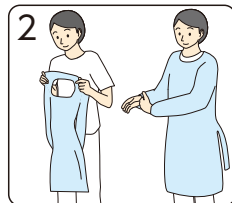

首部を開いて首にかけ、袖を通します。

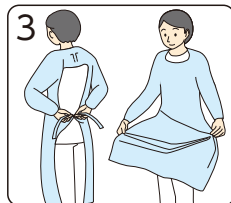

腰紐を後ろで結び、裾を完全に開きます。

■脱衣方法




首紐を後ろで切り、腰紐をほどくか腰紐の付け根を切ります。



汚染部に触れないよう、片腕ずつ引き抜きます。汚染部が内側になるように折りたたみ、廃棄します。

■規格

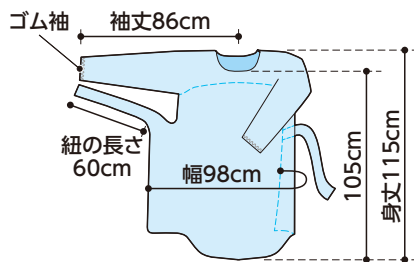

■素材

本体：ポリエチレン

袖口：天然ゴムラテックス(肌に直接触れる部分には不使用)

商品規格

■使い捨て介護用エプロン

| 品番 | 商品名・内容量・規格 | サイズ(幅×高さ×奥行(mm)) | 重量 | 梱入数 | POSレジ登録用名称/JANコード | JANコード/ITFコード | |
|-------|--|------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|
| 73760 | 使い捨て介護用エプロン 袖付 透明 ふつう 5枚入 身丈115cm×幅98cm 袖丈86cm | 販売単位 | 115 × 263 × 50 | 200.0g | 32箱 | カイコ・エフ・フツウ・CS | 4971032737607 |
| | | 外装 | 490 × 260 × 435 | 7.0kg | | 4 971032 737607 | 14971032737604 |

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店