



使い捨て 食事用エプロン フラット

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + ワイド設計
服を汚しにくい
- + 首紐タイプ
首まわりにピッタリフィット
- + 透明タイプ
装着しても目立ちにくい!



目立ちにくく、自然な印象!

透明




目立ちにくく、使用者の羞恥心を軽減!
透明タイプの使い捨て食事用エプロンです。



商品特長

+ 1. 服を汚しにくい防水&ワイド設計

- 防水のため、水気のある食べこぼしでも服を汚しにくいです。
- エプロンの裾幅が広いワイド設計により、エプロンをトレーの下に敷いて固定したり、両端をトレーの下に折り込みポケット状にしたりすることで、より食べこぼしをキャッチできます。

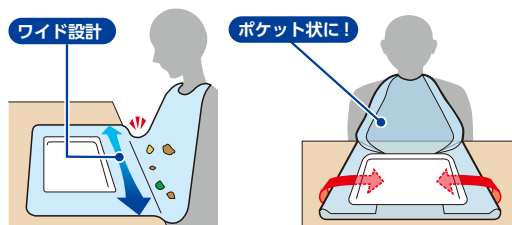

+ 2. 首まわりにぴったりフィット

- 首の太さに合わせて調節できる紐タイプのため、首にぴったりとフィットし、水気のある食べこぼしも首の隙間から伝い流れにくく安心です。

+ 3. 目立ちにくい透明タイプ

- 使用者の羞恥心に配慮した透明タイプで、装着してもエプロンを付けていることが分かりにくく、目立ちません。
- 透明タイプは喉の動きが見えるため、嚥下^{えんげ}の状態を確認することが可能です。

+ 4. 洗濯の手間がいらない

- 使い捨てのため、洗濯の手間がなく、衛生的に使用できます。

+ 5. 取り出しやすいパッケージ


- 開封口が大きく、1枚ずつ取り出しやすくなっています。




1枚ずつ取り出しやすい!

商品情報


■着用方法

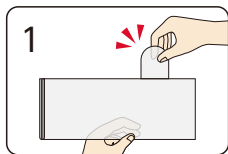


エプロンを取り出し突起の首紐部分を持って広げます。

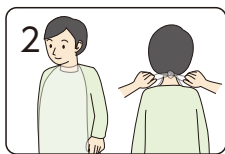

首紐を結んで装着します。
※裏表はありません。

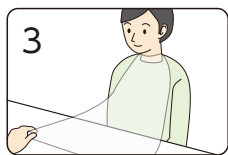


エプロンをテーブルの上に広げて整えます。

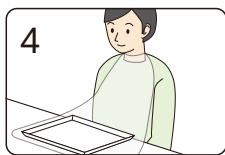

エプロンの上にトレーを置いて固定します。

■規格

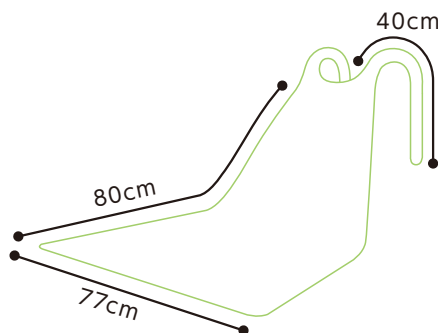

■素材

ポリエチレン

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
73763	使い捨て食食用エプロン フラット 透明 60枚入 幅77cm×丈80cm(首紐を除く)	販売単位 238 × 80 × 115 外装 430 × 258 × 248	570.0g 6.7kg	10箱	シヨクエフ・フラット 60 4 971032 737638	4971032737638 14971032737635

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<http://plus-ph.com>

※規格には誤差が生じる場合があります。



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店