



使い捨て 食事用エプロン

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 防水&ワイド設計
服を汚しにくい
- + 首紐タイプ
首まわりにピタリフィット
- + 透明タイプ
装着しても目立ちにくい!



目立ちにくく、自然な印象!

透明



※写真はポケット付タイプです。

目立ちにくく、使用者の羞恥心を軽減！
透明タイプの使い捨て食事用エプロンです。



商品特長

+ 1.服を汚しにくい防水&ワイド設計

- 防水のため、水気のある食べこぼしでも服を汚しにくいです。
- ワイド設計により、エプロンをトレーの下に敷いて固定することで、より食べこぼしをキャッチできます。

+ 2.首まわりにぴったりフィット

- 首の太さに合わせて調節できる紐タイプのため、首にぴったりとフィットし、水気のある食べこぼしも首の隙間から伝い流れしにくく安心です。

+ 3.目立ちにくい透明タイプ

- 使用者の羞恥心に配慮した透明タイプで、装着してもエプロンを付けていることが分かりにくく、目立ちません。
- 透明タイプで喉の動きが見えるため、嚥下^{えんげ}の状態を確認することが可能です。

+ 4.洗濯の手間がいない

- 使い捨てのため、洗濯の手間がなく、衛生的に使用できます。

+ 5.取り出しやすいパッケージ

- 開封口が大きく、1枚ずつ取り出しやすくなっています。




+ 6.用途で選べる2タイプのエプロン

- ポケット付タイプは“ワイドポケット”と“サイドガード”で特に水気のある食べこぼしに最適です。
- フラットタイプは、裾幅が広いワイド設計でエプロンが大きく広がるため、トレーの下に敷いて広範囲の食べこぼしに最適です。

商品情報

■着用方法


ポケット付

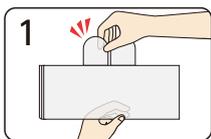

エプロンを取り出し突起の首紐部分を持って広げます。



ポケットがある方を前にして、首紐を結んで装着します。

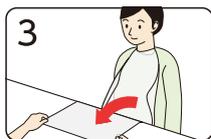

ポケット部を広げて整えます(このままでも使用できます)。




エプロンの裾をトレーの下にはさんで固定します。

■規格

ポケット付




フラット

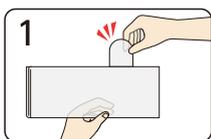


エプロンを取り出し突起の首ひも部分を持って広げます。



首元に紐を結んで装着します。
※裏表はありません。

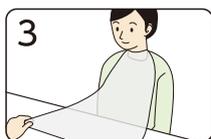

エプロンをテーブルの上に広げて整えます。

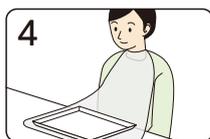

エプロンの上にトレーを置いて固定します。

フラット



商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
73756	使い捨て食事前エプロン ポケット付 透明 9枚入 幅55cm×丈60cm(首紐を除く)	販売単位 145 × 255 × 8	94.5g	10袋 × 8箱	シヨクエフ・ホ・ケ 9 マイ 4 971032 737560	4971032737560
		内装 150 × 230 × 90	1.0kg			24971032737564
		外装 384 × 250 × 315	8.6kg			14971032737567
73740	使い捨て食事前エプロン ポケット付 透明 60枚入 幅55cm×丈60cm(首紐を除く)	販売単位 238 × 90 × 115	680.0g	10箱	シヨクエフ・ホ・ケ 6 マイ 4 971032 737409	4971032737409
		外装 480 × 258 × 248	7.4kg			14971032737406
73763	使い捨て食事前エプロン フラット 透明 60枚入 幅77cm×丈80cm(首紐を除く)	販売単位 238 × 80 × 115	570.0g	10箱	シヨクエフ フラット 6 0 4 971032 737638	4971032737638 14971032737635

■素材: ポリエチレン

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。