

一般医療機器


水に濡れても破れにくい からだふきコットンシート

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- +** 使い捨てタイプ
洗濯の手間がかからない
- +** 医療用不織布
キズやストーマの拭き取りに
- +** コットン100%の厚手シート
水分・体液をしっかり吸収



吸収性がよく水濡れにも強い
コットン100%の使い捨てシートです。

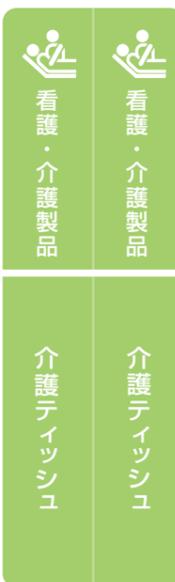


商品特長

- + 1.洗濯不要の使い捨てタイプ**
 - タオルを使った場合の予洗い・漂白・洗濯の手間がなくなる使い捨てタイプです。
 - 血液・滲出液や便が付く場面でも汚れを気にせずストレスフリーに使えるため、患者・介護者さんの負担を軽減します。
- + 2.コットン100%の厚手シート**
 - 接着剤不使用で肌にやさしいコットン100%の不織布シートです。
 - 吸収性に優れているため、ウエットティッシュによる拭き取り後や軟膏塗布前の乾拭にも最適です。
- + 3.水に濡らしても破れにくい**
 - 濡らして引っ張ったり、絞ったりしても、簡単には破れない強度を備えています。
 - 「破れ」や「肌への張り付き」を気にすることなく、ストレスフリーに拭き取れます。
- + 4.操作性に優れた製品仕様**
 - 片手で被介護者の体を支えながらでも使いやすい、たたみ直しが不要な手のひらサイズです。
 - ティッシュのように1枚ずつ片手でさっと取り出せるポップアップ式です。
 - 水が飛んだり、濡れた手でも扱いやすいプラスチック包装です。
- + 5.医療不織布基準をクリア**
 - 在宅療養指導管理料・衛生材料等提供加算算定時の衛生材料支給の対象となる、医療不織布です。



商品情報

■製品仕様

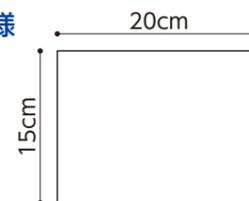

■素材

コットン 100%

- ▲ 水に溶けないため、トイレには流さず適切な廃棄方法で処理してください。
- ▲ 本品は未滅菌品です。滅菌品として使用しないでください。
- ▲ 本品は使い捨てです。繰り返し使用しないでください。

関連商品



おむつ交換時の汚れを防ぐ 使い捨て 介護用エプロン

- 「排泄介助」や「入浴介助」に便利な使い捨て長袖透明エプロンです。
- 長袖のため腕までしっかり覆うことができ、便などからの汚染や感染から介護者を守ります。



使い捨て 高吸収マット

- 万一のモレもしっかり吸収する、洗濯の手間が不要な使い捨てマットです。
- オムツからの尿便モレにも十分な吸収量(1100mL)です。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
72011	PH からだふきコットンシート 120枚入 15cm×20cm	販売単位	150 × 75 × 102	150.0g	12個	4971032720111
		外表	330 × 180 × 330	2.0kg		14971032720118

■販売名:クロスガーゼコットン ■届出番号:23B2X10001000082

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

多くの患者さんが、在宅での洗淨処置後の拭き取りで悩んでいます！



キズの洗淨後は、何を使って拭くのが良いのかわからない



褥 瘡

失禁関連皮膚炎

ストーマ

がん性皮膚潰瘍・瘻孔

難治性皮膚疾患

タオルなどの洗濯が手間



患者・介護者さん

予洗い



漂 白



洗 濯



良い使い捨て商品がない



ティッシュ・トイレトペーパー・キッチンペーパー

肌に張り付く・破れやすい・ゴワゴワ

ウェットティッシュ

もともと濡れているので水分拭き取りに不向き

水分が残っていると、肌トラブルの原因に。

創部に適したものが無い



訪問事業者さん

清潔で肌や創部にやさしいもので拭いてあげたい

訪問先で用意されているものに戸惑うことがある

(すべて当社調べ)

病院で幅広く使われている

不織布ガーゼを在宅でも身近に！

洗淨処置後の拭き取りに求められる仕様を、ギュッと詰め込みました。



■商品特長

洗濯の手間なし



使い捨て

水に濡れても



破れにくい

肌に水分を残しにくい



吸収性が良い

肌にやさしい



コットン100%

片手で取り出せる



ポップアップ式

水回りでの使用にも



水濡れに強い包装

操作性に優れた



手のひらサイズ

片手でも使いやすい！

■使用用途



体・陰部洗淨後の水分の拭き取りに



褥瘡などの創傷洗淨後の水分の拭き取りに



ストーマ交換時の水分の拭き取りに



お湯で濡らして温かい手口・おしりふきに




食事介助時に



口腔ケア時に



カテーテルに巻いてMDRPU予防に

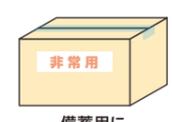

非常用 備蓄用に