



胸部レントゲン 転倒防止ベルト



腰部と臀部をしっかり支える、
転倒防止用補助ベルトです。



商品特長

腰部と臀部をしっかり支える


- 腰部と臀部を2本のベルトで支えるため、立っているのが不安な方でも、安心してレントゲン撮影ができます。

かんたんに装着・取り外しできる

- ワンタッチテープを使用し、機械にも体にも簡単に装着・取り外しができます。

不要時は床に着かず汚染を防ぐ


- 使用しない時はワンタッチテープで留めておけるため、床への付着による汚染を防ぐことができます。

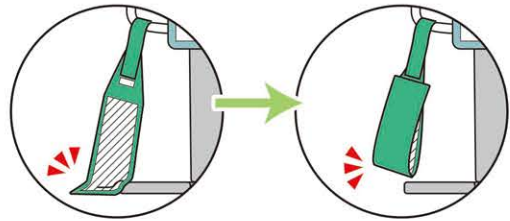

商品情報

製品仕様

製品は、右用と左用が組み合わさった状態を1本とし、1つの個装袋に2本入っています。

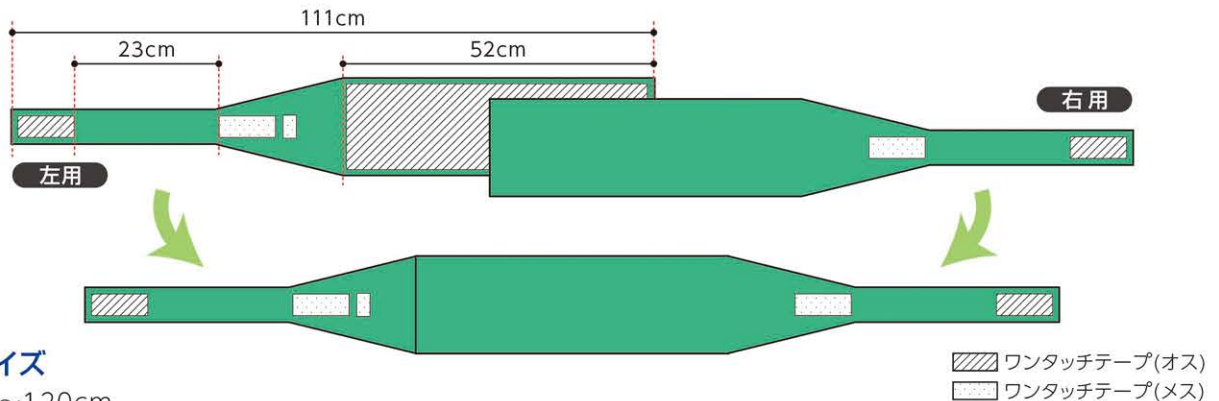

サイズ

胴囲：～120cm

※機械により、対応できる胴囲が異なります。

素材

綿 100%

- ▲短時間の立位の保持に介助が必要な人には使用しないでください。
- ▲ワンタッチテープをしっかりと合わせて使用してください。ズれている状態で使用した場合、強度が十分に得られないことがあります。
- ▲ワンタッチテープは、何度も使用すると強度が弱くなる場合があります。使用前にベルトがしっかりと装着されているか必ず確認してください。
- ▲液温40℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理が可能です。
- ▲ワンタッチテープはとめた状態で洗濯してください。
- ▲洗濯ネットを使用してください。
- ▲濃色の製品は色落ちする恐れがあるため、白物及び淡色の物と分けて洗濯してください。
- ▲アイロン・乾燥機の使用は避けてください。

商品規格

胸部レントゲン 転倒防止ベルト

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
73053	胸部レントゲン 転倒防止ベルト グリーン 2本1組入	販売単位 160×270×45	466.0g	1袋	4971032730530
		外装 —	—		
73060	胸部レントゲン 転倒防止ベルト ブルー 2本1組入	販売単位 160×270×45	466.0g	1袋	4971032730608
		外装 —	—		

受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店