

よく伸びて、ぴったりフィット ミルキーフィットグローブ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + よく伸びて、ぴったりフィット!
介助・清拭に最適
- + 片手でも使用できる!
左右両用で経済的
- + 食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
食品加工にも使用可



よく伸びて、フィット感に富んだ
多目的に使用できる手袋です。



看護・介護製品

介護PPE

商品特長

+ 1.よく伸びて、ぴったりフィット!

- よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など、多目的に使用できる使い捨てビニル手袋です。

+ 2.片手でも使えて経済的!

- 左右両用のため、最後の1枚までムダなく使用できます。

+ 3.肌にやさしい素材

- 天然ゴムやパウダーを使用していないため、ラテックスアレルギーやパウダーアレルギーが心配な方も使用できます。

+ 4.食品衛生法適合(厚生省告示第370号)

- 食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用可能です。

+ 5.2色のカラーバリエーション

- 透明とブルーの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けすることができます。
- 視認性の良いブルーは、万一手袋の破片が混入した時でも発見しやすいため、食事の調理・介助に最適です。

+ 6.豊富なサイズ展開

- S・M・Lの3サイズ展開のため、最適なサイズを選択できます。

+ 7.最後まで取り出しやすいパッケージ

- パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。



商品情報

■着脱方法

着け方



袖口の部分をつかんで装着し、指の付け根に向かって伸ばします。

外し方



1 片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。



2 手袋を裏返すように外します。



3 手袋をつけている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。



4 汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に脱いだ手袋を包み込みます。



5 外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

■バリエーション

種類	サイズ(手のひらの幅×全長)
S	10.2cm×28cm
M	10.5cm×28cm
L	11.5cm×28cm

手のひらの幅



■素材

熱可塑性エラストマー、ポリエチレン
※ラテックスフリー

(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

商品規格

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
○	70204	ミルキーフィットグローブ Sサイズ 透明 200枚入 手のひらの幅10.2cm×28cm	販売単位 200 × 55 × 130	410.0g	20箱	ミルキーフィット S C I	4971032702049
			外装 420 × 285 × 295	9.1kg		4 971032 702049	14971032702046
	70205	ミルキーフィットグローブ Mサイズ 透明 200枚入 手のひらの幅10.5cm×28cm	販売単位 200 × 55 × 130	450.0g	20箱	ミルキーフィット M C I	4971032702056
●	70206	ミルキーフィットグローブ Lサイズ 透明 200枚入 手のひらの幅11.5cm×28cm	販売単位 200 × 55 × 130	490.0g	20箱	ミルキーフィット L C I	4971032702063
			外装 420 × 285 × 295	10.9kg		4 971032 702063	14971032702060
	70208	ミルキーフィットグローブ Sサイズ ブルー 200枚入 手のひらの幅10.2cm×28cm	販売単位 200 × 55 × 130	410.0g	20箱	ミルキーフィット S B I	4971032702087
			外装 420 × 285 × 295	9.1kg		4 971032 702087	14971032702084
	70209	ミルキーフィットグローブ Mサイズ ブルー 200枚入 手のひらの幅10.5cm×28cm	販売単位 200 × 55 × 130	450.0g	20箱	ミルキーフィット M B I	4971032702094
			外装 420 × 285 × 295	9.6kg		4 971032 702094	14971032702091
70210	ミルキーフィットグローブ Lサイズ ブルー 200枚入 手のひらの幅11.5cm×28cm	販売単位 200 × 55 × 130	490.0g	20箱	ミルキーフィット L B I	4971032702100	
		外装 420 × 285 × 295	10.9kg		4 971032 702100	14971032702107	

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。