



ディスポーザブルグローブ

# ハイブリッドグローブ



“オオサキ PPEホルダーソフト 2509S”に  
ぴったりと収まります。



プラスチック手袋にニトリル成分を配合。  
フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。



## 商品特長

### 1 ニトリル手袋と同等の操作性!

- プラスチック手袋にニトリル成分を配合することで、指先にフィットし、ニトリル手袋と同等の操作が行えます。<sup>※1</sup>
- 滑り止め加工を施しているため、より操作性に優れます。

### 2 アレルギーリスクに配慮

- ラテックスやパウダー、加硫促進剤<sup>※2</sup>を使用していないため、アレルギーが心配な方も使用できます。

### 3 2色のカラーバリエーション

- ブルーとピンクの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けることができます。



滑り止め加工



※1:当社"オオサキニトリルグローブ"と比較  
 ※2:加硫促進剤とは、検査用手袋の製造工程内で使用される化学物質です。

## 商品情報

### ■着脱方法

着け方




手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方



片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。

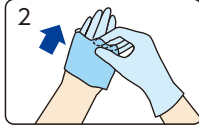

手袋を裏返すように外します。



手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に脱いだ手袋を包み込みます。



外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

### ■サイズガイド

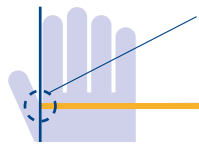


- 1.人差し指の付け根を合わせます。
- 2.手の甲の右端が破線縦ラインに合ったサイズが目安になります。

SS S M L

### ■バリエーション

種類	サイズ(手のひらの幅×全長)
SS	7.5cm×24cm
S	8.5cm×24cm
M	9.5cm×24cm
L	10.5cm×24cm

手のひらの幅

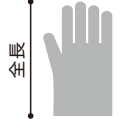

### ■素材

塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)  
 ※ラテックスフリー(天然ゴム由来のたんぱく質を含みません)

⚠食品の加工には使用しないでください。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
70020	オオサキ ハイブリッドグローブ ブルー SS 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	875.0g	10箱	4971032700205 14971032700202
		外装	455 × 265 × 275	9.2kg		
70014	オオサキ ハイブリッドグローブ ブルー S 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	975.0g	10箱	4971032700144 14971032700141
		外装	455 × 265 × 275	10.2kg		
70015	オオサキ ハイブリッドグローブ ブルー M 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	1.1kg	10箱	4971032700151 14971032700158
		外装	455 × 265 × 275	11.2kg		
70016	オオサキ ハイブリッドグローブ ブルー L 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	1.2kg	10箱	4971032700168 14971032700165
		外装	455 × 265 × 275	12.2kg		
70021	オオサキ ハイブリッドグローブ ピンク SS 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	875.0g	10箱	4971032700212 14971032700219
		外装	455 × 265 × 275	9.2kg		
70017	オオサキ ハイブリッドグローブ ピンク S 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	975.0g	10箱	4971032700175 14971032700172
		外装	455 × 265 × 275	10.2kg		
70018	オオサキ ハイブリッドグローブ ピンク M 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	1.1kg	10箱	4971032700182 14971032700189
		外装	455 × 265 × 275	11.2kg		
70019	オオサキ ハイブリッドグローブ ピンク L 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位	245 × 85 × 128	1.2kg	10箱	4971032700199 14971032700196
		外装	455 × 265 × 275	12.2kg		

◇商品はすべてオープン価格です。

  
**オオサキメディカル株式会社**  
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
 オフイシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。