



ディスポーザブルグローブ

# ニトリルグローブ

ホワイト



ブルー



オオサキPPEホルダーソフトに  
ぴったりと収まります。

伸縮性が高くフィット感に富んだ  
パウダーフリータイプのニトリル手袋です。



## 商品特長

### 1 フィット感に富んだ伸縮性

- 伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。

### 2 ラテックスフリー

- 材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。

### 3 カラーバリエーション

- ホワイトとブルーの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けすることができます。

### 4 作業性に優れた滑り止め加工

- 滑り止め加工を施しているため、作業性に優れています。

### 5 サイズを識別しやすいパッケージ


- ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。

⚠食品の加工には使用しないでください。

## 商品情報

### ■着脱方法

着け方

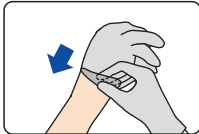


袖口の部分をつかんで装着してください。


外し方




1 片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。

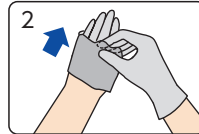

2 手袋が裏表逆になるように外します。

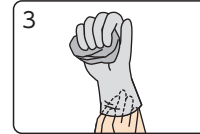

3 外した手袋をにぎり、手袋をはずした手を反対の手袋の袖口に差し込みます。

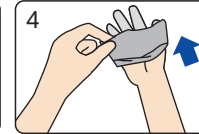


4 手袋が裏表逆になるように外します。



5 外した手袋は2枚ひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

### ■サイズガイド

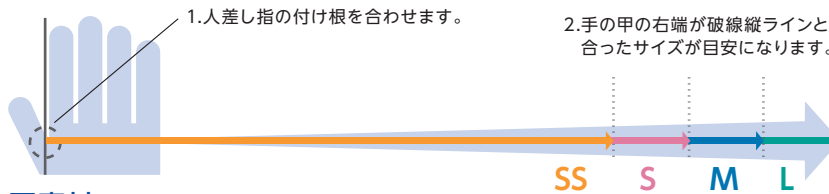

### ■バリエーション

種類	サイズ(全長×手のひらの幅)
SS	24cm× 7.5cm
S	24cm× 8.5cm
M	24cm× 9.5cm
L	24cm×10.5cm

### ■素材

合成ゴム(ニトリルゴム)

※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

## 商品規格

### ■オオサキ ニトリルグローブ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
70103	オオサキ ニトリルグローブ SS ホワイト 200枚入 全長24cm×手のひらの幅7.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	645.0g	10箱	4971032701035 14971032701032
		外装   420 × 265 × 270	7.0kg		
70104	オオサキ ニトリルグローブ S ホワイト 200枚入 全長24cm×手のひらの幅8.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	735.0g	10箱	4971032701042 14971032701049
		外装   420 × 265 × 270	8.0kg		
70105	オオサキ ニトリルグローブ M ホワイト 200枚入 全長24cm×手のひらの幅9.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	775.0g	10箱	4971032701059 14971032701056
		外装   420 × 265 × 270	8.4kg		
70106	オオサキ ニトリルグローブ L ホワイト 200枚入 全長24cm×手のひらの幅10.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	875.0g	10箱	4971032701066 14971032701063
		外装   420 × 265 × 270	9.4kg		
70111	オオサキ ニトリルグローブ SS ブルー 200枚入 全長24cm×手のひらの幅7.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	645.0g	10箱	4971032701110 14971032701117
		外装   420 × 265 × 270	7.0kg		
70112	オオサキ ニトリルグローブ S ブルー 200枚入 全長24cm×手のひらの幅8.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	735.0g	10箱	4971032701127 14971032701124
		外装   420 × 265 × 270	8.0kg		
70113	オオサキ ニトリルグローブ M ブルー 200枚入 全長24cm×手のひらの幅9.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	775.0g	10箱	4971032701134 14971032701131
		外装   420 × 265 × 270	8.4kg		
70114	オオサキ ニトリルグローブ L ブルー 200枚入 全長24cm×手のひらの幅10.5cm	販売単位   245 × 80 × 128	875.0g	10箱	4971032701141 14971032701148
		外装   420 × 265 × 270	9.4kg		

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221

ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店