

一般医療機器

検査・検診用手袋



看護・介護製品

PPE

# ハイブリッドグローブI



“オオサキ PPEホルダーソフト 2509S”に  
ぴったりと収まります。



プラスチック手袋にニトリル成分を配合。  
フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。

# オオサキ ハイブリッドグローブI



看護・介護製品

PPE

## 商品特長

### 1 ニトリル手袋と同等の操作性!

- プラスチック手袋にニトリル成分を配合することで、指先にフィットし、ニトリル手袋と同等の操作が行えます。<sup>※1</sup>

### 2 アレルギーリスクに配慮

- ラテックスやパウダー、加硫促進剤<sup>※2</sup>を使用していないため、アレルギーが心配な方も使用できます。

### 3 2色のカラーバリエーション

- ブルーとピンクの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けることができます。



※1:当社"オオサキニトリルグローブ"と比較

※2:加硫促進剤とは、検査用手袋の製造工程内で使用される化学物質です。

## 商品情報

### ■着脱方法

着け方




手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方



片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。

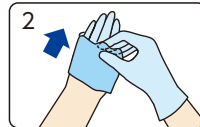

手袋を裏返すように外します。



手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に外した手袋を包み込みます。



外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

### ■サイズガイド

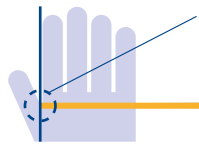

1.人差し指の付け根を合わせます。


2.手の甲の右端が破線縦ラインに合ったサイズが目安になります。

SS S M L

### ■バリエーション

種類	サイズ(手のひらの幅×全長)
SS	7.5cm×24cm
S	8.5cm×24cm
M	9.5cm×24cm
L	10.5cm×24cm

手のひらの幅

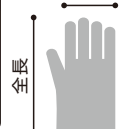

### ■素材

塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)

※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

⚠ 食品の加工には使用しないでください。

## 商品規格

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋:70976000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
70022	オオサキ ハイブリッドグローブI ブルー SS 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	875.0g	10箱	4971032700229 14971032700226
		外装   455 × 265 × 275	9.2kg		
70023	オオサキ ハイブリッドグローブI ブルー S 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	975.0g	10箱	4971032700236 14971032700233
		外装   455 × 265 × 275	10.2kg		
70024	オオサキ ハイブリッドグローブI ブルー M 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	1.1kg	10箱	4971032700243 14971032700240
		外装   455 × 265 × 275	11.2kg		
70025	オオサキ ハイブリッドグローブI ブルー L 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	1.2kg	10箱	4971032700250 14971032700257
		外装   455 × 265 × 275	12.2kg		
70026	オオサキ ハイブリッドグローブI ピンク SS 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	875.0g	10箱	4971032700267 14971032700264
		外装   455 × 265 × 275	9.2kg		
70027	オオサキ ハイブリッドグローブI ピンク S 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	975.0g	10箱	4971032700274 14971032700271
		外装   455 × 265 × 275	10.2kg		
70028	オオサキ ハイブリッドグローブI ピンク M 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	1.1kg	10箱	4971032700281 14971032700288
		外装   455 × 265 × 275	11.2kg		
70029	オオサキ ハイブリッドグローブI ピンク L 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位   245 × 85 × 128	1.2kg	10箱	4971032700298 14971032700295
		外装   455 × 265 × 275	12.2kg		

■販売名:オオサキハイブリッドグローブHB1 ■届出番号:23B2X10001000101

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。