



看護・介護用手袋

あんしん手袋



自傷行為や自己抜去から身体を守る
看護・介護用手袋です。



商品特長

簡単装着で外しにくい

- ワンタッチテープでとめるだけで、簡単に装着できます。装着後はベルト部が隠れて直接触れないため、装着者本人では外しにくくなっています。

手首の太さに合わせて無段階に調節可能

- 手首部にワンタッチテープ付の固定ベルトを使用しているため、無段階に調節ができ、装着時に外れにくくなっています。また幅広のベルトで、手首にくい込みにくくなっています。

物をつかむことを防止する中板入り


- 中板が入っているため、物がつかみにくく、カテーテルなどの自己抜去を防止します。

血行状態を確認できる窓付き

- 通気性のよいメッシュ素材の窓から、手指の血行状態を確認できます。

反転防止ライン入り

- 手が裏返って物をつかむことを防止する反転防止ライン入り。

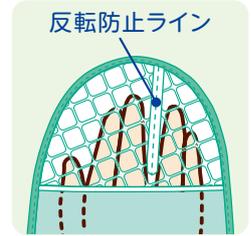


商品情報


■装着方法




あんしん手袋本体に記載されている左右を確認します。

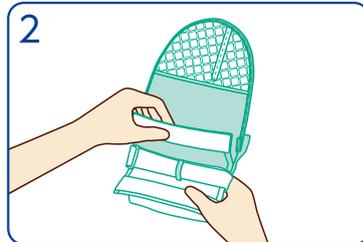

ワンタッチテープを外して、緑色の生地を裏返します。

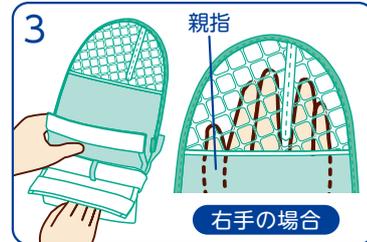


手を白い生地の間に入れます。中板が入っている方が手のひら側です。※メッシュ部から見える指の位置が図のようになっているか確認してください。

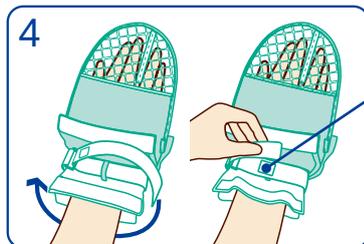

固定ベルトで手首を適度に締め、ワンタッチテープで固定します。※締めすぎないように注意！



緑色の生地を戻し、ワンタッチテープでとめます。※ワンタッチテープはできるだけ揃えてとめてください。

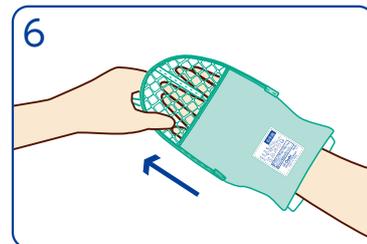

あんしん手袋をやや強めに引っ張り、きちんと装着されているか確認してください。もう片方の手も同様に装着してください。

商品規格

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
74501	あんしん手袋 1双入 フリーサイズ	販売単位 160×300×28	200.0g	50個	4971032745015
		外装 825×320×330			

■素材: [表生地]綿 [裏生地]ポリエステル [メッシュ部、ベルト部]ナイロン [中板]ポリプロピレン、ポリエチレン

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店