

医療用マスク

フィット&ガードマスク



ディスポーザブルタイプの
不織布製マスクです。



コンシューマ製品

一般衛生用品

商品特長

1 高性能ろ過フィルタ

(防塵メルトブロー不織布)

- 高性能フィルタでウイルス飛沫の侵入をガードします。
- 「JIS T9001」クラスIIに適合しています。

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスII 規格適合番号 M22309003						
適合番号発行元: JHPiA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

2 ノーズフィッターでぴったりフィット

- ノーズフィッターが顔にぴったりフィットするため、鼻まわりの隙間を作りにくくなっています。


3 立体プリーツ加工

- 立体プリーツ加工でアゴまでしっかりガードします。

商品情報

■使用方法

着け方

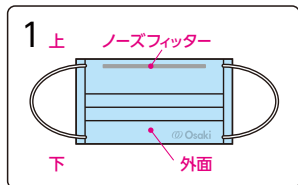

ノーズフィッターを上にして、ヒダが下向きになるように装着します。ゴム紐の付け位置は外面です。




耳にゴム紐を掛け、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。



ノーズフィッターを押さえたままプリーツを広げます。

外し方

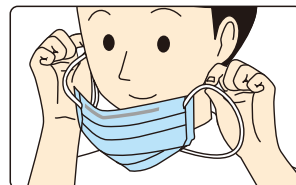

マスク外面を触らないようにゴム紐を持って取り外します。

■全国マスク工業会 正会員マーク

全国マスク工業会の定める「マスクの表示・広告自主基準」ならびに「衛生マスクの安全・衛生自主基準」を遵守し生産された商品に表示できるマークです。



■素材

本体・フィルタ: ポリプロピレン

ノーズフィッター: 鉄、ポリエチレン

耳紐: ポリエステル、ポリウレタン

※天然ゴム不使用(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
05007	CN フィット&ガードマスク ふつう ホワイト 5枚入 17.5cm×9.5cm	販売単位	120 × 235 × 10		17.0g	10袋 × 40箱	フィットマスクフック 5マイ	4971032050072
		内装	125 × 235 × 100		250.0g			24971032050076
		外表	520 × 490 × 520		11.0kg		4 971032 050072	14971032050079

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オンラインサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。