

鏡視下手術用滅菌ワイパー

極細繊維がレンズの汚れを素早く除去
滅菌スコープワイパー X



極細繊維で、硬性鏡や軟性鏡のレンズの汚れを
素早く除去できるワイパーです。



商品特長

1 しっかり除去

- 硬性鏡や軟性鏡先端に付着して視界を妨げる水滴のみならず、脂肪滴や蛋白などの頑固な汚れまでもストレスなく除去できます。

2 リントフリー性

- 長繊維不織布を使用し、レンズ表面への脱落繊維の付着がほとんどありません。

3 X線造影糸入り

- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。
- セルロース100%の不織布を使用しているため、溶出などはありません。


△ぬれていると、汚れ除去効果が発揮できませんので、必ずぬらさずに乾燥した状態で使用してください。

商品情報

繊維の比較



コットン繊維

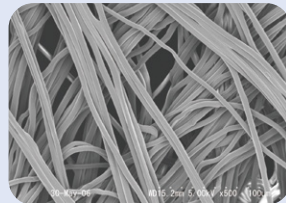


極細繊維 (スコープワイパー X)

レンズ表面の比較




拭き取り前

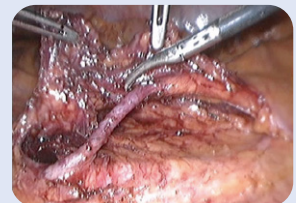


拭き取り後


■使用方法(例)

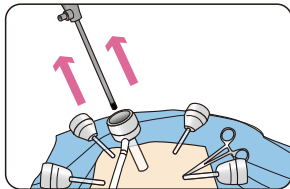


1.トロッカーよりカメラを取り出します。

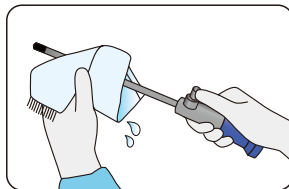

2.取り出したカメラに付着している血液やタンパク質を除去するために、生理食塩水を吸収させた滅菌ガーゼで、カメラ全体の汚れを拭きとります。

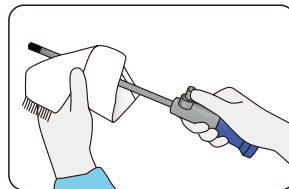

3.カメラに付いた水分を乾いた滅菌ガーゼでしっかり拭き取ります。この時カメラが水分でぬれていると、滅菌スコープワイパーXの汚れ除去効果が発揮できませんので、必ず水分をしっかり拭き取ってください。

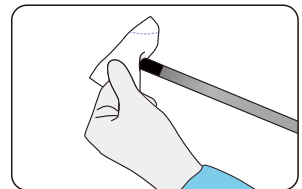

4.カメラ先端部の表面に付着した脂分を拭き取るため、滅菌スコープワイパーXで、“キュッキュッ”と音がなるくらい強くこすり、汚れを除去します。

関連商品



一般医療機器 X線造影材入リスポンジ:13705000

TroX[®] トロックス

■販売名:滅菌縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000024

- ストレスのない操作性を実現した、X線造影糸入 鏡視下手術用滅菌ガーゼです。
- トロッカーからワンプッシュで挿入することができます。
- 血管周囲及び神経繊維組織の剥離をする際に有効です。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
23704	滅菌スコープワイパー X 1枚入 (50袋) 100mm×100mm 4ply	販売単位 130 × 158 × 66	241.1g	12箱	4971032237046
		外装 421 × 175 × 275	2.9kg		14971032237043

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル
オオサキウェブサイト

取扱店