

一般医療機器

X線造影材入りガーゼ

滅菌OPカウントガーゼX 黒線



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

数えることなくひと目でガーゼカウントができる
滅菌済 手術用ガーゼです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

商品特長

1 ひと目でカウント

- 手術用ガーゼをサイコロの5の目のように配置することで、枚数を数えることなくひと目でガーゼの過不足が確認できます。

2 素早く簡単にさばける

- 手術用ガーゼから台紙(タイベック®)を外すだけでさばいたガーゼが完成します。

デュポン™タイベック®の特長

優れた引裂き強度と突刺し強度

- 「タイベック®」は米国デュポン社製の高密度ポリエチレン100%を使用した、強靱で耐久性のある不織布です。
- 頑丈な連続性極細繊維がタイベックの切れ落ちなどを防ぎます。

3 1枚あたりの重量が一定

- ガーゼ1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3.3g)が一定で、出血量の測定に適しています。

4 X線造影糸入り

- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。

5 豊富なバリエーションで経済的

- 手術症例に合わせて、適切な入数が選べ経済的に使用できます。



10枚入



20枚入



30枚入

商品情報

■使用方法

手術開始前カウントからさばくまでの手順

- ▲台紙(タイベック®)はレントゲン撮影では写りません。紛失をしないよう保管、又は廃棄してください。
- ▲台紙を装着したまま使用しないでください。

① カウント	② 広げる	③ 台紙を外す	④ 伸ばす
<p>5枚あることを目視で確認します。</p>	<p>折りたたまれているガーゼを伸ばします。 ※台紙(タイベック®)を持ち上げ、上下に振れば簡単に広がります。</p>	<p>5枚まとめてガーゼを握り、台紙(タイベック®)を外します。</p>	<p>台紙(タイベック®)挿入部のガーゼの折れを伸ばします。 ※台紙(タイベック®)から外したガーゼを振ると伸ばしやすいです。</p>

※画像は「カウントガーゼ青線」です。

商品規格

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ:32374000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
12638	滅菌OPカウントガーゼX 黒線 S-10 10枚入(10袋) 30cm×30cm	販売単位 210×220×220	550.0g	4箱	4971032126388
		外装 460×250×445	3.0kg		
12655	滅菌OPカウントガーゼX 黒線 S-20 20枚入(15袋) 30cm×30cm	販売単位 400×295×205	—	2箱	4971032126555
		外装 420×308×410	—		
12656	滅菌OPカウントガーゼX 黒線 S-30 30枚入(10袋) 30cm×30cm	販売単位 400×295×205	—	2箱	4971032126562
		外装 420×308×410	—		

- 販売名:滅菌OPガーゼX-KS ■届出番号:23B2X10001000066
- 素材:[ガーゼ]綿 [X線造影糸(固定材)]ポリスチレン系熱可塑性エラストマー(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)カーボンブラック
- その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。

- ▲X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に遺残する恐れがあるため、X線造影糸以外のガーゼ部分を挟んでください。
- ▲X線造影糸に電気メスなどを近付けると、切れたり、発火する恐れがあるため注意してください。

オオサキメディカル株式会社

 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812

<https://www.osakimedical.co.jp/>



取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。