


一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

滅菌 パテスポンX

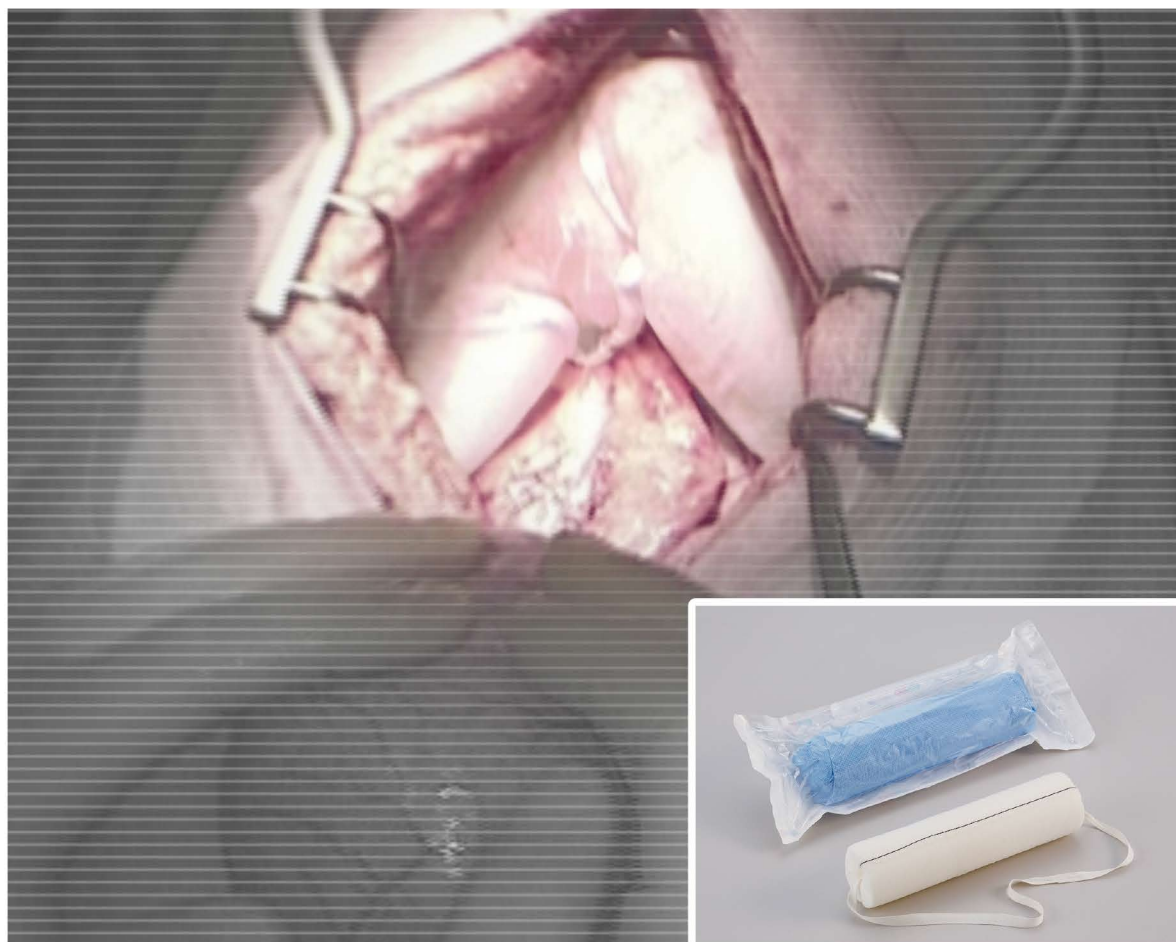

ガーゼ製品

ラップスポンジ



手術時に邪魔となる目的外臓器を圧排し、術野を確保する臓器圧排用スポンジです。



ガーゼ製品

ラップスポンジ



商品特長

効果的な圧排が可能

- 弾力性のあるスポンジが、目的外臓器を効果的に圧排し、術野を確保します。
- やわらかいスポンジ素材のため、臓器を傷つけません。

ガーゼ被覆でずれにくい

- 表面をガーゼで被覆しているため、臓器に対してズレにくく、また、鑷子や鉗子などで挟んでも、スポンジがちぎれることはありません。

豊富なバリエーション

- 圧排対象臓器や、患者の体型に合わせて、4サイズから選べます。

高い安全性

安全性試験をクリア

- 素材は、生物学的安全性試験(ISO10993)に適合しています。

X線造影系入り

- 万一、体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。

清潔に扱える


- 滅菌ラップ(青色)で包んであるため、清潔に取り扱うことができます。

商品情報

■使用方法

1. 滅菌袋を開封し、滅菌ラップに包まれた本品を取り出します。清潔野で滅菌ラップを展開して本品を取り出します。
2. 本品に**滅菌済み生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態となるよう**に軽くしぼります。
3. 適宜、目的外臓器を圧排します。
4. 使用後は本品を確実に取り出し、遺残防止のためX線撮影により、体内に本品が残されていないことを確認してから閉腹します。

■製品仕様

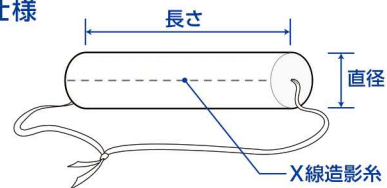

※製品は滅菌ラップ(青色)に包まれています。

規格一覧表

| サイズ | 直径(cm) | 長さ(cm) | 重量(g) |
|-----|--------|--------|-------|
| L | 8 | 30 | 約44 |
| M | 8 | 22 | 約33 |
| S | 8 | 13 | 約20 |
| SS | 6 | 10 | 約10 |

商品規格

■滅菌パテスポンX

一般医療機器 X線造影材入リスポンジ: 13705000

| 品番 | 商品名・規格 | サイズ(幅×高さ×奥行(mm)) | 重量 | 挿入数 | JANコード |
|-------|--|------------------------|---------|-----|---------------|
| 50414 | 滅菌パテスポンX AS-L 1本入(10袋) 直径8cm 長さ30cm | 販売単位 505 × 275 × 316 | 1282.0g | — | 4971032504148 |
| 50415 | 滅菌パテスポンX AS-M 1本入(10袋) 直径8cm 長さ22cm | 販売単位 505 × 275 × 316 | 1158.0g | — | 4971032504155 |
| 50416 | 滅菌パテスポンX AS-S 1本入(10袋) 直径8cm 長さ13cm | 販売単位 312 × 415 × 265 | 844.0g | — | 4971032504162 |
| 50417 | 滅菌パテスポンX AS-SS 1本入(10袋) 直径6cm 長さ10cm | 販売単位 395 × 200 × 290 | 625.0g | — | 4971032504179 |

■販売名: 滅菌オオサキX線造影材入リスポンジX-KS ■届出番号: 23B2X10001000079

■素材: [本体] ポリウレタン、綿 [X線造影系] (固定材) ポリスチレン系熱可塑性エラストマー (造影剤) 硫酸バリウム (着色剤) カーボンブラック [紐] 綿

◇商品はすべてオープン価格です。

▲必ず滅菌済み生理食塩水を含ませた状態で使用してください。

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052) 501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店