



サージカルパッド

滅菌サラフィット



創傷部からの剥離性に優れた、
高吸収タイプのサージカルパッドです。

商品特長

- 交換時の剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。
- 交換時に創傷部を傷つけません。
- バインダーを使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを貼り合わせました。

使用方法

1. 創傷部を消毒した後、滅菌バックからサラフィットを取り出し、創傷部に当ててください。
2. 医療テープや包帯等で固定してください。

商品規格

■ 滅菌サラフィット



品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
20901	滅菌サラフィット S1515-40 15cm×15cm 40枚入	販売単位 —	—	—	4971032209012
		外装 —	—		—
20903	滅菌サラフィット S1530-20 15cm×30cm 20枚入	販売単位 —	—	30袋	4971032209036
		外装 440 × 410 × 315	—		—
20902	滅菌サラフィット S3030-10 30cm×30cm 10枚入	販売単位 —	—	30袋	4971032209029
		外装 440 × 410 × 315	—		—
20900	滅菌サラフィット S3060-5 30cm×60cm 5枚入	販売単位 —	—	30袋	4971032209005
		外装 440 × 410 × 315	—		—
20904	滅菌サラフィット S6060-3 60cm×60cm 3枚入	販売単位 —	—	30袋	4971032209043
		外装 605 × 475 × 350	—		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店