

産前～産後まで、骨盤をしっかりサポート

マタニティ骨盤ベルト

産前産後の キュッとベルト®

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

くい込みにくい
&
ズレにくい

産前～産後まで
これ1本

帝王切開術後
もオススメ



商品情報

■使用用途

妊娠・出産によりゆるんだ骨盤を出産後に骨盤が元に戻るまで、歪まないように固定して支える。

△本品は、妊娠・出産による骨盤のゆるみをサポートするために骨盤を固定するものです。腰痛等の疾病を治したり、産後の痩身を促すものではありません。

■着用期間の目安

妊娠中～出産後(出産直後～3カ月頃まで)


※妊娠・出産による、骨盤のゆるみや回復には個人差があります。
上記期間は骨盤がゆるんでいる期間の目安で、それ以降も続けて着用可能です。

■正しい着用位置

右図にある、「上前腸骨棘」という部位よりも下を、地面と平行に締めてください。この部位よりも上を締めてしまうと、骨盤の下側が開いてしまったり、妊娠中は胎児を締めちゃう可能性があるため、助産師の指導のもとで着用位置をよく確認して着けてください。



■着用方法

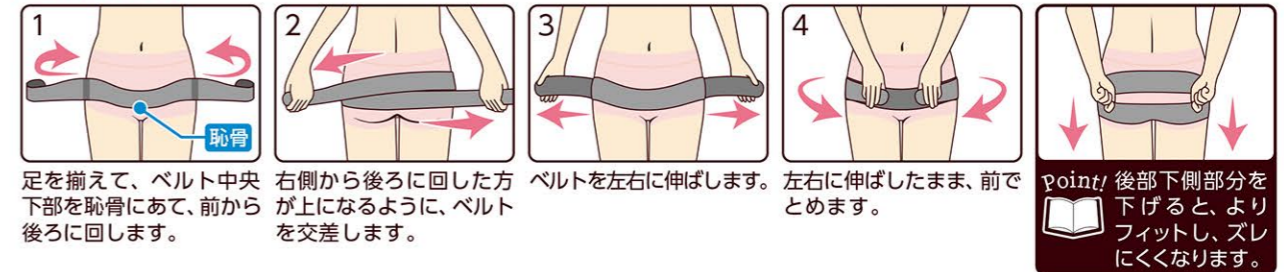

■素材

ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アセテート
※天然ゴム不使用(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

■パッケージ形状

店頭販売する際は、ヘッダーを起こして吊り下げ陳列が可能です。



商品規格

商品写真 品番	商品名・規格	サイズ 幅×高さ×奥行(mm)	重量	梱入数	POSレジ登録用品名略称 JANコード	JANコード/ITFコード
60813	産前産後のキュッとベルト フリー ブラック 1枚入 ヒップ87cm～105cm	販売単位	120×220×45	107.0g	20箱	サンセイ・サンコー・キコッ 4 971032 608136
		外表	496×251×266	2.7kg		

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ/ <http://dacco-web.com> E-mail/ support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

従来の骨盤ベルトの悩み、解決します!

ママたちの悩み

おなかにくい込み苦しい
お尻の位置に着けるから
すぐにズレてしまう

① くい込みにくく、ズレにくい!

- 妊娠中や出産直後の大きなおなかに沿う「前面カーブ」でくい込みにくくなっています。
 - ベルトが細幅で脚の付け根を締めつけにくいので、動きやすく快適です。また、滑り止め付きでズレにくくなっています。
- ※ 着用感は、体型により個人差があります。

産前～産後まで
ずっと使えるサイズの
ベルトがない

② サイズを気にしないフリーサイズ

- 全面がワンタッチテープでとまる素材のため、フリーサイズで産前～産後までこれ1本でサイズを気にせず着用できます。また、プレゼントにもオススメです。
- 病産院内等でもサイズ毎の在庫管理やサイズ選びが不要のため便利です。

トイレや着替え時に
着脱が面倒

③ かんたん着脱


- トイレや着替え時もワンタッチテープでとめるだけで簡単に着脱できます。
- 間違えやすい着用位置も、位置合わせタグが付いているため、わかりやすくなっています。



厚手でアウターに
響いてオシャレじゃない

④ 薄手でオシャレも楽しめる!

- 厚みが当社従来品と比較して約46%も薄く、アウターに響きにくいので、オシャレを楽しめます。
- メッシュ素材で、ムレにくく快適です。

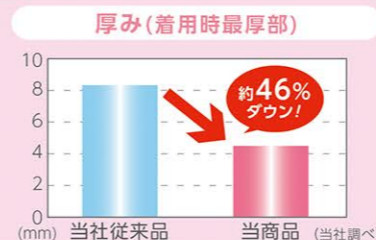

帝王切開の傷が
痛くて着けられない


⑤ 帝王切開術後もオススメ!

- おなかに沿う「前面カーブ」と柔らかく薄い素材が、傷にくい込みにくいので、帝王切開術後も着用しやすくなっています。



※ 術後の状態により着用できない場合もあるため、産婦人科医に相談してから、傷や体の回復を最優先して無理のないように着用してください。
※ 着用感は、傷の位置や大きさ、体型等により個人差があります。

病産院での帝王切開術後の骨盤ベルト着用指導状況

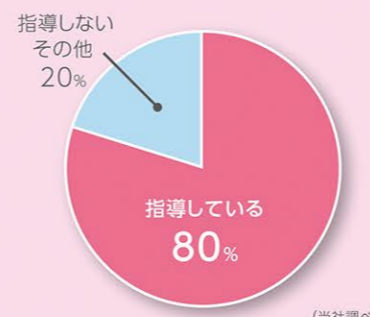

試用していただいたママの声



妊娠中の大きなおなかでしゃがんでも、邪魔にならなくて良かったです。産後も着けたいと思いました。
妊婦ママ(妊娠9ヶ月)

おなか部分のカーブで、帝王切開の傷にくい込みにくく、着けていても痛くありません。脚の付け根部分もカーブしていて、座った時にベルトが脚に当たらず良かったです。
帝王切開術後ママ

生地がしっかりしていて、締め具合がよくて長持ちしそうですね。ズレ止めテープが付いているので、ズレにくくて良いです。
助産師さん(2児のママ)



細い分、脚の付け根を締めつけないので動きやすく、集中して骨盤に圧がかかって良いです。前部の形状が、骨盤を締めたい位置に合っていて良いです。
理学療法士さん(2児のママ)

(当社調べ)

ママへのアフターフォローもバッチリ!

パッケージのQRコード、または直接daccoのホームページにアクセスしていただくと、着用方法や骨盤ケアに関する多くの情報を、いつでもどこでも見ることができます。

<http://dacco-web.com/bakyuttobelt.html>

