

乳房が張りすぎて痛い時などに
貼るだけでひんやり

胸冷却シート

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

胸にぴったり
フィット



授乳中の
ママに合った
冷却効果

デリケートな
肌にもやさしい



使用調査結果

■対象：胸に熱をもった産後ママ

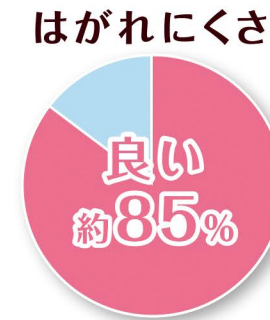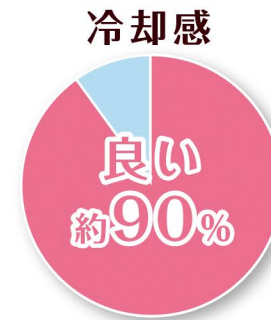

使用していただいた助産師さんとママの声



乳房を冷やしすぎないようにしたいため、この冷却感はちょうど良い。

使用しやすい。貼りやすい。厚さも適当。




胸に貼りやすい形で使いやすい。

適度な冷え感でフィット感もある。

(当社調べ)

商品情報

■製品仕様

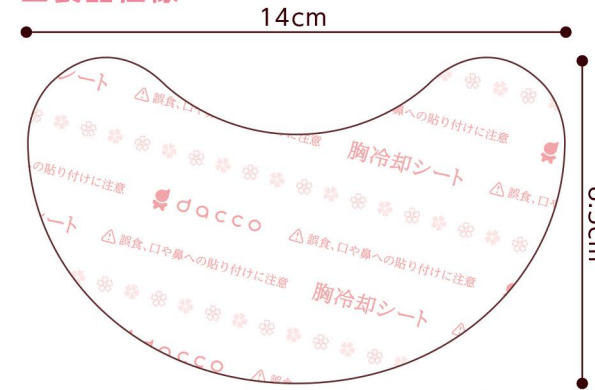

■使用方法

- フィルムをはがし、ジェル面を熱をもつ部位に貼ってください。
- ※フィルムは1度にはがさず、半分まではがしてから肌に貼り、残りを少しずつはがすと、きれいに貼れます。
- 冷蔵庫で冷やしてから使用すると、より一層冷却効果が高まります。(冷蔵庫は不可)
- 胸の状態を確認したり、常に清潔に保つため、授乳のたびにシートを交換することをおすすめします。

■構成素材

パラベン・エドト酸塩配合

商品規格

| 商品写真 品番 | 商品名・内容量・規格 | サイズ 幅×高さ×奥行(mm) | 重量 | 梱入数 | POSレジ登録用品名略称 JANコード | JANコード/ITFコード |
|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 84550 | 胸冷却シート 16枚入(4枚入×4袋) 8.5cm×14cm | 販売単位 135×198×43 外装 424×238×290 | 236.0g 5.3kg | 20箱 | ムネレイキヤクシート16マイ 4 971032 845500 | 4971032845500 14971032845507 |

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ/ <http://dacco-web.com> E-mail/ support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

◆ 胸冷却の実態

胸を冷却した経験はありますか？


乳房が張りすぎて痛い時などに...

ある
約50%

(n=197)

「ある」と回答した方のうち
約85%のママが産後1ヶ月間に経験

使用した冷却材は？

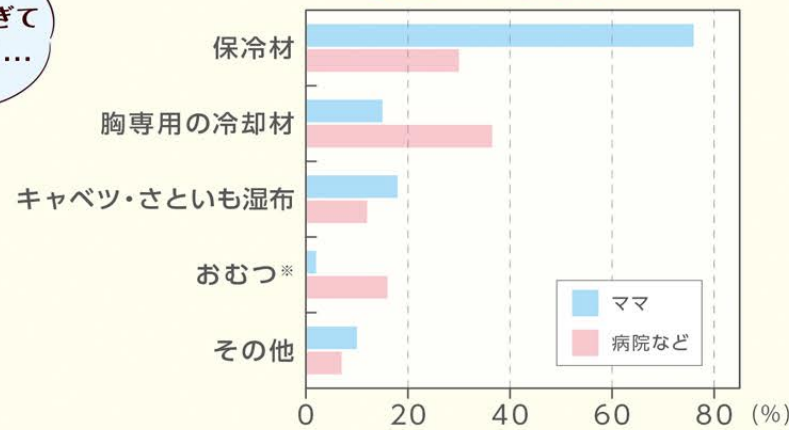

*水を含ませて、冷やしたり凍らせたもの
(ママ n=89、病院など n=30)

◆ 胸冷却で困っている・不満に思うこと



冷却材を冷やす時
冷蔵庫・冷凍庫内の
スペースが必要

事前準備が必要
(冷やす・作るなど)



使用中、冷却材が
胸からズリ落ちるから
手で押さえる必要がある

事前準備の手間や使用中に不満が多い!

そこで...

(当社調べ)


胸冷却シートが、ママの胸冷却を快適にします!

① 胸にぴったりフィット

- 胸に沿う形状とストレッチ素材のため、ズレにくくはがれにくくなっています。
- 薄くてアウターに響きにくいので、オシャレもバッチリです。

こんなところに!


- ① 乳房の外縁部
 - ② 乳房の上部
 - ③ 脇の下
- など、熱をもつ部位にご使用ください。

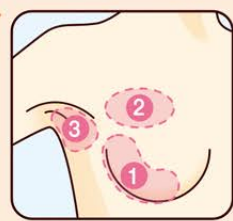

② 授乳中のママに合った冷却効果

- 皮膚温-2℃でおだやかに冷やすため、冷やしすぎず授乳中のママも安心して使用できます。*
- ※冷やしすぎると、母乳の分泌が止まってしまうといわれています。
- 約4時間、冷却が持続するため、次の授乳の時まで冷やし続けることが可能です。

他の冷却材との比較
(皮膚温の差の経時変化)

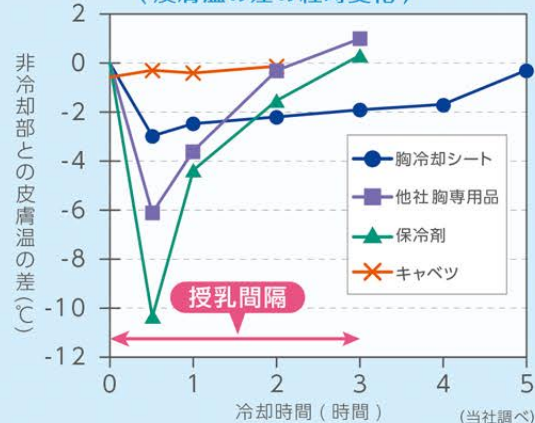


※イラストはイメージです。実物は無着色です。

③ 肌にやさしい冷却ジェル

- 無香料・無着色・弱酸性で、デリケートなママの肌にも安心です。

額用・脚用との違い

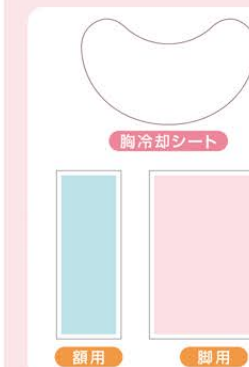

- 胸元にピッタリの大きさと形状
- 無香料&ノンメントール
・皮膚刺激の原因になるメントールが入っていないため、デリケートな肌にも安心です。
・メントールなどの香料が入っていないため、授乳時や赤ちゃんを抱っこする時もニオイが無く安心です。
※多くの額用・脚用の冷却シートには、冷感を上げるため「メントール(香料)」が入っています。
- 無着色でデリケートな肌にも安心

④ 手間なくすぐに使える

- 事前準備が不要で、フィルムをはがして貼るだけで、簡単にすぐに使えます。
- 母乳パッドとの併用も可能です。