

一般医療機器

単回使用汎用サージカルドレープ

滅菌パウチ付 帝切ドレープF2030



羊水、血液などで床を汚染することなく
手術が行える帝王切開用ドレープです。



滅菌パウチ付帝切ドレープF2030



産科・婦人科製品

産科・婦人科セット



E.O.G.済

商品特長

迅速な処理


- 緊急時にもすぐに対応ができ、セッティングから術後の処理まで迅速に行えます。

メインドレープとパウチドレープが一体化


- メインドレープとパウチドレープを一体化させたタイプの帝王切開用ドレープです。

吸水／防水加工

- メインドレープは吸水・防水加工がされています。

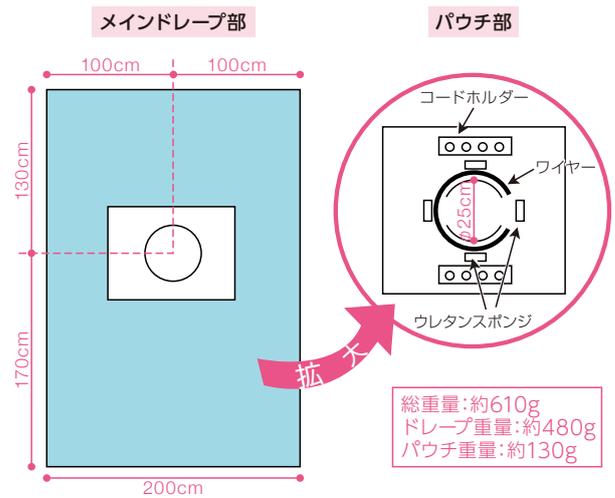

使用方法 ※消毒液が完全に乾いてから、セッティングして下さい。

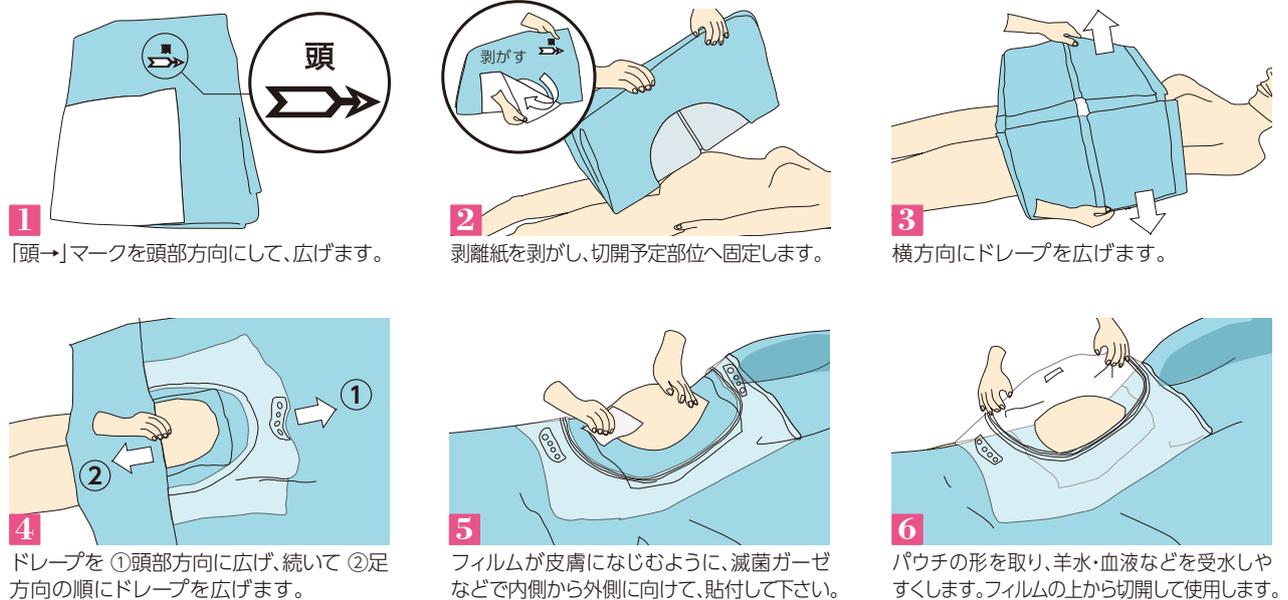

後処理の仕方

パウチドレープに集められた羊水や血液などは、吸引器で回収、もしくは一箇所のコーナーに集めてドレープの角を切ってから処理をしてください。
※器具や重量物をパウチドレープに入れると破損する恐れがあるため避けてください。

商品規格

■滅菌パウチ付帝切ドレープ

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ:35531000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	標準価格(税抜)	梱入数	JANコード
50903	滅菌パウチ付帝切ドレープF2030 1枚入(5袋) (メインドレープ)200cm×300cm (パウチ)72cm×84cm (穴)φ25cm	販売単位 405 × 338 × 315	¥30,000	2箱	4971032509037
		外装 660 × 373 × 425			—

■販売名:滅菌オオサキパウチ付ドレープ ■届出番号:23B2X10001000062

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店