



脚袋 リブ付 滅菌脚袋 リブ付



素早く清潔に装着できる
ディスプレイザブルタイプの脚袋です。

商品特長

1 素早くかんたん装着

- 特殊なたたみ方と、伸縮性のあるリブ編み部分による固定で、紐タイプより素早く簡単に装着できます。



たたんだ状態


装着時間の比較(片足)

紐タイプ	リブ付
18.4秒	6.7秒

※実際の装着時間の比較は下記“使い方動画”のQRコードよりご覧頂けます。

紐タイプの約 **3** に短縮!

(当社調べ)

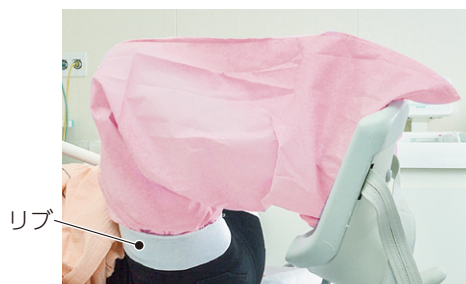

リブ

※画像はリブの折り返しを伸ばした状態です。

2 清潔操作しやすい

- リブで脚に固定するため、紐付タイプと比較して、脚袋の紐や装着者の手が不潔野に触れにくくなっています。

3 ママの肌にやさしい

- 縫い代が外側に出るため、ママの肌への刺激が少なくなっています。

装着テストで多くの助産師さんが
『今後使用したい』と答えました!

Q. 紐タイプより早く装着できましたか?

早い13.3%

とても早い86.7%

Q. 装着は簡単でしたか?

簡単3.3%

とても簡単96.7%

(アンケートは全て当社調べ n=30)

商品情報


■装着方法



リブ部分に両側から手を差し込みます。



中から内側をつまみ、脚を入れられるように広げます。

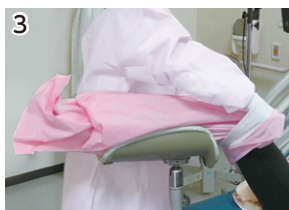

広げた内側の部分に脚を入れます。



リブは折り返さずに手を引き抜きます。


使い方動画はこちら!



使い方のコツ

産婦の脚が長い場合の長さ調節や、フリースタイル分娩(血液などが脚に伝って汚れやすい)で伝いモレの吸収をさせたい場合は、リブの折り返しも伸ばして装着してください。 ※リブを折り返す際には、不潔野に触れないよう気をつけてください。

■製品仕様

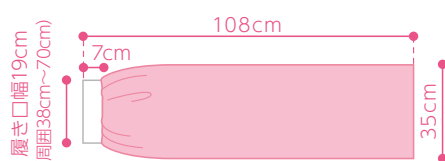

■素材

本体: ポリプロピレン

リブ: ポリエステル

※ラテックスフリー

(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

商品規格

■オオサキ 脚袋リブ付

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
87569	オオサキ 脚袋リブ付 L ピンク 2枚入 35cm×108cm	販売単位 360 × 375 × 20 外装 405 × 160 × 305	—	10袋	4971032875699 —

■滅菌オオサキ 脚袋リブ付

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
87570	滅菌オオサキ 脚袋リブ付 L ピンク 2枚入(10袋) 35cm×108cm	販売単位 530 × 320 × 190	—	—	4971032875705

E.O.G.

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。