

新生児のお臍のお手入れに使用する
衛生用品の詰め合わせ

臍帯セット

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

選べる
ケース



ハードケース



ソフトケース



紙ケース



※写真はセット内容例Dです。

商品情報

■部材一覧

	ケース			綿棒	消毒液
商品画像					
商品名	ハードケース 素材:ポリプロピレン	ソフトケース 素材:ポリ塩化ビニル	紙ケース 素材:紙	滅菌おへその綿棒 1本入(10袋)	消毒用エタノール 5mL
薬事分類 販売名 承認(届出)番号	-	-	-	-	指定医薬部外品 ■販売名:エタノール消毒液OS ■承認番号:21700DZZ0163300


	乾燥剤	ガーゼ		テープ
商品画像				
商品名	亜鉛華デンプン 2g	滅菌おへそのガーゼ 15cm×15cm Yカット 1枚入(10袋)	滅菌おへそのガーゼ 10cm×10cm Iカット 1枚入(10袋)	サージカルテープ 12mm×6m
薬事分類 販売名 承認(届出)番号	第3類医薬品 ■販売名:サンヨー亜鉛華デンプン ■承認番号:15916APZ00498000	一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 ■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004	一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 ■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004	-

■セット内容例


種類	綿棒	消毒液	乾燥剤	ガーゼ Yカット	ガーゼ Iカット	テープ
A	×1	×1			×1	×1
B	×1	×1	×1		×1	×1
C	×1	×1		×1		×1
D	×1	×1	×1	×1		×1
E	×1	×1				

★セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。


■使用方法例

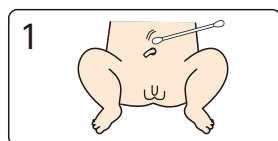

1 沐浴後、綿棒に消毒液を浸し、ていねいに消毒します(乾燥剤がある場合は、お臍の付け根に付けてください)。

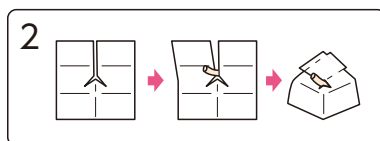

2 ガーゼを広げ、切れ目部分に臍の緒をはさみ、左右から包み込みます。ガーゼの中に臍の緒が収まるようにガーゼを畳んでまとめます。

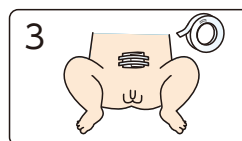

3 上からテープ2本で固定します。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市区西玉池町203番地 〒452-0812
<https://dacco-web.com>



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。