



光線療法眼帯

オオサキ アイマスク



フィットして光線をしっかり遮断できる
貼るタイプの新生児用アイマスクです。



商品特長

1 光線をしっかり遮断

- 遮光材のアルミニウムが、光線をしっかり遮断し、あかちゃんの目を守ります。

2 貼るタイプでしっかりフィット

- 貼るだけで簡単に装着でき、しっかりフィットします。
- 鼻部分のカットが凹凸にフィットして、隙間から光線が入りにくくなっています。

3 肌にやさしいアクリル系粘着剤


- ジェル型のアクリル系粘着剤を使用し、剥がす際に角質剥離が少ないため、皮膚がかぶれにくいです。また、授乳時や面会時に剥がしても再度貼ることができます。

4 ムレにくい


- メッシュタイプの不織布のため、ムレにくくなっています。

商品情報


■使用方法

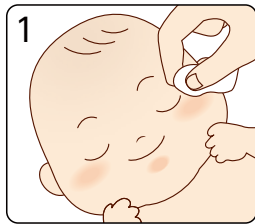

貼る部分を清潔にしてください。

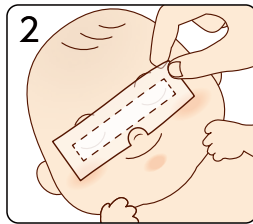

遮光部を目の位置に合わせて貼ります。

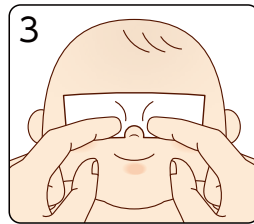

隙間から光線が入らないように、周囲や鼻に当たる部分を軽く押さえてフィットさせてください。

■素材

シール部：

[基布] ポリエステル不織布

[粘着剤] アクリル系粘着剤

遮光部：


[遮光材] アルミニウム

[パッド] レーヨン・


ポリオレフィン不織布

■製品仕様

低出生体重児用

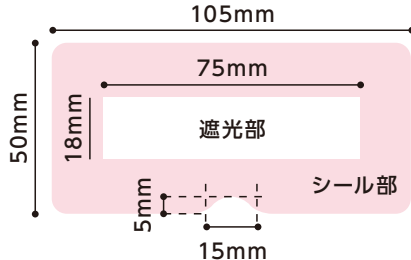

新生児用

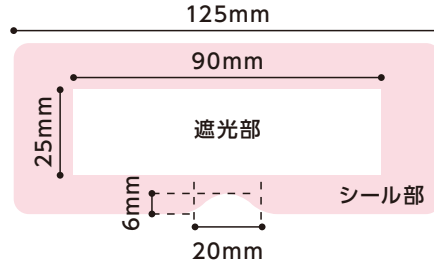

商品規格

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
11105	オオサキ アイマスク 低出生体重児用 1枚入(10袋) 50mm×105mm	販売単位 85 × 165 × 20	44.0g	10個	4971032111056
		内装 173 × 170 × 107	496.0g	×	-
		外装 548 × 184 × 353	5.5kg	10箱	-
11104	オオサキ アイマスク 新生児用 1枚入(10袋) 50mm×125mm	販売単位 85 × 165 × 20	46.0g	10個	4971032111049
		内装 173 × 170 × 107	516.0g	×	-
		外装 548 × 184 × 353	5.7kg	10箱	-

◇商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。