

産後の骨盤をしっかりと固定!

産後用骨盤ベルト

キュッとベルト®

← 着用感 標準タイプ →

助産師さんとママの声から生まれました

体に
フィット!

かんたん
装着

ズレにくい
形状



商品特長

1 体にフィット

体にフィットする素材が、産後の骨盤をしっかり固定します。
フチ取りテープなどを極力使用していないため、段差が少なく、心地良い着用感です。

2 かんたん装着

キュッと引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけ! ひとりでも簡単に装着できます。

3ズレにくい形状

下腹部に当たる部分が一段低く、座ってもズレ上がりにくい形状です。

4 汚れが目立ちにくい

悪露などで汚れても目立ちにくい、黒色の生地を使用しています。



ママの疑問に答える
「産後ママの骨盤ケアQ&A」付き!
(daccoホームページでも、ご覧いただけます。)

商品情報

■着用期間の目安

出産直後から6週間まで※左記期間は目安です。それ以降も続けて着用可能です。

■正しい装着位置 下の図にある「上前腸骨棘」という部位よりも下を、地面と平行に締めてください。

上前腸骨棘 (じょうぜんちようこつきよく)
腰骨の一番突出している部位

恥骨 (ちこつ)
股間前部の固い部位

注意
上前腸骨棘よりも上を締めないでください。「恥骨」部が開いてしまう可能性があります。

締めないで!

ベルトを上下逆さまに装着しないでください。ベルト「裏側のタグ」が目印です。

■装着方法 ベルト中央下部を「恥骨」にあてて装着すると、適切な位置に締めやすくなります。

1 足を揃えて、ベルト中央下部を恥骨にあて、前から後ろに回します。

2 おしり側でベルトを交差し、端を持って左右に伸ばします。

3 伸ばしたまま端をとめます。

■素材

表面：ナイロン 96%、ポリウレタン 4% 中面：ポリウレタン樹脂 内面：ナイロン 100%

規 格

商品写真 品番	商品名・規格	サイズ 幅×高さ×奥行(mm)	重量	梱入数	POSレジ登録用品名略称 JANコード	
					4 9 7 1 0 3 2 6 0 8 0 6 8	4971032608068
60806	キュッとベルト® フリーサイズ ブラック 1枚入 ヒップサイズ 87cm~105cm	販売単位	115 × 155 × 43	110.0g	20箱	4971032608068
		外装	438 × 128 × 263	2.5kg		14971032608065

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221
ホームページ/ http://dacco-web.com E-mail/ support@osakimedical.co.jp

取扱店

産後の骨盤をしっかり固定!

産後用骨盤ベルト

キュッとベルト® II

← 着用感 強めタイプ →

助産師さんとママの声から生まれました

体に
フィット!

ズレにくい
形状

かんたん
装着



商品特長

- 1 体にフィット**
体にフィットする素材が、産後の骨盤をしっかり固定します。
- 2 かんたん装着**
キュッと引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけ! 簡単に装着できます。
- 3 ズレにくい形状**
 - 下腹部に当たる部分が一段低く、座ってもズレ上がりにくい形状です。
 - 左右の腰部内側にズレ止めテープが付いています。
- 4 汚れが目立ちにくい**
おろ悪露などで汚れても目立ちにくい、黒色の生地を使用しています。
- 5 着用感強めタイプ**
通常のキュッとベルトよりも強めの着用感です。



ママの疑問に答える
「産後ママの骨盤ケアQ&A」付き!
(daccoホームページでも、ご覧いただけます。)

商品情報

■素材

表面：ナイロン 96%、ポリウレタン 4% 中面：ポリウレタン樹脂 内面：ナイロン 100%

規格

商品写真 品番	商品名・規格	サイズ 幅×高さ×奥行(mm)	重量	梱入数	POSレジ登録用品名略称 JANコード		
					キ ャ ッ ト ベ ル ト 2	JANコード/ITFコード	
60811	キュッとベルト® II フリーサイズ ブラック 1枚入 ヒップサイズ 87cm~105cm	販売単位	115 × 155 × 43	115.0g	20箱	 4 971032 608112	4971032608112
		外装	483 × 128 × 263	2.6kg			14971032608112

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221
ホームページ/ <http://dacco-web.com> E-mail/ support@osakimedical.co.jp

取扱店