



一般医療機器

温熱用パック

# オオサキ ホットパック



患部にしっかりフィット!  
保温性に優れた温熱用パックです。



整形外科製品

温冷治療

## 商品特長

### 1 温熱療法に最適

- 保温性に優れたゲルを使用しており、温熱効果による治療に最適です。
- 適用部位全体を温めることができるよう、ゲルが均一になる形状です。

### 2 温めに最適な加温槽専用商品

- 加温槽を使用することで、70～80℃を保持し、適温で使用できます。

▲本品は加温槽専用です。加温槽以外で加熱しないでください。

## 商品情報

### ■使用方法

1. 加温槽の水を70～80℃に温める。(80℃を超えないよう注意する。)
2. 加温槽の温度を70～80℃に保ち、本品を十分に沈めた状態で15～20分間温める。
3. 火傷に注意しながら本品を加温槽から取り出し、水分を拭き取った後、破損等が無いを確認する。
4. 本品をタオル等で包み、患部に当て、適切な時間温める。
5. 使用後に汚れ、破損等がないか確認し、続けて使用する場合は、2に戻る。

### ■バリエーション

種類	サイズ(幅×長さ)
C	18.5cm×43cm
L	26.5cm×43cm

体のどの部位にも使用できますが、  
 「Cタイプ」は、頸部、肘、膝等の部位、  
 「Lタイプ」は、背中、腰等の部位に適しています。


### ■素材

本体：ポリ塩化ビニル(PVC)  
 内容物：保温ゲル(水、水溶性ポリマー、防腐剤)

### ■規格

C


L

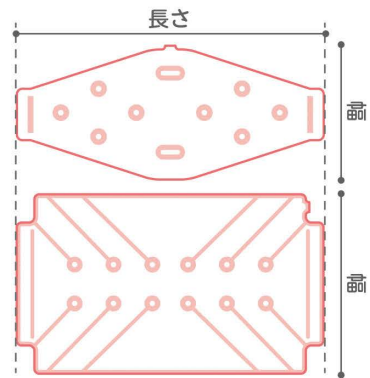

### ▲ 使用期限および耐用期限の注意

本品は、下記の【使用期限】までに使用を開始し、【耐用期限】以内は使用できます。  
 使用開始日を、必ず製品本体に油性ペンで記入してください。

#### 〈製造年月の読み方〉

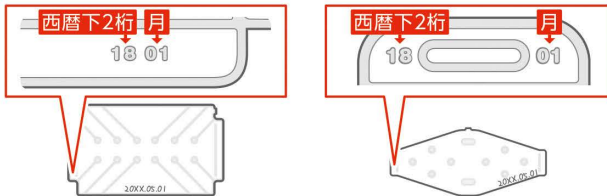

【使用期限】：製造年月の **翌年同月** まで  
 【耐用期限】：使用開始日から **5カ月** 以内  
 ※【耐用期限】は、例①、②どちらの場合も使用開始日から5カ月以内です。



## 商品規格

### ■オオサキ ホットパック

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
61005	オオサキ ホットパック C 1個入 幅26.5cm×長さ43cm	販売単位   430 × 31 × 185	700.0g	10箱	4971032610054
		外装   446 × 204 × 336	7.6kg		14971032610051
61006	オオサキ ホットパック C 化粧箱なし 10個入 幅18.5cm×長さ43cm	販売単位   420 × 194 × 250	6.0kg	—	4971032610061
61007	オオサキ ホットパック L 1個入 幅26.5cm×長さ43cm	販売単位   420 × 31 × 285	1.4kg	5箱	4971032610078
		外装   440 × 308 × 179	7.5kg		14971032610075
61008	オオサキ ホットパック L 化粧箱なし 5個入 幅26.5cm×長さ43cm	販売単位   425 × 114 × 291	6.3kg	—	4971032610085

■販売名：温熱用パック ■届出番号：23B2X10001000094

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221  
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店