



外科製品

Disposable  
Medical Protective  
Apron

ディスポーザブル  
プラスチックエプロン

# クリーンエプロン

ディスポーザブル プラスチックエプロン

袖なし  
タイプ



ホワイト

ブルー

ピンク

血液・体液などから医療従事者を守る  
着用しやすい防水プラスチックエプロンです。



外科製品

ディスプレイダブル  
メディカルプロダクツ

## 商品特長

### 優れたバリア性

- ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性・耐薬品性に優れています。

### 着用しやすい

- 取り出したエプロンの端を持つと、簡単に広げられる設計になっています。



### 露出を抑えた形状

- 首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質(血液・体液など)からしっかりと防御します。

### 使いやすいパッケージ

- 取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
- フックなどを使用して、壁に掛けて使用することができます。(30枚入のみ)
- コンパクト設計のため、オオサキPPEホルダーにぴったりと収まります。

※一部のPPEホルダーには入らない場合があります。



1枚ずつ取り出しやすい!



フックで壁掛け可能(30枚)




オオサキPPEホルダーにぴったりと収まります。

## 商品情報

### ■着衣方法



エプロンを取り出し、○の部分を持つと、簡単に広げることができます。2つ折りになっているため、広げて使用してください。

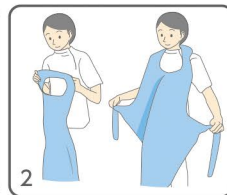

首部を開いて首にかけ、腰ひもを広げます。



腰ひもを後ろで結び、裾を完全に開きます。

### ■脱衣方法



首ひもを後ろで切り、胸部分を前に垂らします。



裾の左右から裏側へ手を入れ、汚染部に触れないように内側にたたみます。腰ひもを切り、左右から内側へ折りたたんでください。

## 商品規格

### ■クリーンエプロン袖なし

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
73722	クリーンエプロン袖なし ホワイト 30枚入 丈120cm×幅72cm	販売単位   238 × 45 × 115	388.1g	20箱	4971032737225
		外装   480 × 258 × 248	8.3kg		14971032737222
73723	クリーンエプロン袖なし ブルー 30枚入 丈120cm×幅72cm	販売単位   238 × 45 × 115	388.1g	20箱	4971032737232
		外装   480 × 258 × 248	8.3kg		14971032737239
73724	クリーンエプロン袖なし ピンク 30枚入 丈120cm×幅72cm	販売単位   238 × 45 × 115	388.1g	20箱	4971032737249
		外装   480 × 258 × 248	8.3kg		14971032737246
73728	クリーンエプロン袖なし ホワイト 60枚入 丈120cm×幅72cm	販売単位   238 × 90 × 115	736.1g	10箱	4971032737287
		外装   480 × 258 × 248	7.9kg		14971032737284
73729	クリーンエプロン袖なし ブルー 60枚入 丈120cm×幅72cm	販売単位   238 × 90 × 115	736.1g	10箱	4971032737294
		外装   480 × 258 × 248	7.9kg		14971032737291
73730	クリーンエプロン袖なし ピンク 60枚入 丈120cm×幅72cm	販売単位   238 × 90 × 115	736.1g	10箱	4971032737300
		外装   480 × 258 × 248	7.9kg		14971032737307

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店