



洗浄料

清拭用ディスポタオル

ハイポでスッキリ! 清拭タオルHP



汚れ(ヨウ素など)を拭き取る
ノンアルコールタイプの清拭用タオルです。



商品特長

汚れ(ヨウ素など)を素早く清拭!

- 8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くきれいに落とせます。
- 1枚ずつ包装されているため、必要な時すぐ、清潔に使用できます。

ノンアルコール

- アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。

無駄な薬液使用の削減

- 不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。

十分な薬液量

- やわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、1枚で広範囲の拭き取りが可能です。

成分の蒸発を防ぐアルミ個包装

- アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。

※使用期限は、製造日より3年です。(未開封時)

温めて使用可能

- 電子保温ボックス(別売り)などで温めて使用することができます。

※約60℃まで、包材等に影響はありません。

- ▲電子レンジでは温めないでください。
- ▲加温・保温する際は、切り込みを入れしないでください。
- ▲温めて使用する場合は、やけどに注意してください。
- ▲高温や長時間の加温は、パッケージの破損や変色の恐れがあるため避けてください。

2種類の基布サイズ

- 使用範囲に合わせて、ふつうサイズ27.5cm×30cm、大きめサイズ55cm×30cmの2種類から選べます。

- ▲本品は未滅菌品です。滅菌品として使用しないでください。(本品は滅菌しないでください。)
- ▲傷口や粘膜等には使用しないでください。

商品情報

■成分

水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、1,2-ヘキサジオール、カプリリルグリコール、炭酸Na

■素材

コットン/リヨセル不織布

■使用用途

汚れ(ヨウ素など)の清拭

関連商品



からだふき おしほり 大判 ぬれタオル

- 保湿成分“グリコシルトレハロース”を配合した、個包装タイプのからだふき用ぬれタオルです。
- 清拭タオルHP使用後、仕上げの清拭として最適です。

商品規格

■清拭タオルHP

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード	洗淨料
		販売単位	外装				
72003	清拭タオルHP ふつうサイズ 27.5cm×30cm 1枚入(30個)	販売単位	130×150×110	542.0g	12袋	4971032720036	
		外装	355×310×285	6.9kg		14971032720033	
72004	清拭タオルHP大きめサイズ 55cm×30cm 1枚入(30個)	販売単位	170×160×110	1.1kg	10袋	4971032720043	
		外装	540×170×360	11.3kg		14971032720040	

■販売名:清拭タオルS-hp

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店