

ディスポーザブルエプロン

# プラスチックエプロン

袖付タイプ



外科製品


外科製品

PPE

PPE

## 商品情報


### ■着衣方法

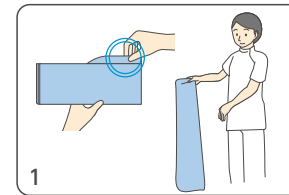

1 エプロンを取り出し、◎の部分を持つと、簡単に広げることができます。




2 首を開いて首にかけ、袖を通します。

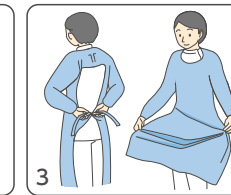

3 腰ひもを後ろで結び、裾を完全に開きます。

### ■脱衣方法

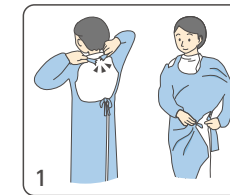

1 首ひもを後ろで切り、腰紐をほどくか腰紐の付け根を切ります。



2 汚染部に触れないよう、片腕ずつ引き抜きます。汚染部が内側になるように折りたたみ、廃棄します。

## 関連商品



### オオサキ PPEホルダーソフト

- 安全性と機能性に優れたPPE(個人防護具)専用ホルダーです。
- “マグネット”(別売)などの設置用品を使用することで、壁や手すりなど場所を選ばずに、簡単に取り付けることができます。
- サイズバリエーションがあるため、多くのメーカーのPPE商品に使用することができます。



## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
57088	オオサキ プラスチックエプロン 袖付 ゴム袖口 ふう ブルー 10枚入 身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm	販売単位	238 × 100 × 115	390.0g	16箱	4971032570884
		外装	490 × 260 × 435	7.0kg		14971032570881
57089	オオサキ プラスチックエプロン 袖付 ゴム袖 大きめ ブルー 10枚入 身丈125cm 胴囲100cm 袖丈90cm	販売単位	238 × 100 × 115	480.0g	16箱	4971032570891
		外装	490 × 260 × 435	8.5kg		14971032570898
57090	オオサキ プラスチックエプロン 袖付 フィンガーフック ふう ブルー 10枚入 身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm	販売単位	238 × 100 × 115	360.0g	16箱	4971032570907
		外装	490 × 260 × 435	6.5kg		14971032570904
57102	オオサキ プラスチックエプロン 袖付 フィンガーフック ふう ホワイト 10枚入 身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm	販売単位	238 × 100 × 115	360.0g	16箱	4971032571027
		外装	490 × 260 × 435	6.5kg		14971032571024
57103	オオサキ プラスチックエプロン 袖付 フィンガーフック ふう ピンク 10枚入 身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm	販売単位	238 × 100 × 115	360.0g	16箱	4971032571034
		外装	490 × 260 × 435	6.5kg		14971032571031
57091	オオサキ プラスチックエプロン 袖付 フィンガーフック 大きめ ブルー 10枚入 身丈125cm 胴囲100cm 袖丈95cm	販売単位	238 × 100 × 115	425.0g	16箱	4971032570914
		外装	490 × 260 × 435	7.6kg		14971032570911

◇商品はすべてオープン価格です。

血液・体液などから医療従事者を守る  
袖付きタイプの防水プラスチックエプロンです。



**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

# 使用用途・診療科によって選べる豊富なラインナップ!

## 1 腕までしっかり防御

- 腕までしっかり防御するため、接触感染予防時、中央材料室での洗浄業務に適した袖付きエプロンです。
- ポリエチレン製で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。


### ■ 処置別使用シーン

- 嘔吐物・排泄物の処理時
- 接触感染予防時
- 医療器材の洗浄・消毒時
- 汚染リネンの交換時

## 2 展開しやすく簡単着用

- エプロンの端を持つと簡単に展開することができます。  
(裏面「■ 着衣方法」参照)
- 帯電防止剤を配合しているため、静電気の発生を抑え、広げやすく簡単に着用できます。

エプロンの端を持つと簡単に展開!

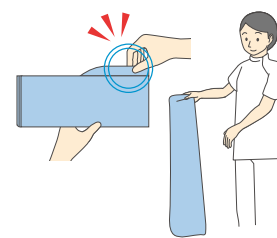

## 3 選べるサイズと袖口形状

- サイズは『ふつう』『大きめ』の2種類、袖口の形状は『ゴム袖』と『フィンガーフック』の2規格から選べます。



ゴム袖



フィンガーフック

## 4 使いやすいパッケージ

- 取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
- コンパクト設計のため、“オオサキPPEホルダーソフト”にぴったりと収まります。  
※一部のPPEホルダーには入らない場合があります。



1枚ずつ取り出しやすい!




“オオサキPPEホルダーソフト”にぴったりと収まります。

## 5 使用用途・診療科で選べる豊富なカラーバリエーション

- 『フィンガーフック ふつうサイズ』は、使用用途や診療科によって3色のカラーバリエーションから選べます。
- 感染対策のための汚染・清潔区域のゾーニングや、診療科による色分けが可能です。



### 感染対策のための汚染・清潔区域のゾーニング (例)

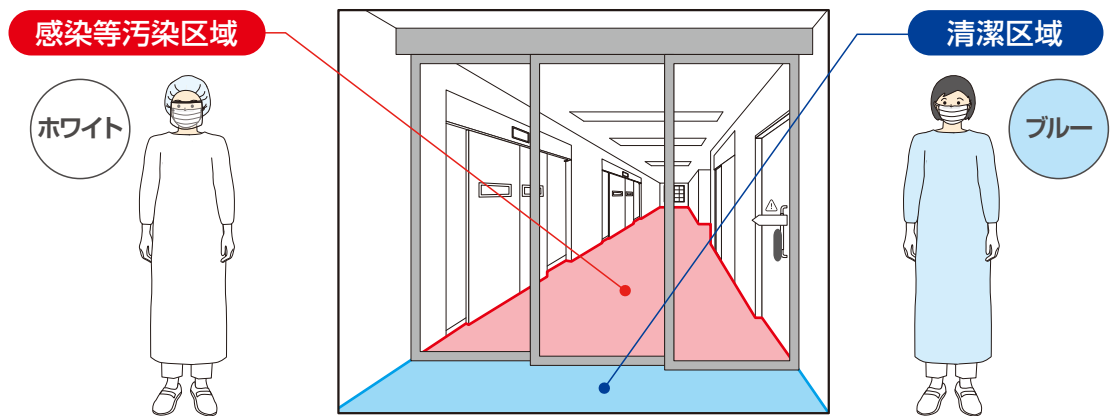

### 診療科の雰囲気に合わせてPPE (例)

#### PPE ピンクコーディネート

- エプロンのピンク色は、産科・婦人科や小児科などのやわらかな雰囲気を重要視する診療科に最適な、コーディネートが可能です。

#### オオサキ サージカルキャップ No.3 ピンク

- 通気性に優れたソフトなキャップです。

#### ICグラス®I ピンク

- 目への体液暴露による飛沫感染を防ぐアイウェアです。

#### プロフェッショナルマスクI オメガ ピンク

- オメガ形状プリーツで通気性に優れた医療用マスクです。

#### ■ ピンクがもたらす心理効果

- ピンクを見るとやさしい気持ちになり、「安全」「疲れを癒す」「安らぐ」といった効果があるといわれています。
- ピンクの持つ温かいイメージによって、患者様がより安心して過ごせたり、癒したりする効果が期待できます。

