



医療用マスク

プロフェッショナルマスクI オメガ



ホワイト

ピンク

ネイビー

鼻や口を圧迫せず、呼吸がしやすい
オメガ形状プリーツのマスクです。




外科製品

PPE

商品特長

1 呼吸しやすい“オメガ形状プリーツ”※1

- オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
 - 広がったプリーツが、口まわりまでしっかり覆います。
- ※1: プリーツを広げる際、中央から上下に広がる形状です。

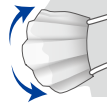


2 しっかりフィット

- フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。
- フィット性が高く、感染・風邪・花粉対策にも適しています。

3 やさしい肌ざわり

- やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
- マスクの両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛くありません。

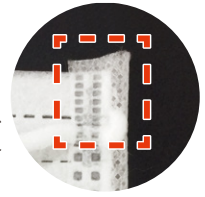

4 耳が痛くなりにくい

- ゴム紐は、耳が痛くなりにくい楕円形ゴムです。

商品情報

JIS T9001適合審査合格品

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスI 規格適合番号 M12109043						
適合番号発行元: JHPA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	(区分1)	10.6kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率
BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

■ 着脱方法

着け方



ノーズフィッターを上にして、ゴム紐が外側になるように装着します(ピンク・ブルーは、色面が外側になります)。



耳にゴム紐を掛け、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。



ノーズフィッターを押さえたままプリーツを広げます。

外し方



マスク外面を触らないようにゴム紐をもって取り外します。

■ バリエーション

種類	カラー	サイズ
小さめ	ピンク	9cm×15cm
フリー	ホワイト	9cm×17cm
	ネイビー	

■ 推奨使用シーン

使用部署	クラスI	クラスII	クラスIII
病棟	●	●※2	—
外来	●	●	—
検査室※3	●	●	●
救急科・ICU	—	●※4	●
手術室	—	—	●

※2: 口腔ケア・おむつ交換時など、飛散しやすい処置時
※3: MRI 検査時を除く
※4: 小さな創傷、治りかけの創傷、極少量の血液飛散が想定される場合

■ 素材

本体: ポリプロピレン
ノーズフィッター: 鉄、ポリエチレン
耳紐: ポリエステル、ポリウレタン
※ラテックスフリー
(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

⚠️ MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

商品規格

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名簿/JANコード	JANコード/ITFコード
	51419	プロフェッショナルマスクI オメガ ゴム紐 小さめ ピンク 50枚入 9cm×15cm	販売単位 180 × 98 × 100	160.0g	40箱	フ・ロマスクオメガ・Pk	4971032514192
			外装 520 × 430 × 380	7.3kg		4 971032 514192	14971032514199
	51420	プロフェッショナルマスクI オメガ ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 9cm×17cm	販売単位 180 × 98 × 100	177.0g	40箱	フ・ロマスクオメガ・Wh	4971032514208
			外装 520 × 430 × 380	7.9kg		4 971032 514208	14971032514205
	51423	プロフェッショナルマスクI オメガ ゴム紐 フリー ネイビー 50枚入 9cm×17cm	販売単位 180 × 98 × 100	177.0g	40箱	フ・ロマスクオメガ・Nv	4971032514239
			外装 520 × 430 × 380	7.9kg		4 971032 514239	14971032514236

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。