



外科製品

PPE

医療用マスク

# プロフェッショナル マスクⅡ



ホワイト

ブルー

鉄ノーズフィッター着用

プラスチックノーズフィッター着用

バリア性に優れた、肌触りの良い  
サージカルマスクです。



外科製品

PPE

## 商品特長

### 1 優れたバリア性

- バリア性に優れたフィルタを使用しており、MRI検査時のみならず、病棟や外来など幅広い用途で使用できます。

### 2 使用用途に合わせて選べるノーズフィッター

- フィット性がより高い鉄素材と、磁力による影響があるMRI検査時に適したプラスチック素材のノーズフィッターから選べます。

### 3 しっかりフィット

- ゴム紐がマスク外面から出ているため、頬に隙間ができてくなくなっています。
- 隙間ができてく、フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、眼鏡やゴーグルが曇りにくくなっています。

### 4 やさしい肌触り

- 柔らかい不織布を使用しているため、ソフトな肌触りです。

### 5 耳が痛くなりにくい

- ゴム紐は、長時間の着用でも耳が痛くなりやすい平ゴムです。

## 商品情報

### ■JIS T9001適合審査合格品(鉄ノーズフィッター)

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスⅡ 規格適合番号 M22306007						
適合番号発行元: JHPiA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

### ■JIS T9001適合審査合格品(プラスチックノーズフィッター)

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスⅡ 規格適合番号 M22310004						
適合番号発行元: JHPiA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

### ■推奨使用シーン

使用部署	クラスⅠ	クラスⅡ 鉄 ノーズフィッター	クラスⅡ プラスチック ノーズフィッター	クラスⅢ
病棟	●	●※1	●※1	—
外来	●	●	●	—
検査室	●	●※2	●	●
救急科・ICU	—	●※3	●※3	●
手術室	—	—	—	●

※1: 口腔ケア・おむつ交換時など、飛散しやすい処置時

※2: MRI 検査時を除く

※3: 小さな創傷、治りかけの創傷、極少量の血液飛散が想定される場合

### ■着脱方法

着け方



ノーズフィッターを上にして、ヒダが下向きになるように装着します。ゴム紐の付け位置は外面です(ブルーは、色面が外側になります)。プラスチックノーズフィッターはロゴ表示が着用者の左下です。



耳にゴム紐を掛け、ノーズフィッターを鼻の形に合わせてます。



ノーズフィッターを押さえたままプリーツを広げます。



マスク外面を触らないようにゴム紐を持って取り外します。

### ■バリエーション

種類	カラー	サイズ
鉄ノーズフィッター フリー	ホワイト ブルー	17.5cm×9.5cm
プラスチックノーズフィッター フリー	ホワイト ブルー	17cm×9cm

⚠ 品番51428・51429はMRI検査時に使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

## 商品規格

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用略称/JANコード	JANコード/ITFコード
	51428	プロフェッショナルマスクⅡ ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 17.5cm×9.5cm	販売単位   1180 × 90 × 100 外表   520 × 380 × 380	217.7g 9.6kg	40箱	プロマスク2   フリー   Wh 4 971032 514284	4971032514284 14971032514281
	51429	プロフェッショナルマスクⅡ ゴム紐 フリー ブルー 50枚入 17.5cm×9.5cm	販売単位   1180 × 90 × 100 外表   520 × 380 × 380	217.7g 9.6kg	40箱	プロマスク2   フリー   Bl 4 971032 514291	4971032514291 14971032514298
	51431	プロフェッショナルマスクⅡPN ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 17cm×9cm	販売単位   1180 × 100 × 100 外表   525 × 425 × 380	175.0g 7.8kg	40箱	プロマスク2   PN   フリー   Wh 4 971032 514314	4971032514314 14971032514311
	51432	プロフェッショナルマスクⅡPN ゴム紐 フリー ブルー 50枚入 17cm×9cm	販売単位   1180 × 100 × 100 外表   525 × 425 × 380	175.0g 7.8kg	40箱	プロマスク2   PN   フリー   Bl 4 971032 514321	4971032514321 14971032514328

■素材: [本体・フィルタ] ポリプロピレン [ノーズフィッター] (51428・51429) 鉄、ポリエチレン (51431・51432) ポリエチレン [目紐] ポリエステル、ポリウレタン  
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



取扱店

\*規格には誤差が生じる場合があります。

2024.01