



医療用マスク

プロフェッショナル マスクⅢ



バリア性が高く、手術室での使用に適した
紐タイプのサージカルマスクです。



商品特長

1 優れたバリア性

- バリア性に優れたフィルタを使用しており、手術室や救急科などの血液飛散が考えられる場面に最適です。

2 息苦しくなりにくい

- 通気性の高い高性能フィルタを使用しているため、呼吸しやすくなっています。

3 しっかりフィット

- 紐タイプのため、ズレにくく顔にしっかりフィットします。
- フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。

4 やさしい肌ざわり

- 内側に柔らかい不織布を使用しているため、ソフトな肌ざわりです。

商品情報

■ JIS T9001適合審査合格品

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスⅢ 規格適合番号 M 32109051						
適合番号発行元：JHPDA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	21.3 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率

BFE: バクテリア飛まつ捕集効率

VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

■ 推奨使用シーン

使用部署	クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
病棟	●	●※1	—
外来	●	●	—
検査室※2	●	●	●
救急科・ICU	—	●※3	●
手術室	—	—	●

※1 口腔ケア・おむつ交換時など、飛散しやすい処置時

※2 MRI 検査時を除く

※3 小さな創傷、治りかけの創傷、極少量の血液飛散が想定される場合

■ 着脱方法

着け方




1 ノーズフィッターを上にして、青色の面を外側にします。



2 上の紐を後頭部で結び、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。



3 ノーズフィッターを押さえたままプリーツを広げます。

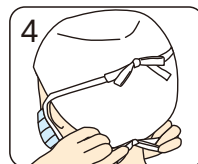

4 下の紐を首の後ろで結びます。



着ける際の注意
頬とマスクの間に隙間ができやすくなるため、上下の紐は交差しないように結んでください。

外し方



1 下の紐をほどいてから上の紐をほどきます。

■ 素材

本体、紐：ポリプロピレン

ノーズフィッター：鉄、ポリエチレン

⚠ MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57155	プロフェッショナルマスクⅢ 紐 フリー ブルー 50枚入 9cm×17cm	販売単位	185 × 123 × 100	242.0g	40箱	4971032571553
		外装	540 × 542 × 390	10.6kg		14971032571550

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店