


オオサキPPEホルダーソフト 2509S クリア 10個入

グローブ・エプロン用

取り扱い説明書

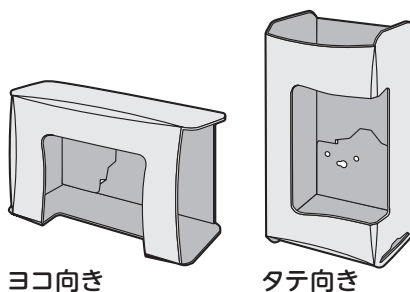

JANコード 品番 74610



GS1-128




< 内容物 >
●本体 …… 1個


< 別売 >
① マグネット (品番74613) …… 2個
② 壁付ネジ (品番74614) …… 4本

※壁への取り付けは、別売の「①マグネット」「②壁付ネジ」のどちらかお好みのものを組み合わせてください。
※「②壁付ネジ」は4本入り(ネジ4本・アンカー4個)のため、本体2個分に使用できます。(本体1個に使用するネジは2本です。)


< 内寸法 >
●幅25cm × 高さ13cm × 奥行9cm
(このサイズより小さい商品が入ります。)

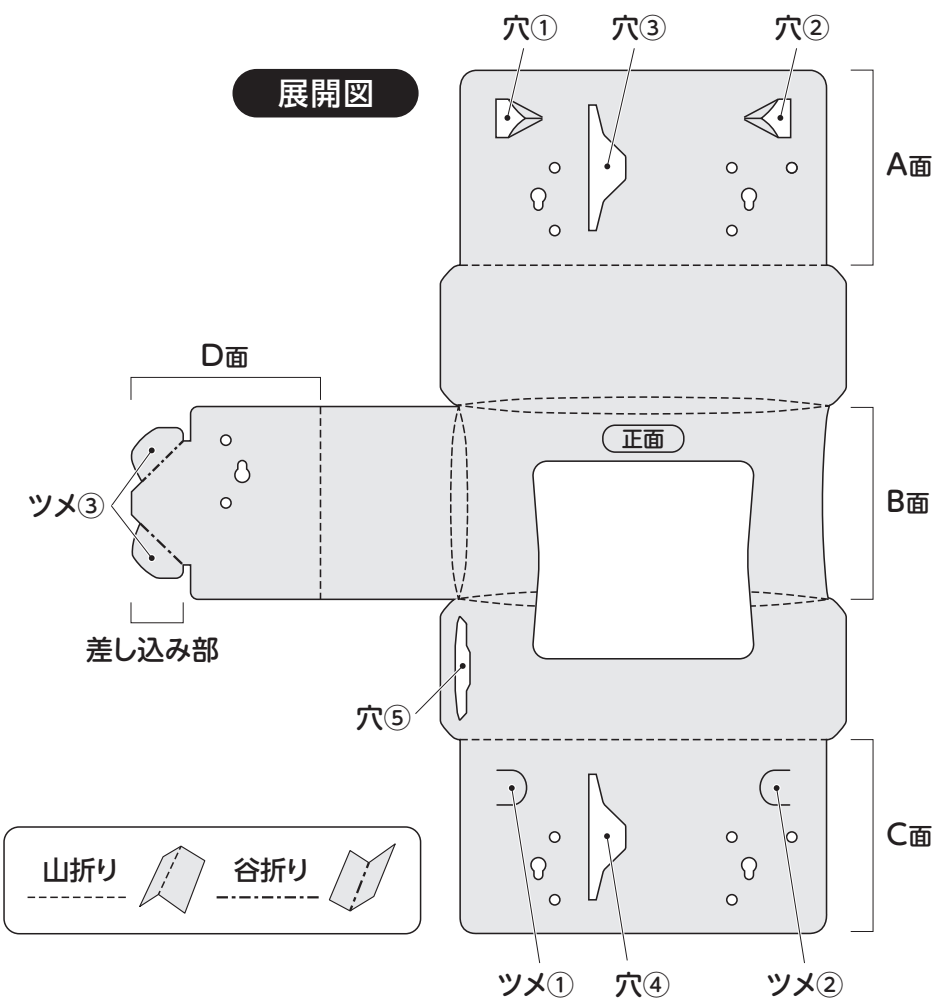


組み立て方

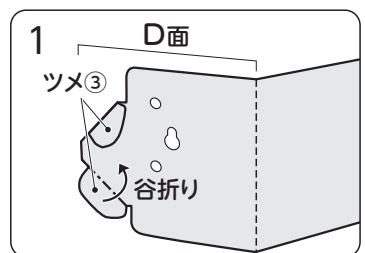


右上展開図の向きに開き、D面「ツメ③」を折り線に沿って谷折りします。

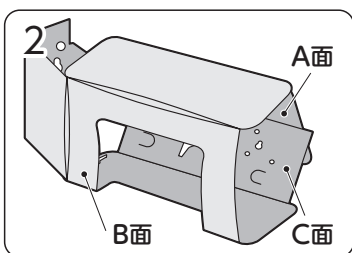


C面とA面を重ね合わせます。(A面が外側、C面が内側)

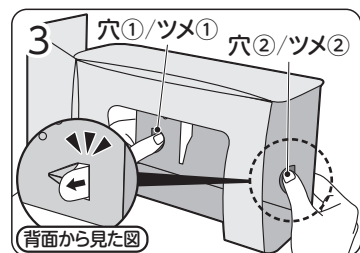


「穴①」と「ツメ①」を重ねて、「ツメ①」を指で奥まで押し込みます。「ツメ①」が背面から飛び出すまで押してください。同様に「穴②」と「ツメ②」も押し込みます。

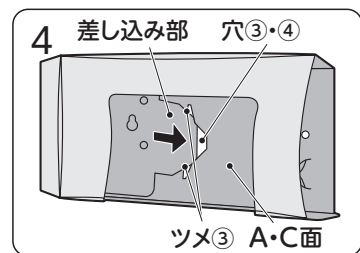

手順1で折り曲げた「ツメ③」を押さえながら「差し込み部」を、A・C面の手前から「穴③・④」に差し込みます。

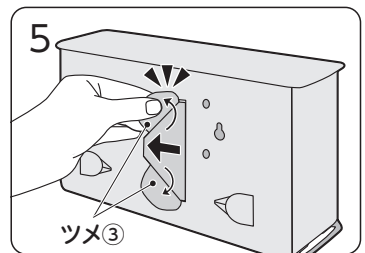

背面から「差し込み部」を引っ張り、「ツメ③」が飛び出すように広げます。

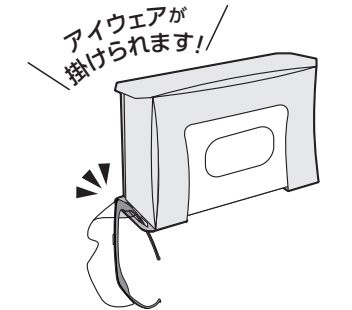


側面「穴⑤」に、アイウェアを掛けることができます。

PPEホルダーの詳しい情報は
こちら>>>
(組み立て動画あり)

本体材質:PP
日本製
132075-01
W320×H60×D360


Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812
ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>
お客様相談室 ☎ 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00 ※土・日、祝日を除く)
取り付け方は裏面にあります。>>>

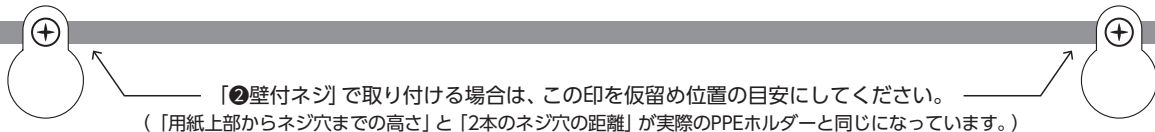

【②壁付ネジ】で取り付ける場合は、この印を仮留め位置の目安にしてください。
 (「用紙上部からネジ穴までの高さ」と「2本のネジ穴の距離」が実際のPPEホルダーと同じになっています。)


取り付け方

【①マグネット】で固定する場合

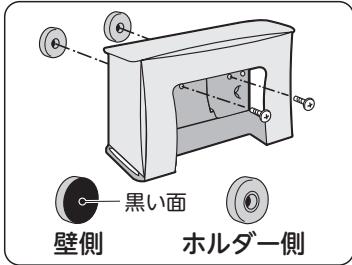

正面内側からネジを通し、背面からマグネットをドライバーで回し締めてください。
 マグネットは、黒い面を壁側にして取り付けてください。


〈ホルダーの外し方(マグネット)〉

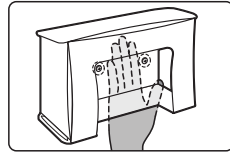


ホルダーと壁の隙間に手を入れ、手のひら全体でホルダーを手前に引っ張って外してください。

※磁力が強いため、無理に引っ張るとホルダーが破損する恐れがあります。

取り付け穴(背面)

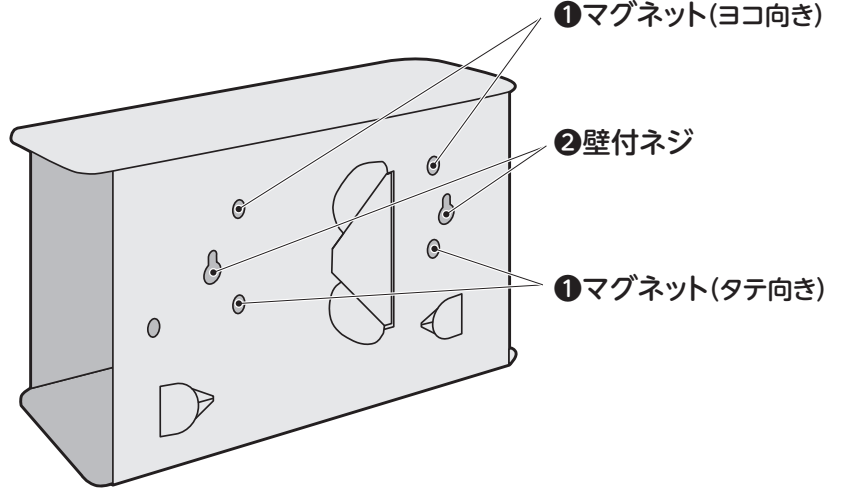

【②壁付ネジ】で固定する場合

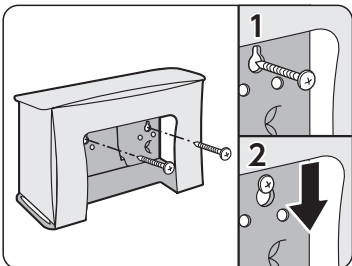


壁にネジを仮留めし、水平な位置を確認した後、本体を下にずらしてネジを増し締めします。


この用紙上部の⊕印を、仮留め位置の目安にできます。

〈アンカー使用方法〉


直接ネジを締め付けることができない壁(石膏ボードが張ってある中空構造の壁など)にはアンカーを使用してください。

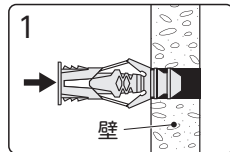

ドリルなどであらかじめ壁に6mmの下穴を空け、アンカーを差し込みます。入りにくい場合はハンマーで軽く叩いてください。(無理に叩くと壁が割れる場合があります。)

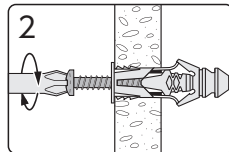

ネジをアンカーに途中まで差し込んだ後、PPEホルダーを挟んで一緒に締め付けてください。(インパクトドライバーを使用する際は、低速で確認しながら取り付けてください。)

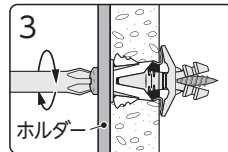

頭部までネジが入った後、さらにネジを5回転(目安)させてください。

アンカー仕様

〈ドリル径〉
6.0mm

〈最大引抜強度(石膏ボード)〉
 ・ 9.5mm厚ボード…16kgf
 ・ 12.5mm厚ボード…23kgf
 ・ 15.0mm厚ボード…32kgf
 ※適応壁厚8.5mm以上

〈対応可能な壁の種類〉
 ・ 石膏ボード
 ・ コンクリート
 ・ ALC板
 ・ 木材

〈使用上の注意〉

- PPEホルダー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け場所の強度・状態等を確認の上、設置してください。
- 素材の性質上、折り曲げた際に白濁することがありますが、製品強度への影響はありません。
- 変形の原因になりやすいため、高温や直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 本体が破損する恐れがあるため、ネジを強く締め過ぎないでください。
- 本体にひび割れ等が発生した場合は、新しいものと取り替えてください。
- アイウェアをホルダーに掛けている場合は、落下を防ぐため、取り外してからPPEの箱を交換してください。

〈【①マグネット】使用上の注意〉

- マグネットを使用する場合は、磁気の影響を受けやすい機器等の近くに設置しないでください。

- 磁力が強力なため、マグネット同士をくっつけないでください。また、マグネット単体を壁などにくっつけないでください。離せなくなる恐れがあります。

〈【②壁付ネジ】使用上の注意〉

- 壁内の配線や配管に注意して取り付けてください。
- コンクリート、ALC板、木材などの硬質壁に使用する際は、5%程度大きく下穴を開けて使用してください。
- 安全荷重は、最大引き抜き強度の1/4以下を目安としてください。
- 引抜強度は壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。
- インパクトドライバーを使用する際は、低速で確認しながら取り付けしてください。
- 壁を破損する恐れがあるため、必ずPPEホルダーと一緒に締め付けをしてください。
- 工具を使用する際はケガをしないよう注意し、必要に応じて安全防護具を着用してください。