


オオサキPPEホルダーソフト 2610T クリア 1個入

JANコード 品番 74611

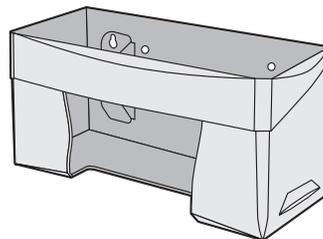

GS1-128



フリー 取り扱い説明書

< 内容物 >

- 本体 …… 1個


< 別売 >

- ① マグネット (品番74613) …… 2個
- ② 壁付ネジ (品番74614) …… 4本

※ 壁への取り付けは、別売の「①マグネット」「②壁付ネジ」のどちらかお好みのものを組み合わせてください。


※ 「②壁付ネジ」は4本入り(ネジ4本・アンカー4個)のため、本体2個分に使用できます。(本体1個に使用するネジは2本です。)

展開図

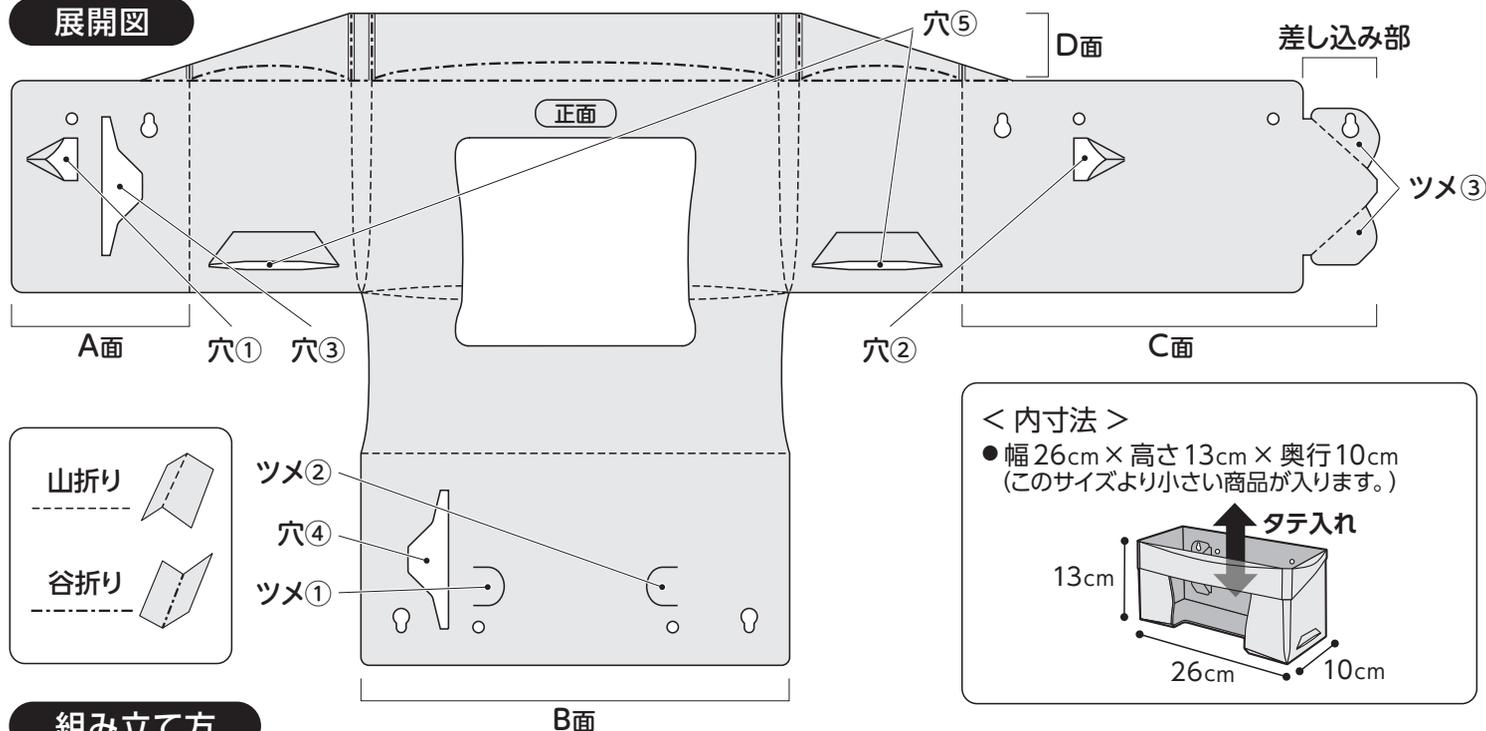


< 内寸法 >


- 幅 26cm × 高さ 13cm × 奥行 10cm (このサイズより小さい商品が入ります。)

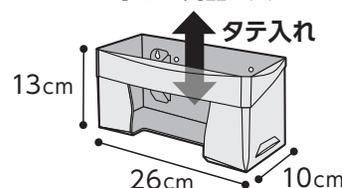


組み立て方

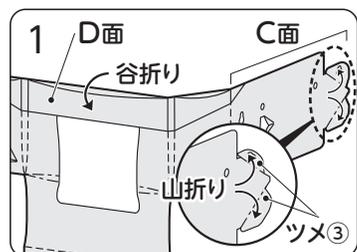


上図展開図の向きに開き、折り線に沿ってD面を谷折り、C面「ツメ③」を山折りします。

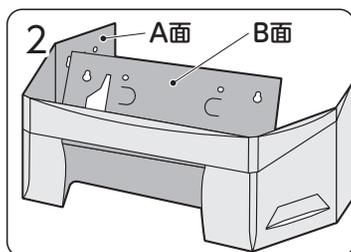


A面とB面を重ね合わせます。(A面が外側、B面が内側)

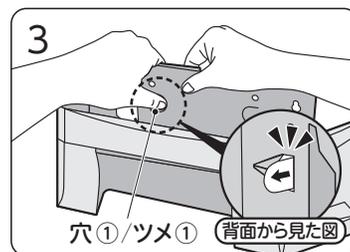

「穴①」と「ツメ①」を重ねて、「ツメ①」を指で奥まで押し込みます。「ツメ①」が背面から飛び出すまで押ししてください。

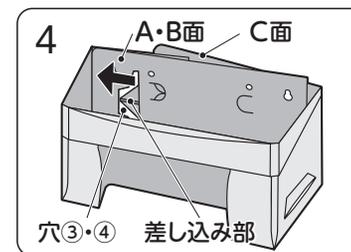

C面をA・B面に重ねて、手順1で折り曲げた「ツメ③」を押さえながら「差し込み部」を、A・B面の外側から「穴③・④」に差し込みます。

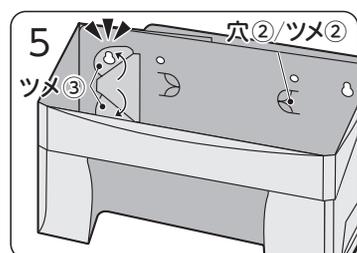

手前から「差し込み部」を引っ張り、「ツメ③」が飛び出すように広げます。手順3同様に「ツメ②」を「穴②」に押し込みます。



側面「穴⑤」に、アイウェアを掛けることができます。

PPEホルダーの詳しい情報は
こちら>>>
(組み立て動画あり)



本体材質:PP

日本製

132075-01
W235×H35×D480

Osaki
オオサキメディカル株式会社


名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812
ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>

お客様相談室 ☎ 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00 ※土・日、祝日を除く)

取り付け方は裏面にあります。>>>


取り付け方

【①マグネット】で固定する場合

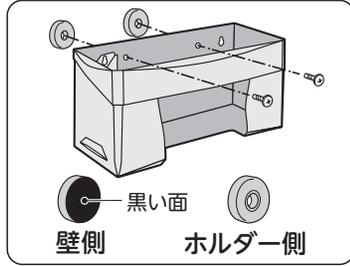


正面内側からネジを通し、背面からマグネットをドライバーで回し締めてください。マグネットは、黒い面を壁側にして取り付けてください。

〈ホルダーの外し方(マグネット)〉

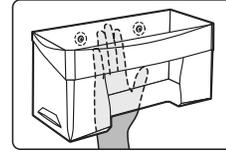

ホルダーと壁の隙間に手を入れ、手のひら全体でホルダーを手前に引っ張って外してください。
※磁力が強いため、無理に引っ張るとホルダーが破損する恐れがあります。

【②壁付ネジ】で固定する場合

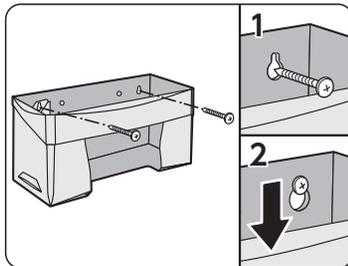


壁にネジを仮留めし、水平な位置を確認した後、本体を下にずらしてネジを増し締めします。


この用紙左部の⊕印を、仮留め位置の目安にできます。
(用紙を横向きにしてください。)

〈アンカー使用方法〉


直接ネジを締め付けることができない壁(石膏ボードが張ってある中空構造の壁など)にはアンカーを使用してください。

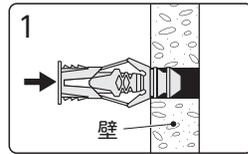

ドリルなどであらかじめ壁に6mmの下穴を空け、アンカーを差し込みます。入りにくい場合はハンマーで軽く叩いてください。(無理に叩くと壁が割れる場合があります。)

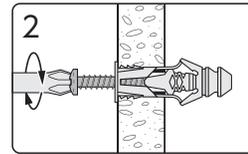


ネジをアンカーに途中まで差し込んだ後、PPEホルダーを挟んで一緒に締め付けてください。(インパクトドライバーを使用する際は、低速で確認しながら取り付けてください。)

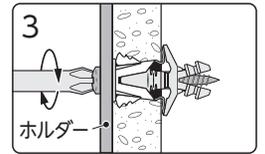

頭部までネジが入った後、さらにネジを5回転(目安)させてください。

取り付け穴(背面)

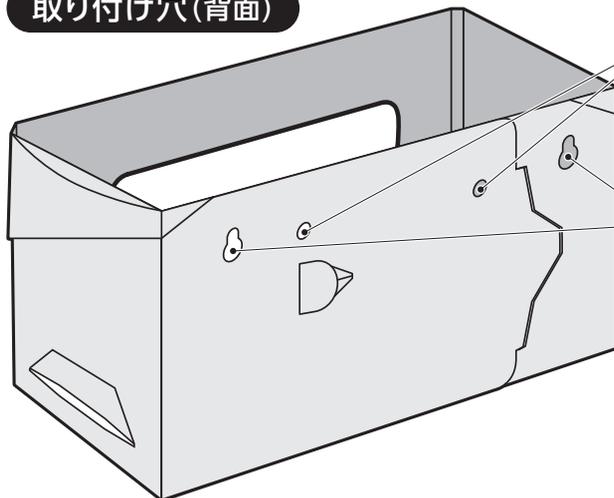

①マグネット

②壁付ネジ

アンカー仕様

〈ドリル径〉
6.0mm

〈最大引抜強度(石膏ボード)〉

- ・ 9.5mm厚ボード…16kgf
 - ・ 12.5mm厚ボード…23kgf
 - ・ 15.0mm厚ボード…32kgf
- ※適応壁厚8.5mm以上

〈対応可能な壁の種類〉

- ・ 石膏ボード
- ・ コンクリート
- ・ ALC板
- ・ 木材

〈使用上の注意〉

- PPEホルダー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け場所の強度・状態等を確認の上、設置してください。
- 素材の性質上、折り曲げた際に白濁することがありますが、製品強度への影響はありません。
- 変形の原因になりやすいため、高温や直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 本体が破損する恐れがあるため、ネジを強く締め過ぎないでください。
- 本体にひび割れ等が発生した場合は、新しいものと取り替えてください。
- アイウェアをホルダーに掛けている場合は、落下を防ぐため、取り外してからPPEの箱を交換してください。

〈【①マグネット】使用上の注意〉

- マグネットを使用する場合は、磁気の影響を受けやすい機器等の近くに設置しないでください。

- 磁力が強力なため、マグネット同士をくっつけないでください。また、マグネット単体を壁などにくっつけないでください。離せなくなる恐れがあります。

〈【②壁付ネジ】使用上の注意〉

- 壁内の配線や配管に注意して取り付けてください。
- コンクリート、ALC板、木材などの硬質壁に使用する際は、5%程度大きく下穴を開けて使用してください。
- 安全荷重は、最大引き抜き強度の1/4以下を目安としてください。
- 引抜強度は壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。
- インパクトドライバーを使用する際は、低速で確認しながら取り付けてください。
- 壁を破損する恐れがあるため、必ずPPEホルダーと一緒に締め付けをしてください。
- 工具を使用する際はケガをしないよう注意し、必要に応じて安全防護具を着用してください。

「②壁付ネジ」で取り付けられる場合は、この印を仮留め位置の目安にしてください。
(「用紙上部からネジ穴までの高さ」と「2本のネジ穴の距離」が実際のPPEホルダーと同じになっています。)