



エンゼルボックス 50


取り扱い説明書

< 内容物 >

- ① 本体 1枚
- ② フタ 1枚
- ③ 中敷き 1枚
- ④ 吸水・防水パッド (弱防水) 2枚
- ⑤ 掛け布団 (35cm×35cm) 1枚

< 本体寸法 >

- 幅54cm × 高さ23cm × 奥行27cm

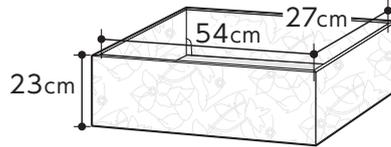

山折り




谷折り



② フタ


布団セット

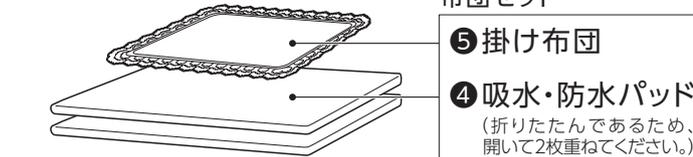

⑤ 掛け布団


④ 吸水・防水パッド

(折りたたんであるため、開いて2枚重ねてください。)

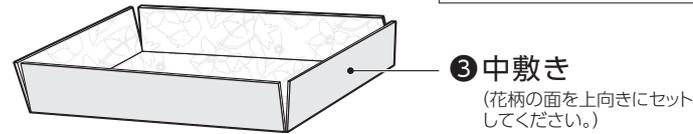


③ 中敷き

(花柄の面を上向きにセットしてください。)

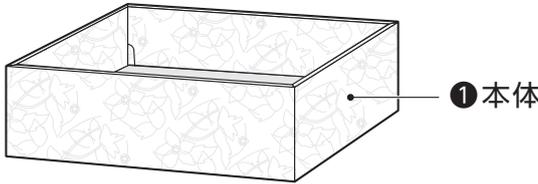


① 本体

本体 展開図

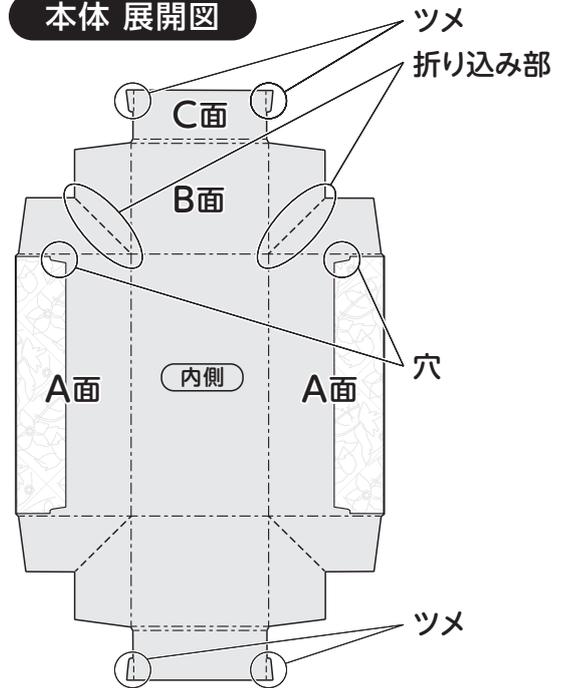


組み立て方 (①本体 / ②フタ 共通)

展開図の折り線に沿ってあらかじめ折り目を入れると、組み立てやすくなります。下記イラストは「①本体」です。

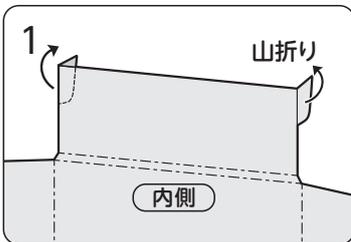


「ツメ」を山折りにします。

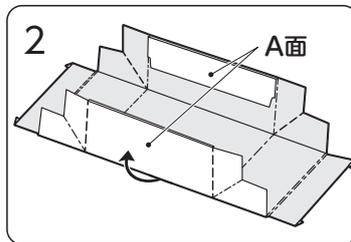


A面を折り線に沿って立ち上げます。



「折り込み部」を山折りにして、B面を立ち上げます。「折り込み部」にかぶせるように、C面を内側に折ります。

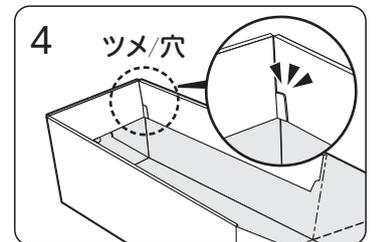

「ツメ」を「穴」にはめ込み、反対側も同様に折ります。

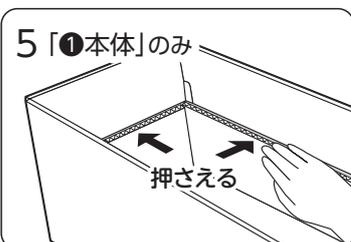

「③中敷き」を折り目に沿って立ち上げ、「①本体」にセットします。「③中敷き」の端を押さえて、「①本体」の隙間にぴったりとはめます。

〈使用上の注意〉

- 本体・フタは、くり返し折り曲げると破れる恐れがあります。
- 吸水・防水パッドは完全防水ではありません (弱防水)。体液などが多い場合は注意して使用してください。

エンゼルボックスの詳しい情報はこちら (組み立て動画あり)



オオサキメディカル株式会社

名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>

お客様相談室 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00 ※土・日、祝日を除く)

日本製

99900184-01
W1030×H755×D35