



看護・介護製品

介護ベッド用品

床ずれ防止やストレス軽減に 体圧除圧グローブ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

ベージュ

- +** グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
- +** 滑りやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
- +** やさしく除圧
ストレスを与えず拘縮^{こうしゆく}を予防



体圧の除圧や、背抜き、衣類の
しわ伸ばしに最適なグローブです。



体圧除圧グローブで、“ノーリフティングケア”を

“ノーリフティングケア”とは 被介護者を無理に持ち上げない・抱え上げない介護 のことです。

床ずれ予防

摩擦を軽減して除圧をすることで、床ずれを予防します。

こわしゆく※ 拘縮予防

持ち上げる・抱え上げるなどのストレスを与えないことで、拘縮を予防します。

腰痛予防

持ち上げずに除圧をすることで、介護者の腰痛を予防します。

※関節が硬くなり動かしにくくなった状態のこと。


商品特長

+ 1. 除圧に適した素材と形状

- フッ素加工を施した滑りやすい素材をグローブタイプにしているため、被介護者を無理に抱え上げることなく、手を滑らせるだけで簡単に除圧できます。

+ 2. 保管がかんたんな吊り下げループ付き

- ベッド周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。また、踏みつけによる介護者の転倒などのリスクを軽減します。

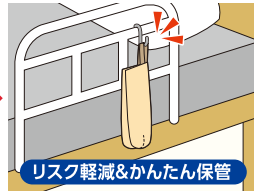

+ 3. ムレにくい通気口付き

- 2つの通気口が付いているため、グローブ内のムレを軽減できます。



+ 4. ズレにくいステッチ入り

- グローブの中央にステッチを入れているため、使用中に手がズレにくくなっています。

+ 5. 名前を記入できるネームタグ

- 洗濯タグに名前が記入できるため、専用品として使用できます。



+ 6. 使用方法を案内

- 包装箱のQRコードからアクセス(弊社ホームページ)していただくと、除圧・移動方法の動画や、商品の詳しい情報を見ることができます。




商品情報

■使用用途


- 体圧の除圧
- 背抜き、衣類などのしわ伸ばし

■使用方法

※詳細は上記QRコードから見るすることができます。

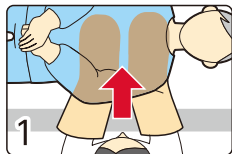


1 グローブをはめた両手を仰向けに寝た被介護者の背中の下に差し込みます。

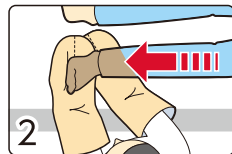

2 差し込んだ両手を被介護者の背中から足先までゆっくりと滑らせ、除圧します。

■規格

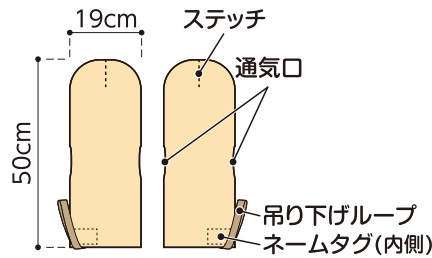

■素材

ポリエステル 100%

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード	
75172	PH 体圧除圧グローブ ベージュ 2枚入 19cm×50cm	販売単位	115 × 235 × 20	140.0g	40箱	タイアツシヨアツ B g	4971032751726
		外装	490 × 240 × 250	6.4kg		4 971032 751726	14971032751723

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。