

使い捨て 高吸収マット テープ付


プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 使い捨てタイプ
洗濯の手間がいらない
- + 吸収量1100mL
万一のモレもしっかり吸収
- + 6箇所の固定用テープ付き
しっかり固定できてズレにくい

吸収量 **1100mL**

介護用ベッドサイズ

60cm×90cm

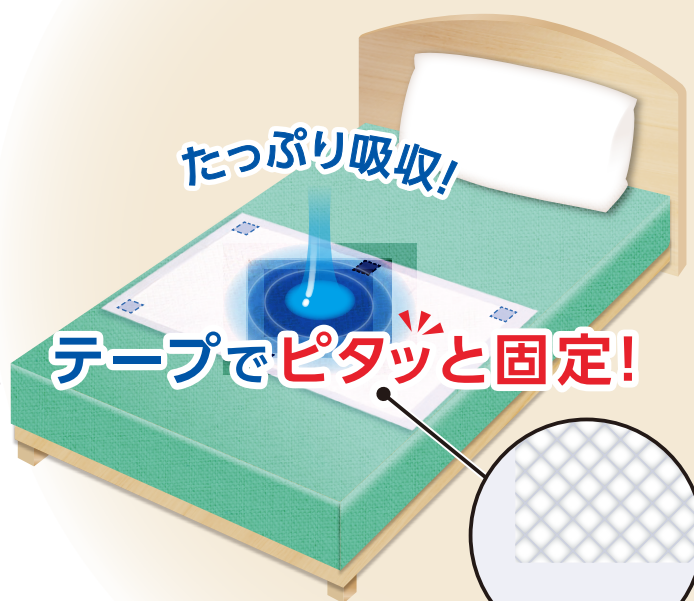

ダイヤ柄プレスに沿って
素早く拡散・吸収

ズレ止めテープでしっかり固定ができる
洗濯の手間が不要な使い捨て防水マットです。

PH 使い捨て高吸収マット テープ付



看護・介護製品

介護ベッド用品

商品特長


+ 1.洗濯の手間がいない

- 使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。


+ 2.万一のモレもしっかり吸収

- 高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。
- オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。

断面図

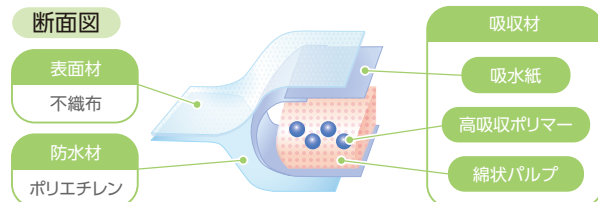

- ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。

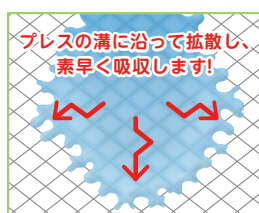

※拡散のイメージ

+ 3.しっかり固定できてズレにくい

- 6箇所での固定用テープ付きのため、シーツとマットがズレにくく、しわになりにくいです。

+ 4.汚れが下にモレない

- 裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。

+ 5.逆戻りが少なく、さらさら長続き


- 吸収後は逆戻りせず、さらとした表面状態を保ちます。

+ 6.ぬれても破れにくい


- 丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。

商品情報


■使用方法

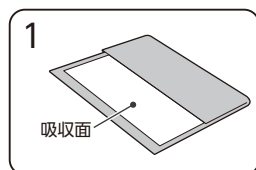

吸収面を上にして、マットを完全に開きます。図のように片側半分を軽く畳みます。

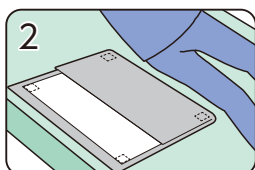

使用者を横向きに寝かせて、お尻がマットの中央に乗るようにマットを敷き、4箇所のテープを固定します。


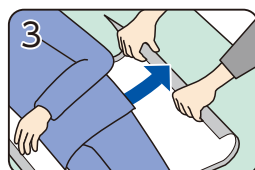


使用者をゆっくり反対側に向け、身体の下からマットを引き出します。



引き出したマットを広げ、残り2箇所のテープを固定します。

■製品仕様

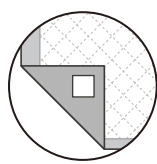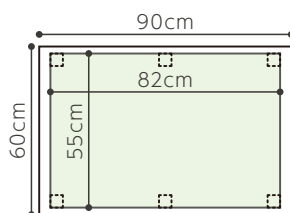


固定用テープ
(裏面 6箇所)

- ・セミシングルベッド、シングルベッド、介護用ベッド (83cm、91cm、100cm幅) に対応

■素材

表面材: ポリプロピレン
ポリエチレン
吸収材: 吸水紙
高吸収ポリマー
綿状パルプ
防水材: ポリエチレン

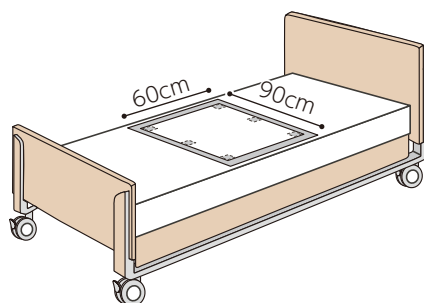

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録名・略称/JANコード	JANコード/ITFコード
75155	PH 使い捨て高吸収マット テープ付 6090 6枚入 60cm×90cm	販売単位 210 × 220 × 75 外装 485 × 450 × 425	380.0g 10.5kg	24袋	コウキョクシヨク6090テープ 4 971032 751559	4971032751559 14971032751556

■製造国: 中国

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://plus-ph.com>



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

2025.09

使い捨て 高吸収マット テープ付


プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 使い捨てタイプ
洗濯の手間がいらない
- + 吸収量2000mL
万一のモレもしっかり吸収
- + 6箇所固定用テープ付き
しっかり固定できてズレにくい

吸収量 **2000mL**

安心の大きめサイズ

80cm×120cm

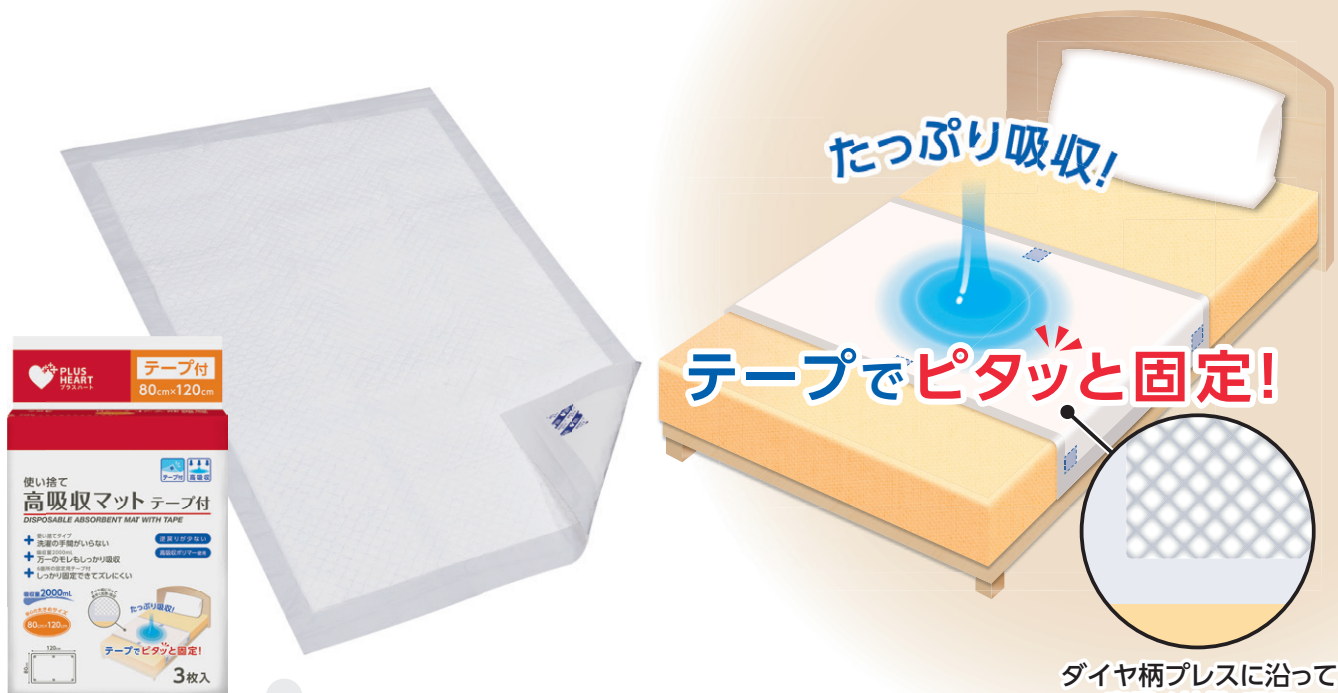

ダイヤ柄プレスに沿って
素早く拡散・吸収

ズレ止めテープでしっかり固定ができる
洗濯の手間が不要な使い捨て防水マットです。

PH 使い捨て高吸収マット テープ付



看護・介護製品

介護ベッド用品

商品特長


+ 1.洗濯の手間がいない

- 使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。


+ 2.万一のモレもしっかり吸収

- 高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。
- オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。

断面図

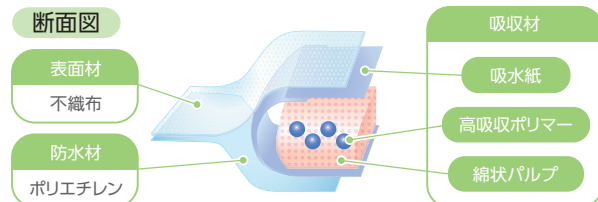

- ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。

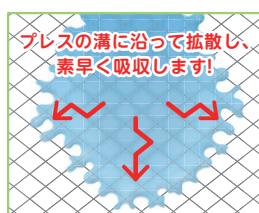

※拡散のイメージ

+ 3.しっかり固定できてズレにくい

- 6箇所の固定用テープ付きのため、シートとマットがズレにくく、しわになりにくいです。



+ 4.汚れが下にモレない

- 裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。

+ 5.逆戻りが少なく、さらさら長続き


- 吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。

+ 6.ぬれても破れにくい


- 丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。

商品情報


■使用方法

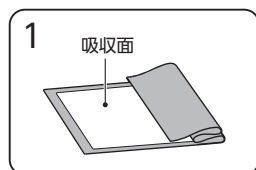


吸収面を上にして、マットを完全に開きます。図のように片側半分を軽く畳みます。

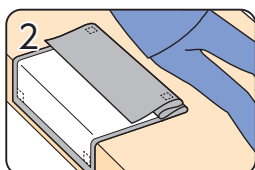

使用者を横向きに寝かせて、お尻がマットの中央に乗るようにマットを敷き、4箇所のテープを固定します。


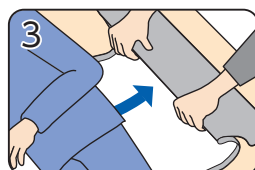


使用者をゆっくり反対側に向け、身体の下からマットを引き出します。

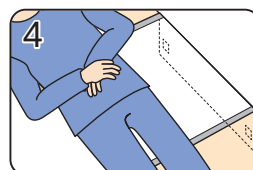


引き出したマットを広げ、残り2箇所のテープを固定します。

■製品仕様

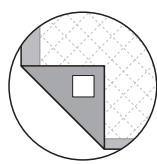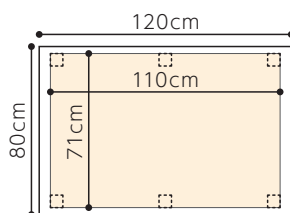

固定用テープ
(裏面 6箇所)

・セミシングルベッド、シングルベッド、介護用ベッド
(83cm、91cm、100cm幅)に対応

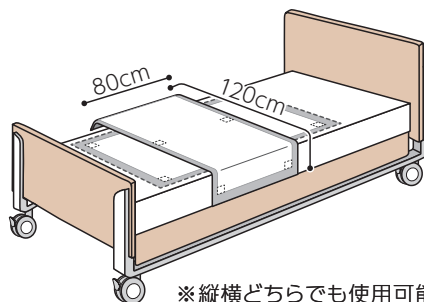

※縦横どちらでも使用可能

■素材

表面材: ポリプロピレン
ポリエチレン
吸収材: 吸水紙
高吸収ポリマー
綿状パルプ
防水材: ポリエチレン

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
75154	PH 使い捨て高吸収マット テープ付 80120 3枚入 80cm×120cm	販売単位 160 × 205 × 90 外装 620 × 410 × 320	360.0g 9.8kg	24袋	コウキユウシヨウ8011207 4 971032 751542	4971032751542 14971032751549

■製造国:中国

◇ 商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://plus-ph.com>



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

2026.04