



肘までしっかりカバーする 使い捨て介護用手袋 ロング

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

透明

- +** 全長58cm
肘までカバー
- +** ゴム袖付
水回り作業に最適
- +** 内側エンボス加工
肌への張り付きを軽減

ズレにくく
水が入りにくい!
ゴム袖



全長58cm
肘までカバー



入浴介助やシーツの手洗い時などに最適な
ロングタイプの使い捨て手袋です。



商品特長

+ 1.肘までしっかりカバー

- 全長58cmのロングタイプで、肘までしっかり覆うことができ、汚染や感染から医療従事者を守ります。

+ 2.ズレ落ちにくいゴム袖付き

- 袖にゴムが付いているため、ズレ落ちにくくなっています。
- ゴム袖がしっかりと締まるため、飛散する水や汚物が手袋の中に入りにくくなっています。

+ 3.肌への張り付きを軽減

- 内側にエンボス加工を施しているため、手袋の中で指がズレにくく、汗による肌への張り付きを軽減します。



+ 4.清潔に保管できるパッケージ

- 箱正面の開封口を閉めることで、清潔に保管ができます。
- “オオサキ PPEホルダー ソフト” (別売) を使用すると、壁などに取り付けられます。



清潔に保管が可能!



壁に取り付け可能!

+ 5.食品衛生法適合*

- 食品衛生法に適合しているため、調理場や水回り作業時など、多目的に使用できます。*厚生省告示370号


商品情報

■使用用途

部署	用途
病棟	入浴介助時に/シーツの手洗い時に/おむつ交換時に/洗髪時に/陰部洗浄時に/疥癬患者のケア時に/体位変換用グローブの下履きに
中央材料室	器材の洗浄時に
透析室	フットケア(足浴)時に
産婦人科	沐浴時に/おむつ交換時に
その他	調理場での作業時に/シャワー時の点滴刺入部や傷口のカバーに/汚物処理や水回り作業時に


■着脱方法

着け方

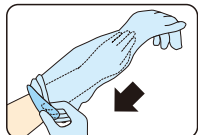

手を入れ、袖口の部分をつかんで肘まで上げて装着します。


外し方

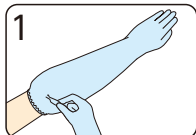

1 片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。



2 手袋を裏返すように外します。

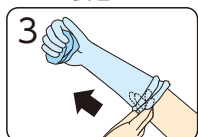

3 手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




4 汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に脱いだ手袋を包み込みます。



5 外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

■規格

手のひらの幅14cm

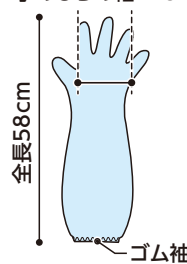

■素材

本体: ポリエチレン
ゴム袖: 天然ゴムラテックス (肌に直接触れる部分には使用していません)

関連商品

手袋ロングと合わせて使用すると便利です!



素早くかんたん着脱 入浴介助用エプロン

- かぶりタイプで素早く着脱できる入浴介助用のエプロンです。
- 紐などを結ぶ手間がなく、簡単に着脱できるため、入浴される方を待たせず、介助ができます。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
70207	使い捨て介護用手袋 ロング 透明 フリー 30枚入 手のひらの幅14cm×58cm	販売単位	220 × 80 × 130	225.0g	20箱	4971032702070
		外装	540 × 240 × 420	5.0kg		14971032702077

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。