

口腔ケア用 マウスポンジ®

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + 特殊形状スポンジで
お口のすみずみまでキレイ!
- + 2種類の軸・素材・スポンジサイズ
患者・用途に合わせて選べる!

プラ軸

強化紙軸



看護・介護製品



看護・介護製品

オーラルケアプロダクツ

オーラルケアプロダクツ



小さめサイズが
ソフトな素材
になりました!

特殊形状スポンジで
お口のすみずみまでキレイ!



商品情報

製品サイズ

プラ軸: 15.7cm 強化紙軸: 15.3cm

実物大(プラ軸)

ふつうサイズ

2.5cm

1.7cm

小さめサイズ

2cm

1.4cm

素材

スポンジ: ウレタン プラ軸: ポリプロピレン 強化紙軸: 紙

関連商品



口腔化粧品

口腔用保湿ジェル マウスモイスト

- 保湿と塗りやすさにこだわった、口腔用保湿ジェルです。
- 刺激の少ないノンアルコールです。
- 毎日のケアにも使いやすいワンタッチキャップです(72g入)。



口腔化粧品

口腔用保湿スプレー マウスミスト

- うるおいを実感できる、高粘度の口腔用保湿スプレーです。
- ヒノキチオールを配合しています。
- グルタミン酸Naを配合しているため、唾液の分泌を補助します。

ソーダの香り

無香料

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称・JANコード	JANコード・ITFコード
74401	マウスポンジ® プラ軸ふつう 1本入(10袋) スポンジ幅1.7cm×15.7cm	販売単位	115 × 245 × 25	25.0g	10個 × 12箱	マウスホ®フ®ラ フツウ10 4971032744018
		内装	280 × 220 × 120	280.0g		24971032744012
		外装	574 × 462 × 376	4.2kg		—
74402	マウスポンジ® プラ軸ふつう 1本入(50袋) スポンジ幅1.7cm×15.7cm	販売単位	200 × 120 × 150	191.0g	24箱	マウスホ®フ®ラ フツウ50 4971032744025
		外装	618 × 385 × 414	5.4kg		—
						—
74403	マウスポンジ® プラ軸ふつう 1本入(300袋) スポンジ幅1.7cm×15.7cm	販売単位	330 × 180 × 270	960.0g	4箱	—
		外装	685 × 385 × 285	4.6kg		4971032744032
						—
74411	マウスポンジ® 紙軸ふつう 1本入(10袋) スポンジ幅1.7cm×15.3cm	販売単位	115 × 245 × 25	25.0g	10個 × 12箱	マウスホ®カミ フツウ10 4971032744117
		内装	280 × 220 × 120	280.0g		24971032744111
		外装	574 × 462 × 376	4.2kg		—
74412	マウスポンジ® 紙軸ふつう 1本入(50袋) スポンジ幅1.7cm×15.3cm	販売単位	200 × 120 × 150	191.0g	24箱	マウスホ®カミ フツウ50 4971032744124
		外装	618 × 385 × 414	5.4kg		—
						—
74413	マウスポンジ® 紙軸ふつう 1本入(300袋) スポンジ幅1.7cm×15.3cm	販売単位	330 × 180 × 270	960.0g	4箱	—
		外装	685 × 385 × 285	4.6kg		4971032744131
						—
74417	マウスポンジ® プラ軸小さめソフト 1本入(10袋) スポンジ幅1.4cm×15.3cm	販売単位	115 × 245 × 25	23.6g	10個 × 12箱	マウスホ®フ®ラ チライサ×10 4971032744179
		内装	280 × 220 × 120	266.0g		24971032744173
		外装	574 × 462 × 376	4.0kg		—
74418	マウスポンジ® プラ軸小さめソフト 1本入(50袋) スポンジ幅1.4cm×15.3cm	販売単位	200 × 103 × 150	180.0g	24箱	マウスホ®フ®ラ チライサ×50 4971032744186
		外装	618 × 334 × 414	5.2kg		14971032744183
						—
74419	マウスポンジ® プラ軸小さめソフト 1本入(300袋) スポンジ幅1.4cm×15.3cm	販売単位	330 × 180 × 270	878.5g	4箱	—
		外装	685 × 385 × 285	4.3kg		4971032744193
						—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

特殊形状スポンジで汚れを徹底除去！ 口腔内の状態に合わせて『軸』『素材』『スポンジサイズ』を選べます！

+1. すみずみまでキレイ

- 特殊形状スポンジでしっかり汚れをかき取ります。
- 先端カーブで、狭い隙間でもスムーズに入ります。

ギザギザ部		歯の表面、歯茎、口蓋の汚れをクルクル回してからめ取ります。	
フラット部		舌についた舌苔を、前後にこすって除去します。	
先端部		先端カーブで、狭い隙間の汚れもかき出します。	

《使用方法》

1. ケア前の準備

《口唇の湿潤》

乾燥した状態で無理に開口すると出血の恐れがあるため、マウスポンジで、**湿潤ジェル**や**ミスト**を塗り、湿潤させます。



《汚れの前処理》

フラット部に湿潤ジェルをのせ、「**汚れ**」や「**前回のケアで塗布して硬化したジェル**」に塗り、柔らかくします。



2. 口腔ケア時(口腔粘膜の清掃)

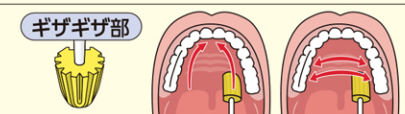
《歯の外側の清掃》

ギザギザ部や先端部を使用し、上下左右の歯茎と頬粘膜を奥から手前に拭き取ります。



《歯の内側の清掃》

ギザギザ部を回転させるように、**上あごを奥から手前、左右にこすりながら拭き取ります。**舌と歯の間を奥から手前に向かって拭き取ります。



《舌の清掃》

フラット部を使用し、舌の奥から手前へ「**川**」の字を書くように軽く拭き取ります。



3. ケア後の湿潤

《湿潤ジェルの塗布》

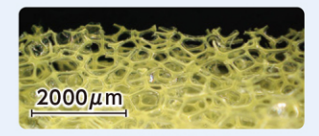
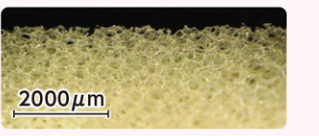
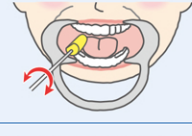
湿潤ジェルをフラット部にのせ、**口腔内、口唇に薄く広く塗布**します。



- 適宜マウスポンジを水で洗い、キレイな状態で使用してください。

+2. 開口状態で選べるスポンジサイズ 口腔内の状態で選べる素材

《サイズ別の使い分け》

種類	ふつうサイズ	小さめサイズ
スポンジサイズ		
スポンジの素材特長	● 適度なキメ細かさでかきとり性に優れる  スポンジ拡大図	● ふつうサイズよりキメが細かなめらか ● やわらかく、粘膜への刺激や痛みを与えにくい  スポンジ拡大図
対象患者	● 食渣や口臭があるなど、口腔ケアを要する方	● 口を開けにくい方 ● 口腔内が傷んだ方 ● 人工呼吸器を装着されている方 ● 小児
開口状態	● オーラルワイダー※1などを使いながら、口腔ケアを受けられる 	● 口角や口唇が荒れていたり、開口筋の機能不全などにより、口を大きく開けられない 
口腔内の状態	● 口腔粘膜に異常がない ● 食渣や汚れはあるが、通常の口腔ケアを受けられる	● 口腔乾燥が見られる ● 多数出血している ● 以下の部位に口腔粘膜炎が見られる  唇の裏側 頬の内側 舌の周囲

※1：口を大きく開くための開口器。視野が広がり、口腔ケアが行いやすくなる。

《使用した看護師さん、言語聴覚士さん、歯科衛生士さんの声》

ふつうサイズ

かきとり性が良いからしっかり汚れが取れるね！

小さめサイズ

キメが細かくて粘膜にやさしいから、患者さんが「ケア中の感覚がすごく良い」と喜んでたよ！

スポンジが小さいから視野が確保できてとても良いね！

+3. 目的にあわせて 選べる軸素材

《特長》

プラ軸	強化紙軸 (ふつうサイズのみ)
● 柔らかく曲がるため、 ・折れにくい ・粘膜に強く当たりすぎない ・口蓋弓などの湾曲部の汚れを取りやすい ・口腔内の奥の方までアプローチしやすい ● 水に強い	● しなりにくいため、 ・操作性に優れ、汚れの付着位置を正確に擦れる ・口腔前庭や舌の裏側など、狭いところの汚れを取りやすい ● 強化紙軸のため、1回の口腔ケア中に大きく劣化しない ● 紙素材のため、単回使用が徹底しやすい

+4. 湿潤ジェルが 塗布しやすい

- スポンジのフラット部に湿潤ジェルをのせることができ、塗布しやすくなっています。



+5. 口腔内の状態が わかりやすい

- スポンジが黄色のため、出血の有無を確認しやすくなっています。