

シャント肢用アームカバー

肌にやさしいアームカバー



シャントを締めつけず、低刺激で
やさしく保護できるアームカバーです。



商品特長

1 締めつけずにズレにくい

- ソフトフィット設計で、シャツを締めつけることなくやさしく保護できます。

2 低刺激でやさしい肌触り

- シルク配合のなめらかな仕上げで、しっとりやさしい肌触りです。



3 手の甲まで覆える

- 指穴を開けると手の甲まで覆えるため、親指付近のシャツにも対応できます。

4 高いUVカット性能(UPF50+ / UVカット率98%以上)

- 肌を紫外線からしっかりブロックします。

5 抗菌防臭加工


- 細菌の増殖を抑制し、汗などが原因で発生する臭いを防ぐ効果が期待できます。



商品情報


■着用方法

■手首から上を覆う場合

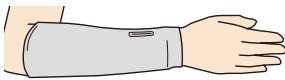

指穴がある方を指先側にして着用します。

■手の甲を覆う場合

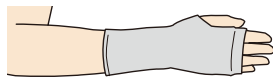


下記の手順で指穴を開けて、親指を指穴に通して着用します。

■指穴の開け方



指穴を真ん中から半分に折りたたみ、ハサミで切り込みを入れます。

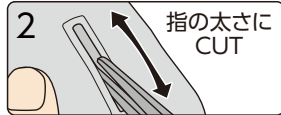

指の太さに合わせてカットします。


■素材

レーヨン77%、ナイロン15%、絹5%、ポリウレタン3%

■バリエーション

種類	サイズ	規格	カラー
ロング	フリーサイズ	8cm×44cm	ブラック/ ライトグレー/ ベージュ
ショート		8cm×22cm	

■規格

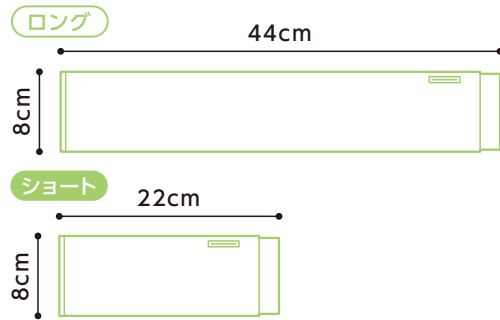

商品規格

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称・JANコード	JANコード / ITFコード
	75309	肌にやさしいアームカバー ロング フリー ブラック 2枚入 8cm×44cm	販売単位 105 × 180 × 25	66.4g	10個 × 8箱	アームカバー・ロング・F・Bk	4971032753096
			内装 215 × 185 × 130	732.8g			—
			外装 550 × 215 × 445	6.5kg		4 971032 753096	—
	75310	肌にやさしいアームカバー ショート フリー ブラック 2枚入 8cm×22cm	販売単位 105 × 180 × 25	45.8g	10個 × 8箱	アームカバー・ショート・F・Bk	4971032753102
			内装 215 × 185 × 130	526.8g			—
			外装 550 × 215 × 445	4.9kg		4 971032 753102	—
	75311	肌にやさしいアームカバー ロング フリー ライトグレー 2枚入 8cm×44cm	販売単位 105 × 180 × 25	66.4g	10個 × 8箱	アームカバー・ロング・F・Lg	4971032753119
			内装 215 × 185 × 130	732.8g			—
			外装 550 × 215 × 445	6.5kg		4 971032 753119	—
	75312	肌にやさしいアームカバー ショート フリー ライトグレー 2枚入 8cm×22cm	販売単位 105 × 180 × 25	45.8g	10個 × 8箱	アームカバー・ショート・F・Lg	4971032753126
			内装 215 × 185 × 130	526.8g			—
			外装 550 × 215 × 445	4.9kg		4 971032 753126	—
	75313	肌にやさしいアームカバー ロング フリー ベージュ 2枚入 8cm×44cm	販売単位 105 × 180 × 25	66.4g	10個 × 8箱	アームカバー・ロング・F・Bg	4971032753133
			内装 215 × 185 × 130	732.8g			—
			外装 550 × 215 × 445	6.5kg		4 971032 753133	—
	75314	肌にやさしいアームカバー ショート フリー ベージュ 2枚入 8cm×22cm	販売単位 105 × 180 × 25	45.8g	10個 × 8箱	アームカバー・ショート・F・Bg	4971032753140
			内装 215 × 185 × 130	526.8g			—
			外装 550 × 215 × 445	4.9kg		4 971032 753140	—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オンラインサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。