

# 摩擦を軽減し床ずれ予防に スライディングシート

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

ベージュ

- +** 滑りやすいシート  
スムーズな移動で床ずれ防止
- +** 抱え込まずに移動  
ストレスを与えず拘縮<sup>こうしゆく</sup>を予防
- +** 持ち上げずにらくらく移動  
介護者の腰痛予防に



体位変換やベッド上での移動を  
サポートする筒状のシートです。



## スライディングシートで、“ノーリフティングケア”を

“ノーリフティングケア”とは 被介護者を無理に持ち上げない・抱え上げない介護 のことです。

### 床ずれ予防

摩擦を軽減することで、床ずれを予防します。

### こわしゆく※ 拘縮予防

持ち上げる・抱え上げるなどのストレスを与えないことで、拘縮を予防します。

### 腰痛予防

持ち上げずに除圧をすることで、介護者の腰痛を予防します。

※関節が硬くなり動かしにくくなった状態のこと。

## 商品特長

### + 1. 滑りやすく敷きやすい素材と形状

- フッ素加工を施した滑りやすい素材のシートを筒状にしているため、被介護者を無理に抱え上げることなく、スムーズな移動ができます。
- 筒状になっているため、シート同士を合わせる手間が省け、簡単に準備ができます。

### + 2. 保管がかんたんな吊り下げループ付き

- ベッド周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。また、踏みつけによる介護者の転倒などのリスクを軽減します。



踏みつけによる転倒




リスク軽減&かんたん保管

### + 3. 選べるシートサイズ

- 被介護者の体力にあわせてシートのサイズを選ぶことができます。


#### ふつうサイズ

自分で腰を上げられない方むけ  
頭・肩・お尻が乗るようシートを敷いて使用します。

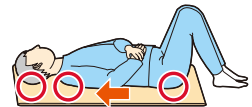

#### 小さめサイズ

自分で腰を上げられる方むけ  
頭・肩が乗るようシートを敷いて使用します。

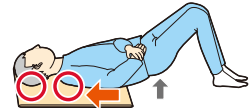

### + 4. 使用方法を案内

- 包装箱のQRコードからアクセス(弊社ホームページ)していただくと、使用方法の動画や、商品の詳しい情報を見ることができます。






## 商品情報

### ■使用用途

- ベッド上での身体移動・体位変換

### ■使用方法

※詳細は上記QRコードから見ることができます。

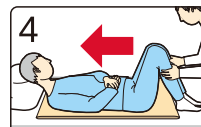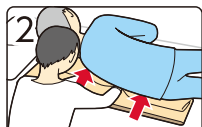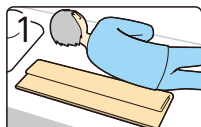


横向きに寝かせ、3つ折りにしたシートを頭からお尻まで乗るように敷きます。

再度仰向けに寝かせ、シートをベッド全体に広げるように身体の下から引き出します。

ひざを立て、両手で頭側へ押し出し、シートを滑らせて身体を移動させます。

### ■規格

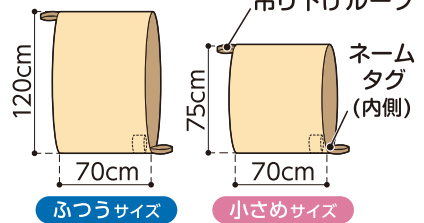

### ■素材

ポリエステル 100%

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
75171	PH スライディングシート ふつうサイズ ページュ 1枚入 70cm×120cm	販売単位   115 × 235 × 35	100.0g	40個	スライディングシート 887719	4971032751719
		外表   490 × 390 × 250	4.8kg		4 971032 751719	—
75170	PH スライディングシート 小さめサイズ ページュ 1枚入 70cm×75cm	販売単位   115 × 235 × 35	60.0g	40個	スライディングシート 887719	4971032751702
		外表   490 × 390 × 250	3.2kg		4 971032 751702	—

◇商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
http://plus-ph.com



PLUS HEART  
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。