


商品情報

■使用方法

舌をジェルなどで湿らせてからブラシをやさしく当ててください。
舌の奥から手前へ“川”の字を書くように“3～5回程度”軽く拭き取ります。

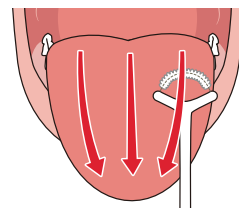


ポイント

- 舌苔を一度に全てを取り切ろうとせず、数日かけて少しずつ取るようにします。
- 奥から手前に引くことで、舌苔を口腔内の奥に押し込むことなくかき出すことができます。
- 舌ブラシを強く押し付けないように注意してください(100g以下の圧力で)。
- 何度もこすらないでください。
- 舌清掃は1日1回としてください。
- 分界溝*の手前に最も舌苔がたまりやすくなります。
- 分界溝の奥の舌扁桃には細かな有郭乳頭(味蕾が多数ある重要な組織)があるため、清掃しないでください。
- 人工呼吸器 装着患者の舌清掃は2人で実施してください。

分界溝の奥までは
清掃しない



■規格

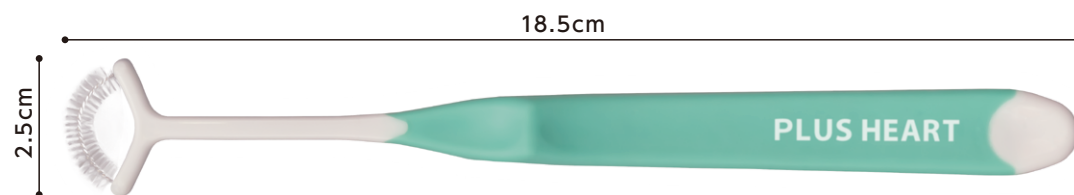

■素材

本体:PP ラバー:TPE 毛:ナイロン

使用上の注意事項

- ⚠ 塩素系殺菌剤、漂白剤、熱湯での消毒はできません。
- ⚠ 破断する恐れがあるため、ワイヤーを曲げないでください。

関連商品

口腔ケア用
マウスポンジ®

幅広い用途に使用できる
ふつう
サイズ
狭い隙間にも入りやすい
小さめ
サイズ

- 特殊形状スポンジで、隅々まできれいに口腔ケア用スポンジです。
- 先端カーブで、狭い隙間でもスムーズに入ります。
- 開口状態や用途に合わせて、2種類のヘッドサイズから選べます。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称・JANコード	JANコード・ITFコード
74422	PH 舌ブラシ グリーン 1本入 2.5cm×18.5cm×0.5cm	販売単位 50×255×16	17.0g	12個 × 6箱		4971032744223
		内装 110×260×75	250.0g			24971032744227
		外装 350×275×170	1.7kg			14971032744220

■製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://plus-ph.com>



PLUS HEART
ブランドサイト

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

2025.10

プロフェッショナルケア用
舌ブラシ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- + コンパクトヘッド
開口が困難な方にも使える
- + 極細毛使用
舌乳頭の間もきれいに
- + ペンシル持ちしやすい持ち手
やさしく汚れを除去



舌を傷つけにくく、やさしく汚れを除去する
極細ナイロン毛の舌ブラシです。




プロフェッショナルケアのための舌ブラシ

Q. 要介護者・患者の舌清掃はなぜ必要？

**A. 誤嚥性肺炎や
VAP※予防のためです。**

食べかすや口腔内細菌により形成される舌苔を除去することで、肺や気管に細菌が入るリスクを軽減します。

※人工呼吸器関連肺炎

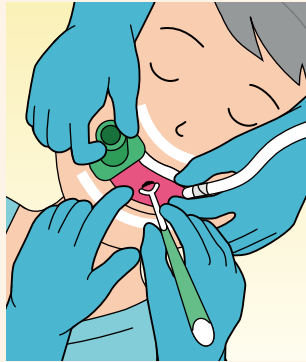


舌清掃における
「プロフェッショナルケア」と
「セルフケア」の違い

	プロフェッショナルケア	セルフケア
対象者	患者・要介護者	健常者
舌環境	悪い	良い
目的	• VAP、誤嚥性肺炎予防（口腔内細菌の減少） • 口腔機能の維持、回復 • QOLの維持、向上	口臭予防
実施者	専門職の方 (医師、歯科医師、看護師、ST、歯科衛生士)	本人


+1. 開口が困難な方にも使える

- 幅25mm、厚さ5mmのコンパクトヘッドのため、大きく開口できない方や挿管中の方の舌清掃がしやすいです。

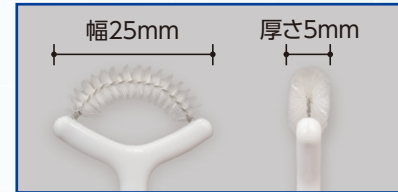

+2. 舌乳頭の間もきれいに


舌表面の微細構造(断面図)

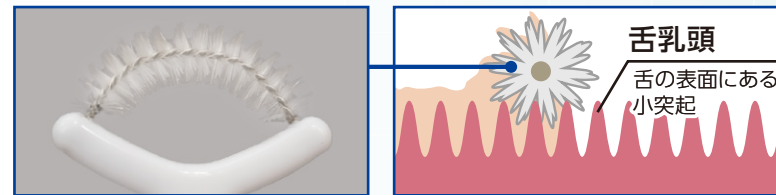

- 極細毛を使用しているため、舌乳頭の間に入り込み、汚れをかき出します。


+3. やさしく汚れを除去

しなやかネック

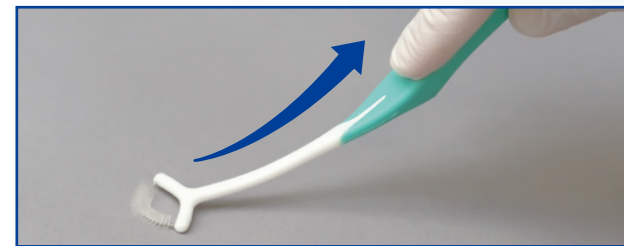

- 柔らかく適度になる“しなやかネック”のため、舌に力がかかり過ぎず、やさしく汚れを除去します。

ペンシル持ちしやすい持ち手

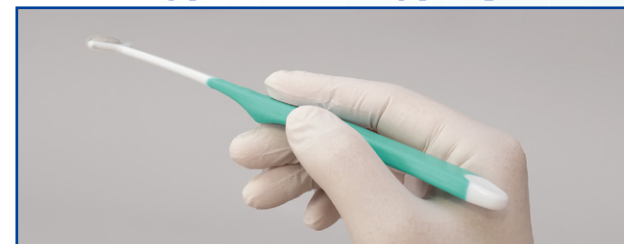

- ペンシル持ち(ペングリップ)しやすい持ち手のため、手の上で安定し、ムダに力を入れずに舌清掃を行えます。


+4. 清潔に管理できる



- 変色しにくいナイロン毛を使用しているため、使用後に流水で洗い流すだけで清潔に管理できます。

衛生的に使用いただくため、30日を目安に取り替えてください。

+5. 噛まれにくい

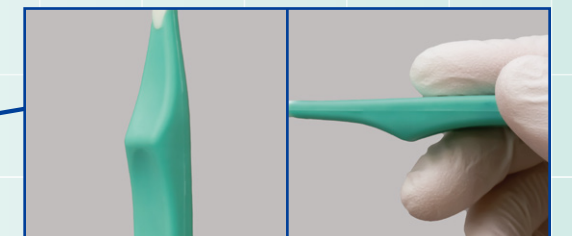

- 持ち手にはストッパーを設けてあるため、指を噛まれにくいです。
- 持ち手の長さを十分に設けてあるため、手指の大きな看護・介護者でも安心して舌清掃を行えます。

