




ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

滅菌ポート用ワイパー

# エンドワイパーX®

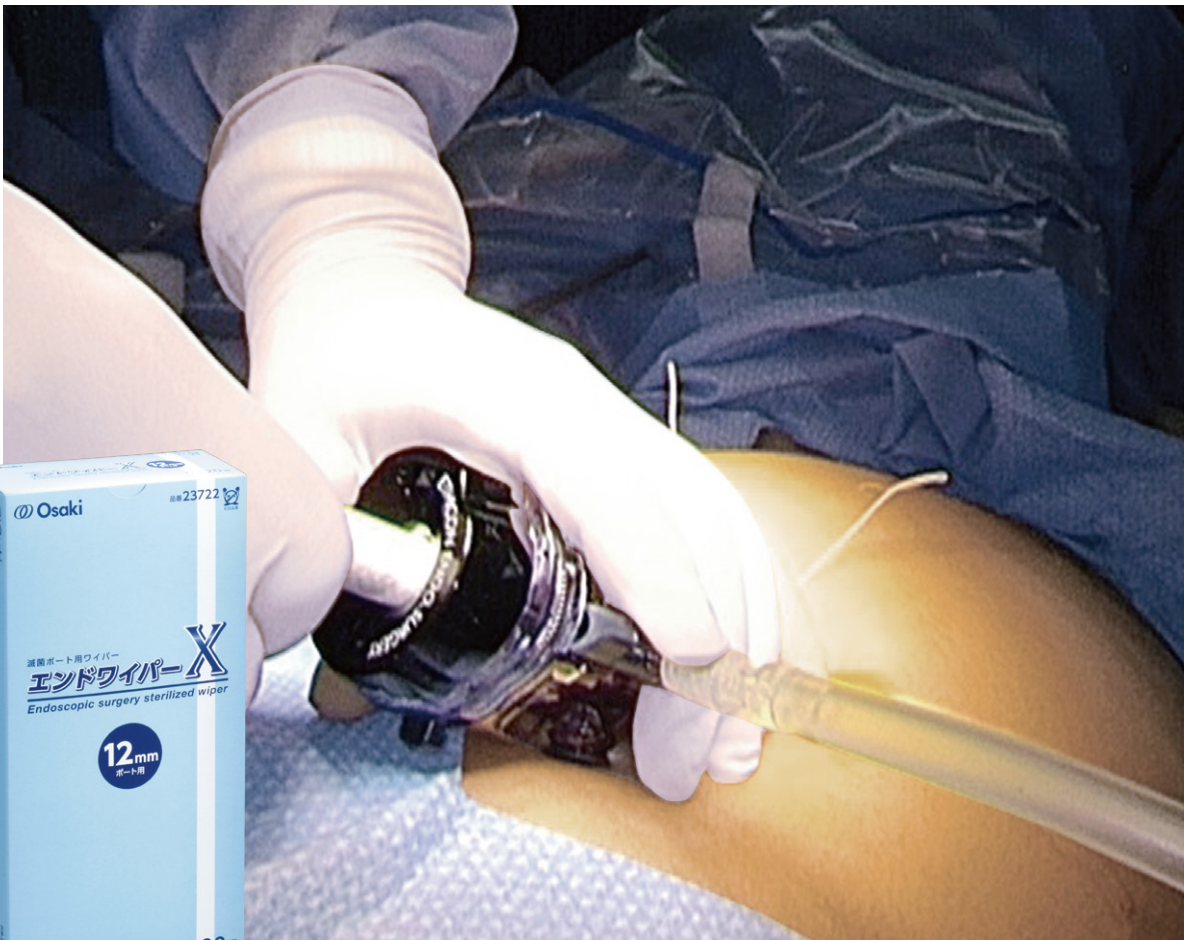

ポート内腔の汚れを簡単に除去して  
カメラ再挿入時の汚染を防ぐワイパーです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

## 商品特長

### 1 ワンショットで除去

- カメラポート内腔の汚れをワンショットで除去し、再挿入したカメラに汚れが付着することを防止します。

### 2 優れた吸収力

- 吸収性に優れているため、ポート内腔の血液をしっかり吸収します。

### 3 高いリントフリー性

- リントフリー性の高い素材を使用しているため、脱落繊維がほとんどありません。

### 4 柔らか素材


- 柔らかい不織布素材のため、万一臓器と接触した場合でも、臓器を傷つけにくくなっています。

### 5 X線造影糸入り


- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。

## 商品情報


### ■使用方法

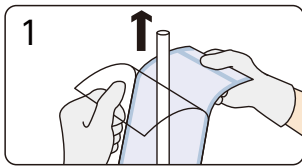


滅菌バッグから清潔に取り出します。

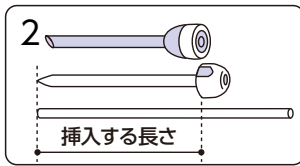

トロッカー内筒の長さから挿入する長さの目安を測ります。

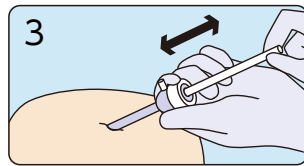


2で測った長さを目安にして、トロッカーに差し込み、2~3度上下させて、内腔の血液などを拭き取ります。

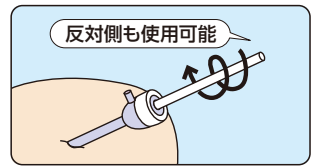

※回転させながら差し込むと、効果的に拭き取れます。  
※反対側も使用することができます。

※8mmポート用シース付は、製品に同梱の取扱説明書を読んでから使用してください。

### ■製品仕様

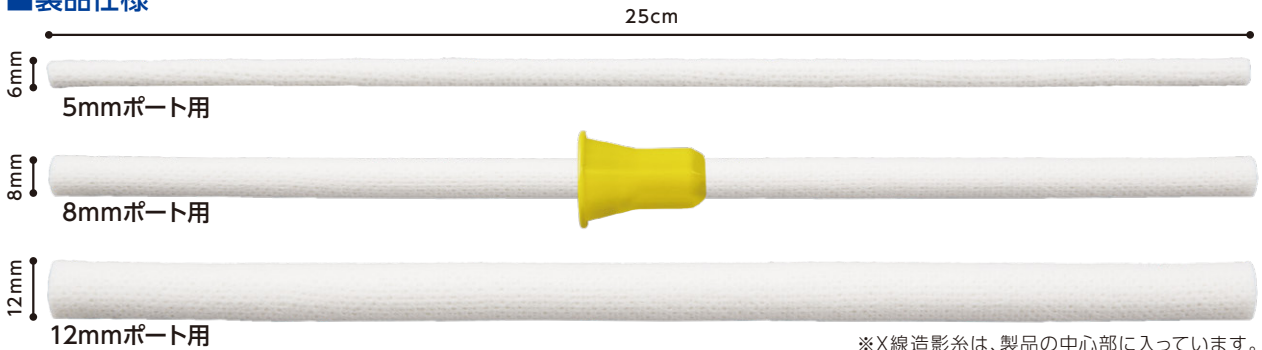

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
23721	エンドワイパーX <sup>®</sup> 5mmポート用 1本入(20袋) 直径6mm×25cm	販売単位   155 × 320 × 40	165.5g	8箱	4971032237213 14971032237210
		外装   355 × 170 × 330	1.8kg		
23734	エンドワイパーX <sup>®</sup> 8mmポート用シース付 1本入(20袋) 直径8mm×25cm	販売単位   155 × 330 × 100	255.0g	8箱	4971032237343 14971032237340
		外装   430 × 340 × 350	2.4kg		
23738	エンドワイパーX <sup>®</sup> 8mmポート用 1本入(20袋) 直径8mm×25cm	販売単位   155 × 330 × 55	—	8箱	4971032237381 14971032237388
		外装   475 × 190 × 355	—		
23722	エンドワイパーX <sup>®</sup> 12mmポート用 1本入(20袋) 直径12mm×25cm	販売単位   155 × 320 × 80	270.0g	8箱	4971032237220 14971032237227
		外装   345 × 330 × 330	2.6kg		

△使用前にトロッカーとの適合性を確かめてください。

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。