

商品情報

マタニティマーク

- ママが自分向けの商品と認識し、安心して使えるように、「マタニティマーク」を表記しました。ママにやさしい環境づくりを推進しています。
- 外出先で万一の際にママと分かり、周囲の配慮が得やすくなります。



■セット内容

	お産用パッド	ショーツ		吸水防水マット
商品画像				
サイズ	長さ 56cm	適応サイズ ヒップ85cm~120cm	適応サイズ ヒップ82cm~110cm	幅60cm × 長さ90cm
用途	羊水を吸収	お産用パッドを固定		移動時の車のシートに敷いて汚れ防止
特長	破水時の羊水をたっぷり吸収できる大きなパッド	伸縮性が高く、履きやすいショーツ	三方開きで診察しやすいショーツ	ママのおしりが乗せられるサイズで、万一の羊水のモレを吸収するマット
商品名	ソフトレーヌ αガード L	フィットパンツ ふつうサイズ	使い捨てコットンショーツ フルオープン	メディマットライト 6090

アジャスター(別売)追加でヒップ140cmまで対応!

お産用パッドだけで妊娠37~40週の平均羊水量(約500~700g)以上の吸収量があります!

■使用方法

1

お産用パッドを広げてショーツに当て、ショーツを履きます。

2

移動する車の座席が汚れないよう、マットを広げその上で安静にしてください。

3

使用後のマットなどは、パッケージに入れて衛生的に廃棄してください。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
54267	dc 破水セット 1組入 ソフトレーヌαガードL、フィットパンツふつう、 メディマットライト6090	販売単位 210 × 300 × 65	162.0g	50袋	4971032542676
		外装 610 × 475 × 350	9.1kg		
★ 54272	dc 破水セット フルオープンショーツ 1組入 ソフトレーヌαガードL、使い捨てコットンショーツ フルオープン、 メディマットライト6090	販売単位 210 × 300 × 68	177.0g	50袋	4971032542720
		外装 610 × 475 × 350	9.9kg		

★受注生産品のため、納期をいただきます。

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://dacco-web.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

医家向

産科・婦人科製品
産科・婦人科製品
産科・婦人科セット
産科・婦人科セット

破水してから病院へ向かうまでに
必要な衛生用品の詰め合わせ

破水セット

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

適切な
行動と注意を
促す

準備の
手間・費用を
軽減

コンパクトで
外出時の
持ち運びに
便利



破水時の 連絡・来院を促したい

破水なのか分からない時や
違和感がある時は
すぐに病院に連絡して
来院して欲しい。




ママの満足度を向上させたい

出産前に破水に関して不安を感じたことはありましたか？



不安の内容
・いつ破水するか
・破水した時に対応できるか

出産前に大きめのパッドなど、破水時の準備をしていましたか？

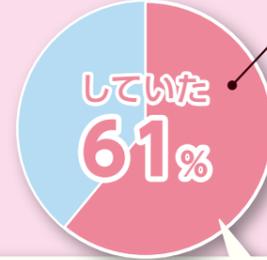

準備したもの
・夜用ナプキン ・お産用パッド ・レジャーシート
・オムツ ・バスタオル ・ペットシート など

準備をしていたママに聞きました

準備で困ったこと

- ・何を準備したら良いか分からなかった
- ・一つひとつ購入して揃えることが大変だった
- ・準備に費用がかかった
- ・準備したが、持ち歩いていなかった
- ・カバンに入り切らなくて困った など

ショーツと夜用ナプキンを2つ用意していたが、羊水の量が想定以上だったため、全然足りなかったと、言う声も



ベビーカレンダー調べ(産後ママ n=747)

破水セットでお手伝いします!

1 破水時の情報入りパッケージで適切な行動・注意を促す!

破水かな?と思ったら... If you wonder it's a water breaking / 如果你想知道是不是破水
1. かかりつけの病院に自分で電話をして症状の詳細を伝え、指示を仰ぎます。
You call your hospital to tell them the details of the symptoms and ask for instructions.
2. 破水セットを使用し、車やタクシーで(自分で運転しないください)、構内
して病院へ向かいます。
Using this set for the water breaking and head to the hospital at rest, such as lying down in a car or taxi.
Please do not drive yourself to the hospital.

破水セット
お産用パッド
レジャーシート
夜用ナプキン
オムツ
バスタオル
ペットシート

【小注意】 Cautions / 注意
・破水なのか分からない時や違和感がある時は、自分で
病院に連絡してください。
When there are not to know whether it's water breaking or feel uncomfortable, please contact a hospital without
driving yourself to the hospital.
・破水したら感染予防のため、入浴やシャワー、トイレの
使用しないでください。
If the water breaking, do not take a bath, shower, or warm water washing of the toilet to prevent infection.
※必ず必ず破水セット、夜用ナプキン、お産用パッド、レジャーシート、ペットシート、オムツ、バスタオル、それぞれに注意書きがあります。



正面

破水時の対応情報を記載

- 破水時にとる行動や注意事項を記載しているため、破水して慌てているママも、パッケージの説明を見ながら行動できます。
- 事前に読むことで、不安も軽減できます。
- パッケージのQRコードから、商品情報サイトへ飛ぶことができ、破水についての情報や商品の詳細が確認できます。

かかりつけ病院名 Hospital or clinic name / 産科診療所名称
オオサキレディースクリニック
緊急時の電話番号 Emergency phone number / 緊急電話番号
(01)2345-6789
タクシー会社の電話番号 Taxi company phone number / 出産時に利用するタクシー会社
(1234)56-7891

産院の連絡先記入欄

- パッケージに連絡先を書いておけるため、緊急時でもすぐに連絡できます。

用意している資料はほとんど日本語。日本語が分からないママに伝わっているか心配。

3か国語に対応

- 日本語、英語、中国語の3か国語表記※のパッケージ、商品情報サイトで、日本語が分からないママでも破水時の対応方法が確認できます。

※母が外国籍の出産は全体の約1%、そのうち約30%が中国籍のため、英語と中国語を表記しています。
参考:厚生労働省「人口動態統計2021」より



日本語



英語



中国語

2 コンパクトで 外出時の持ち運びに便利



- コンパクトにまとまっているため、外出時に持ち運べて便利です。



3 準備の手間・費用を軽減

- 破水してから来院するまでに必要な衛生用品がセットになっているため、ママが事前に準備する手間や費用を軽減できます。

4 破水に適した用品で安心

- 破水に適した用品のため、羊水がモれる心配を軽減できます。
- チャック付きパッケージで、羊水で濡れた物などを衛生的に運べます。 [商品詳細は次ページ >>>](#)

5 使用しなかった場合でも 産後や災害備蓄用に

- お産用パッド、ショーツは出産時の入院中に、マットはベッドシートやおむつ替えシートに使えます。
- 災害備蓄用品として保管できます。

