



オオサキアイマスク



光線療法時に新生児の目を確実にやさしく守る
絆創膏タイプのアイマスクです。



商品特長

光線を確実に遮断

- ピリルビン血症の光線療法時に使用する不織布製アイマスクです。中間層のアルミ箔が光線を確実に遮断します。

装着が簡単な絆創膏タイプ

- 絆創膏タイプで装着が簡単です。鼻にあたる部分はカットされており、顔の凹凸にフィットします。

カブレを抑えるゲル粘着剤

- ゲル粘着剤を使用しており、肌がカブレるのを抑えます。また、剥がす時の痛みを軽減できます。

※アレルギー体質の赤ちゃんへの使用は控えて下さい。


清潔な滅菌済個包装

- 一枚ずつ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。




商品情報


製品サイズ

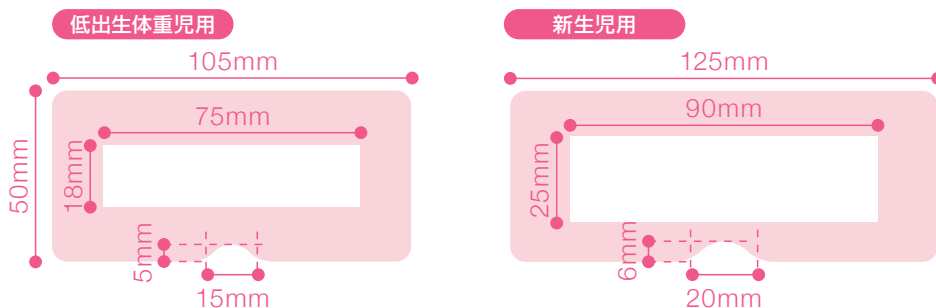

使用方法

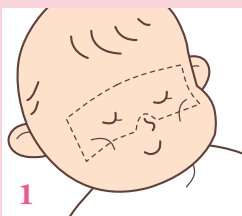

1 新生児特有のめくりを取り除き、遮光部分が目にあたるように、まぶたを塞いで貼りつけます。

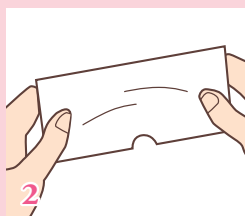

2 カブレを防ぐためにも、絆創膏を伸ばさないようにしてください。



3 隙間から光線が入らないように、特に鼻のあたるカット部分を軽く押さえつけます。



4 治療が終わったら、やさしく剥がします。

商品規格

オオサキ アイマスク

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	標準価格(税抜)	梱入数	JANコード/ITFコード
11105	オオサキ アイマスク 低出生体重児用 10枚入 50mm×105mm	販売単位 165 × 85 × 20	44.0g	-	10個 × 10箱	4971032111056
		内装 170 × 174 × 103	495.0g			24971032111050
		外装 184 × 353 × 548	5.5kg			14971032111053
11104	オオサキ アイマスク 新生児用 10枚入 50mm×125mm	販売単位 165 × 85 × 20	46.0g	-	10個 × 10箱	4971032111049
		内装 170 × 174 × 103	515.0g			24971032111043
		外装 184 × 353 × 548	5.7kg			14971032111046

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店