

出産直後の骨盤をしっかり固定
ディスプレイザブルタイプの骨盤ベルト

骨盤ベルト

キュッとベルト® D

daccoは助産師さんとママの声から生まれました



産科・婦人科製品

マタニティ腹帯・ベルト

商品特長

- やわらかく丈夫な不織布が、出産直後の骨盤をしっかり固定します。
- 交差して引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけで簡単に着脱できます。
- 使い捨てタイプのため、出産直後の悪露で汚れやすい時期の着用により便利です。

商品情報

■着用期間の目安

出産直後～お部屋に戻るまで

■バリエーション


種類	ヒップ
フリー	87cm～105cm
LL	92cm～110cm

■素材


ポリプロピレン

※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。）


■着用方法

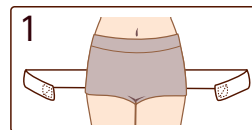

足を揃えて、ベルトを後ろから前にまわします。

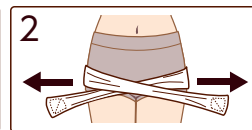

前側でベルトを交差し、左右真横に引っ張ります。

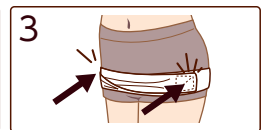


引っ張ったままワンタッチテープでとめます。

■正しい着用位置

下図の上前腸骨棘という部分よりも下を、地面と平行に締めてください。

ベルト前部の下端を恥骨に合せて装着すると、適切な位置に締めやすくなります。

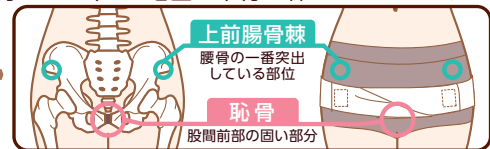

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
60807	キュッとベルト® D フリーサイズ 10本入 ヒップ 87cm～105cm	販売単位 165 × 165 × 75	189.0g	10袋	4971032608075
		外装 395 × 200 × 290	2.3kg		
60808	キュッとベルト® D フリーサイズ 1本入 ヒップ 87cm～105cm	販売単位 120 × 245 × 15	20.8g	10個×40袋	4971032608082
		内装 120 × 240 × 55	215.0g		
		外装 500 × 550 × 500	9.9kg		
60809	キュッとベルト® D LLサイズ 10本入 ヒップ 92cm～110cm	販売単位 185 × 165 × 75	220.0g	10袋	4971032608099
		外装 395 × 200 × 290	2.6kg		
60810	キュッとベルト® D LLサイズ 1本入 ヒップ 92cm～110cm	販売単位 120 × 245 × 15	23.3g	10個×40袋	4971032608105
		内装 120 × 240 × 55	240.0g		
		外装 500 × 550 × 500	10.9kg		

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki

オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221
ホームページ / http://dacco-web.com E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店