

産後の骨盤をしっかり固定!

産後用骨盤ベルト

# キュッとベルト® II

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

からだに  
フィット!

かんたん  
装着

ズレにくい  
形状



## 商品特長

## ① からだにフィット

- からだにフィットする素材が、産後の骨盤をしっかり固定します。
- フチ取りテープなどを極力使用していないため、段差が少なく、心地良い着用感です。

## ② かんたん装着

- キュッと引っ張り、ワンタッチテープで留めるだけで、ひとりでも簡単に装着できます。
- タグを目印にすると、ベルトの上下が分かりやすくなります。

## ③ ズレにくい形状

- 下腹部に当たる部分が一段低く、座ってもズレ上がりにくい形状です。
- 左右の腰部内側にズレ止めテープが付いています。

## ④ 汚れが目立ちにくい

- 悪露などで汚れても目立ちにくい、黒色の生地を使用しています。



ママの疑問に答える  
「産後ママの骨盤ケアQ&A」付き!  
(daccoホームページでも、ご覧いただけます。)


## 商品情報

## ■ 着用期間の目安

出産直後から6週間まで ※妊娠・出産による、骨盤のゆるみや回復には個人差があります。  
左記期間は骨盤がゆるんでいる期間の目安で、それ以降も続けて着用可能です。

## ■ 正しい着用位置

右図にある、「上前腸骨棘」という部位よりも下を、地面と平行に締めてください。この部位よりも上を締めてしまうと、骨盤の下側が開いてしまったり、妊娠中は胎児を締めてしまったりする恐れがあるため、助産師の指導のもとで着用位置をよく確認して着てください。

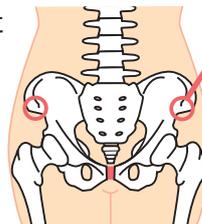


じょうぜんちようこつきよく  
上前腸骨棘  
腰骨の一番突出している部位




## ■ 着用方法


ベルト中央下部を「恥骨」に当てて装着すると、適切な位置に締めやすくなります。

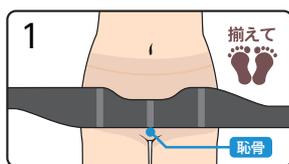

足を揃えて、ベルト中央下部を恥骨に当て、前から後ろに回します。

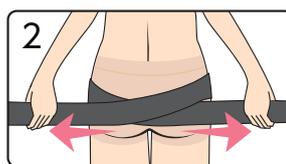

おしり側でベルトを交差し、端を持って左右に伸ばします。

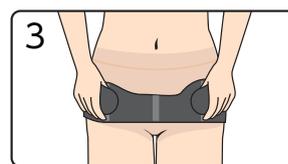

伸ばしたまま端を留めます。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名略称/JANコード	JANコード/ITFコード
60811	キュッとベルトⅡ フリー ブラック 1枚入 ヒップ87cm~105cm	販売単位   115 × 155 × 43 外表   438 × 128 × 263	110.0g 2.6kg	20箱	キュッとベ・ルト2 4 971032 608112	4971032608112 14971032608112

■素材:[表面]ナイロン、ポリウレタン [中面]ポリウレタン樹脂 [内面]ナイロン  
■製造国:日本

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
https://dacco-web.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。