



# 滅菌分娩用ガウン



撥水性・バクテリアバリア性に優れた、  
滅菌済分娩介助用ガウンです。



## 商品特長

### 1 優れたバリア性

- バクテリアバリア性・撥水性に優れた、複層構造のSMS不織布を使用した滅菌済 分娩介助用ガウンです。AAMILレベル3に適合しています。

### 2 清潔に着用できるたたみ方


- ガウンテクニックで清潔に着用しやすいたたみ方になっています。

### 3 分娩室の雰囲気に合うピンク色

- 分娩室の雰囲気を明るくやわらかくするピンク色です。


### ■ SMSの複層構造とは

バクテリアバリア性に優れた、極細繊維のメルトブロー高密度不織布を、低発塵で撥水性に優れた、長繊維スパンボンド不織布で挟み、複層構造にしています。

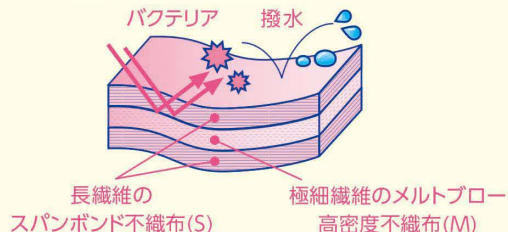


## 商品情報


### ■ 着用方法 ※オープン法

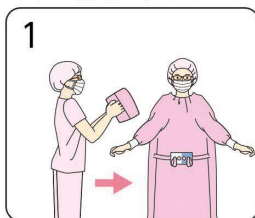


滅菌バッグよりガウンを清潔に取り出し、着用者が図のようにガウンの差し込み口に両手を入れて広げ、両腕を通します。

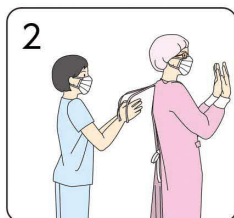


介助者が襟後部のワンタッチテープをとめ、襟紐と内側の腰紐を結びます(手袋を袖口を覆うように手首まで引き上げて着用します)。

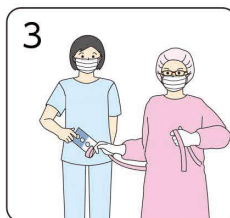

着用者はホルダーを持ち、左側の紐を外します。介助者に右後方よりホルダーを渡します。

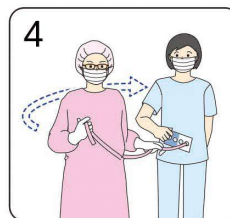


介助者はホルダーを持ったまま着用者の左後方に回り、ホルダーについた紐を着用者に渡します。

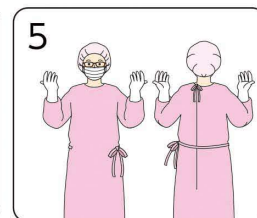

着用者がホルダーを外し、左側面で腰紐を結び、完了です。

### ■ 製品仕様

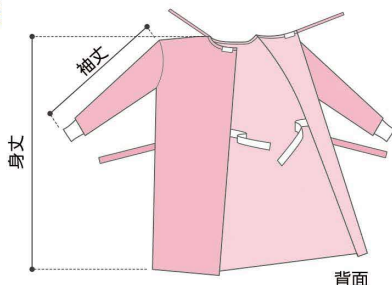

### ■ 素材

本体: ポリプロピレン  
袖口: ポリエステル  
※ラテックスフリー  
(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

## 商品規格

### ■ 滅菌分娩用ガウン

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
87250	滅菌分娩用ガウン M ピンク 1枚入 身丈119cm 袖丈58cm	販売単位   250 × 350 × 50	160.0g	50袋	4971032872506
		外表   645 × 380 × 430	8.7kg		—
87251	滅菌分娩用ガウン L ピンク 1枚入 身丈122cm 袖丈58cm	販売単位   250 × 350 × 50	160.0g	50袋	4971032872513
		外表   645 × 380 × 430	8.7kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店